

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Straße 2–4
D-61352 Bad Homburg
www.lilly-pharma.de

Medizinische Information Deutschland:

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






Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Telefon 06172–273 2222
Telefax 06172–273 2030






So benutzen Sie Ihren FORSTEO®-Fertigen

PP-TE-DE-0172



1	Vorbereiten der Injektion
	1. Hände waschen, Fertigpen aus dem Kühlschrank nehmen. Injektionsstelle vorbereiten, wie vom Arzt oder Apotheker gelernt.
	2. Weiße Penschutzkappe abziehen.
	3. Neue Nadel nehmen, Schutzfolie vom äußeren Nadelschutz abziehen.
	4. Nadelschutzkappe gerade auf die FORSTEO®-Patrone aufsetzen und festschrauben.
	5. Äußere Nadelschutzkappe abziehen und aufbewahren.
	6. Hautstelle mit Alkoholtupfer reinigen und Hautfalte anheben.
	7. Innere Nadelschutzkappe abziehen und wegwerfen.

2	Injektion der Dosis
	1. Schwarzen Injektionsknopf vollständig herausziehen, bis der rote Streifen zu sehen ist.
	2. Nadel senkrecht in die Hautfalte einstechen.
	3. Injektionsknopf mit dem Daumen vollständig durchdrücken, bis der gelbe Schaft nicht mehr sichtbar ist. Injektionsknopf gedrückt halten und langsam bis fünf zählen. Erst dann die Nadel aus der Haut ziehen.

1 · 2 · 3 · 4 · 5

3	Nach der Injektion
	1. Dosis überprüfen. Der gelbe Schaft darf nicht mehr sichtbar sein.
	2. Äußere Nadelschutzkappe aufsetzen.
	3. Nadel abschrauben und in ein durchstechsicheres Behältnis geben.
	4. Weiße Schutzkappe auf den Pen aufsetzen, den Pen unmittelbar nach Gebrauch in den Kühlschrank legen.

* Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage.