

# Più Termo-disinfettore che mai: i Terminator MELAG

MELAtherm 20 / MELAtherm 10 Evolution

**NOVITÀ:**  
2 misure per  
ogni esigenza



# Termo-disinfettori MELAG





## Di tendenza: efficienti.

Scoprite MELAtherm: molto più di una semplice lava strumenti, è il nuovo membro del vostro team nella sala di decontaminazione. MELAtherm si occupa della pulizia e della disinfezione, consentendo al vostro team di concentrarsi su ciò che conta davvero: fornire cure eccezionali ai vostri pazienti. Il tutto con maggiore sicurezza, meno sforzo e la tranquillità su cui il vostro team può contare.



MELAtherm 10 Evolution

MELAtherm 20


- 
**Efficienza:**  
 ridurre la quantità di lavoro necessario garantisce flussi di lavoro che consentono di risparmiare tempo e denaro.
- 
**Sicurezza:**  
 Maggiore sicurezza sul lavoro grazie al contatto minimo con gli strumenti
- 
**Conformità legale:**  
 La documentazione delle procedure di rielaborazione consente la riproducibilità.
- 
**Ottimizzazione dei processi:**  
 Riutilizzo immediato degli strumenti non chirurgici dopo il ricondizionamento automatizzato (in conformità con gli standard nazionali).

### Prodotto in Germania. Realizzato per voi.

Il futuro ha bisogno di tradizione: da oltre 70 anni sviluppiamo, produciamo e ottimizziamo le nostre soluzioni di sistema per il ricondizionamento degli strumenti nella nostra sede centrale di Berlino. MELAG è sinonimo di arte ingegneristica e produzione "made in Germany" con i più alti livelli di qualità.



### L'utilizzo di un MELAtherm si ripaga da solo dopo soli 25 mesi, ipotizzando i seguenti valori:

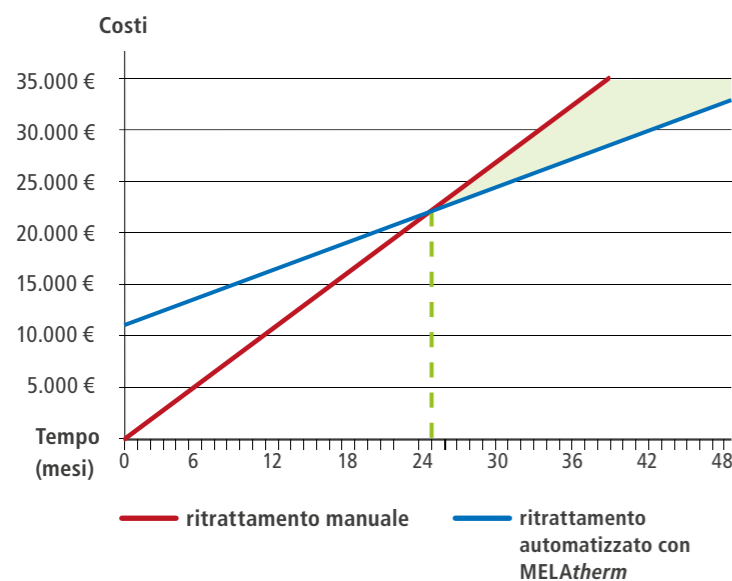

Numero di giorni lavorativi/mese	22
Cicli al giorno	2
Salario orario dei dipendenti	18,50 €
Costo del bagno disinfettante	1,80 €
Costo dei mezzi di processo, elettricità, acqua	2,00 €
Tempo di lavoro per il ricondizionamento manuale (in ore)	1
Tempo di lavoro per il ricondizionamento automatizzato (in ore)	0,25
Costi per ciclo di ricondizionamento manuale	<b>20,30 €</b>
Costi per ciclo di ricondizionamento automatizzato	<b>6,63 €</b>
Costi di acquisto per MELAtherm	11 000,00 €
Tasso di interesse	5,0 %
Manutenzione/assistenza/convalida al mese	100,00 €
<hr/>	
Costi mensili per il ricondizionamento manuale	<b>893,20 €</b>
Costi mensili per il ricondizionamento automatizzato	<b>437,33 €</b>

# Più prestazioni. Più possibilità. Più MELAtherm. Più termo-disinfettore che mai.

Che abbiate uno studio medico o un centro di assistenza sanitaria: i termo -disinfettori MELAtherm con due diverse dimensioni della camera di lavaggio sono state sviluppate a Berlino nei minimi dettagli per garantire le massime prestazioni, affinché le vostre idee per flussi di lavoro igienici che consentono di risparmiare tempo, spazio e costi possano diventare realtà.



AquaBoost per una pulizia brillante



Display XXL Smart-Touch ProControl



ProControl per l'approvazione dei lotti



Interfacce di documentazione integrate



Qualità MELAG - made in Germany



Oltre 90 cestelli, supporti e adattatori



Assistenza con oltre 1300 tecnici qualificati



Intervallo di manutenzione di 2 anni o 1.000 cicli

## MELAtherm 10 Evolution

La soluzione ottimizzata per lo studio con:

- ➔ **Spazio limitato**  
grazie allo stoccaggio salvaspazio degli agenti di processo nel cassetto del dispositivo
- ➔ **Volume di ricondizionamento ideale per gestire**  
strumenti per un massimo di 45 pazienti per lotto in un cestello base con un massimo di 12 flessibili segmenti



## MELAtherm 20

La soluzione XXL per:

- ➔ **Aumento dei volumi di ricondizionamento**  
di strumenti per un massimo di 90 pazienti per lotto in due cestelli base con un massimo di 24 segmenti flessibili
- ➔ **Sistemi di lavaggio vassoi**  
per il ricondizionamento di un massimo di 16 vassoi standard nel cestello inferiore e fino a 32 vassoi più piccoli nel cestello superiore
- ➔ **Massimi standard di efficienza e praticità**  
con filtro centrale autopulente e prestazioni di pulizia migliorate fino al 63% rispetto a MELAtherm 10 Evolution (in base alla linea guida ÖGSV 3a).

Oltre 30.000 studi medici e cliniche in tutto il mondo si affidano a MELAtherm:



*"MELAtherm ci stupisce ogni giorno! Anche con 45 pazienti, la soluzione coordinata MELAG System Solution garantisce efficienza, sicurezza e processi fluidi in ogni fase del ricondizionamento."*

The Linden Tree Dental Lounge  
Dunfermline, Regno Unito



*"Grazie a MELAtherm e al sistema MELAG, siamo riusciti a semplificare notevolmente i processi di lavoro del nostro team e a risparmiare tempo prezioso".*

Clinica della dott.ssa Kateřina Jandová  
Praga, Repubblica Ceca



*«Con MELAtherm, la sicurezza incontra l'efficienza: in soli 60 minuti strumenti perfettamente puliti, disinfettati e asciugati. Insieme agli autoclavi e al software MELAtrace, creiamo un flusso di lavoro digitale, conforme alle normative, senza carta e con un notevole risparmio di tempo.»*

Studio Balsano  
Italia

MELAtherm 20

# Tutta la magia di MELAtherm in formato XXL.

Progettato per studi e cliniche senza limiti: con una camera di lavaggio extra-large, concetti di funzionamento e documentazione intelligenti e il sistema di risciacquo a 3 bracci di nuova concezione, MELAtherm 20 è pronto per qualsiasi sfida, oggi e in futuro.

Che si tratti di 230 V o 400 V, Passive DRY o Active DRY: con oltre 90 accessori e caratteristiche tecniche.

A eccezionali, MELAtherm 20 si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze, consentendo un ricondizionamento altamente efficiente degli strumenti per un massimo di 90 pazienti per carico.

Per strumenti necessari a 90 pazienti per ciclo

Camera da 160 litri con 2 cestelli base e fino a 24 segmenti flessibili

Variante da 230 V o 400 V con Active DRY o Passive DRY



**Servizio indipendente con oltre 1.300 tecnici**

Che si tratti di manutenzione o riparazione, la nostra rete di assistenza indipendente vi offre libertà di scelta e un ottimo rapporto qualità-prezzo!



## Concetto di camera XXL:-

fino a 24 segmenti flessibili nel cestello inferiore e il cestello superiore regolabile in altezza offrono spazio per tutto. E anche di più.



## AquaBoost:

Grazie alla sua potente pompa di circolazione e al sistema di bracci di risciacquo di nuova concezione, MELAtherm 20 raggiunge un miglioramento del 63% nelle prestazioni di pulizia rispetto a MELAtherm 10 Evolution.\*

\* Basato sulla linea guida ÖGSV 3a



## Sistemi di asciugatura:

Con activeDRY per un'asciugatura attiva interna ed esterna o passiveDRY con apertura automatica della porta e condensazione del vapore, è possibile ottenere un'asciugatura delicata e proteggere in modo affidabile gli strumenti dalla corrosione e dai danni.



## Smart-Touch:

Con il display touch extra-large, tutto è magicamente semplice, semplicemente magico: dalla selezione dei programmi alla documentazione tramite rete o USB.



## ProControl:

autenticazione dell'utente e approvazione in batch direttamente sul dispositivo: ciò consente di risparmiare tempo, è conforme alla legge e permette il riutilizzo immediato degli strumenti non chirurgici. (si prega di rispettare gli standard nazionali)



## MediaGuard: (opzionale)

Il contenitore appositamente progettato mantiene tutto in ordine e protegge in modo affidabile i vostri armadi dagli agenti di processo.



## Cleanfinity Pro: (opzionale)

Massima protezione degli strumenti, minimo sforzo: il nuovo filtro centrale autopulente nella parte inferiore della camera di lavaggio garantisce il mantenimento ottimale del valore dei vostri strumenti cavi e consente di risparmiare tempo prezioso.



### Essiccazione attiva:

l'essiccazione attiva esterna e interna activeDRY garantisce una protezione ideale dei vostri strumenti contro la corrosione e i danni.



### Assunzione degli agenti di processo:

L'integrazione dei mezzi di processo e del modulo di dosaggio crea spazio, semplifica il lavoro e aiuta a evitare errori.



### Camera di lavaggio ottimizzata per l'uso pratico :

il concetto di camera di lavaggio compatta con cestelli inseribili versatili consente di risparmiare tempo, ridurre i costi e preservare risorse preziose.



### Smart-Touch:

Con Smart-Touch, iniziare a utilizzare il termoisinfettore, selezionare i programmi e azionarlo non è mai stato così facile. Ora ancora più intuitivo grazie ai tutorial video che trattano tutte le questioni operative rilevanti.



### ProControl:

autenticazione dell'utente e approvazione in batch direttamente sul dispositivo: ciò consente di risparmiare tempo, è conforme alla legge e permette il riutilizzo immediato degli strumenti non chirurgici. (si prega di rispettare gli standard nazionali)



### Documentazione interfaccia:

Grazie allo slot per schede CF integrato e alle due interfacce di rete, non sono previsti costi aggiuntivi per la documentazione.



### AquaBoost:

la nuova potente pompa di circolazione garantisce risultati di pulizia migliori fino al 44%\* e capacità superiori: è possibile ricondizionare fino a 23 manipoli e turbine per ciclo!

\* Rispetto al modello precedente MELAtherm 10



## MELAtherm 10 Evolution

# Design compatto. Efficiente per la natura.

Non avete spazio? Nessun problema! Questo miracolo di risparmio spazio con camera di lavaggio ottimizzata per lo studio e agenti di processo integrati supera ogni aspettativa. MELAtherm 10 Evolution offre risultati di pulizia e asciugatura eccezionali in spazi ridottissimi, con costi di ciclo di soli 1,50 € che consentono di risparmiare risorse.

Che si tratti del display Smart-Touch con tutorial video integrati, del software di approvazione ProControl o del sistema di asciugatura activeDRY, MELAtherm 10 Evolution è sinonimo di prestazioni con facilità: affinché il vostro tempo appartenga nuovamente ai vostri pazienti.

Per gestire strumenti necessari a 45 pazienti per ciclo

Camera da 84 litri con un cestello base e fino a 12 segmenti flessibili

Disponibile nella versione da 230 V o 400 V con asciugatura activeDRY



**Servizio indipendente con oltre 1.300 tecnici**  
Che si tratti di manutenzione o riparazione, la nostra rete di assistenza indipendente vi offre libertà di scelta e un ottimo rapporto qualità-prezzo!

Più varietà. Più te stesso.

# Cestelli e adattatori per tutte le specialità.

Ogni campo della medicina è unico, proprio come le vostre esigenze di ricondizionamento degli strumenti. Che lavoriate in odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, podologia, medicina veterinaria, oftalmologia o altri campi medici, con oltre 90 cestelli e adattatori possiamo creare un modello di carico personalizzato che si adatta perfettamente a voi e al vostro flusso di lavoro.

Sul nostro sito web è possibile trovare una varietà di modelli di carico con elenchi dettagliati degli articoli: [www.melag.com/it/schema%20di%20carico%20melatherm](http://www.melag.com/it/schema%20di%20carico%20melatherm)



NOVITÀ: MELAtherm 20 con carrello di carico per un massimo di 8 cesti Din



## Studio dentistico

In un solo ciclo, MELAtherm 10 Evolution è in grado di ricondizionare gli strumenti utilizzati per oltre 45 pazienti, mentre MELAtherm 20 può ricondizionare quelli utilizzati per oltre 90 pazienti in pochissimo tempo.

✔ Ritattamento delle cannule di aspirazione universali posizionate in verticale nel cestello degli strumenti

✔ Adattamento sicuro delle punte degli ablatori a ultrasuoni con chiave dinamometrica



## Clinica ginecologica

Dopo la pulizia e la disinfezione sono disponibili fino a 32 speculum in MELAtherm 10 Evolution e fino a 45 speculum in MELAtherm 20, integrati da cestelli flessibili per strumenti aggiuntivi.



## Clinica ORL


Che si tratti dei 192 speculum auricolari di MELAtherm 10 Evolution o degli oltre 400 speculum auricolari di MELAtherm 20, in soli 60 minuti circa sono completamente ricondizionati e pronti per l'uso, insieme ad altri strumenti ORL.







## Clinica medica

Che si tratti di chirurgia, ortopedia, urologia, dermatologia o medicina generale, grazie ai cestelli flessibili, ai raccordi per tubi e agli adattatori per strumenti cavi, MELAtherm si adatta perfettamente alle esigenze della vostra specialità.

MELAtherm 10 Evolution

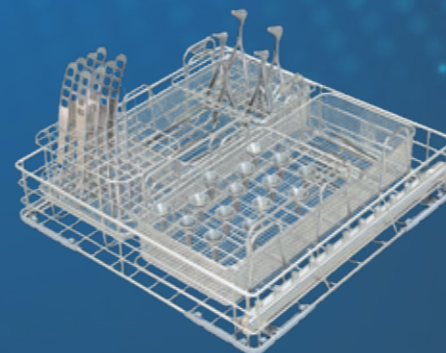

MELAtherm 20

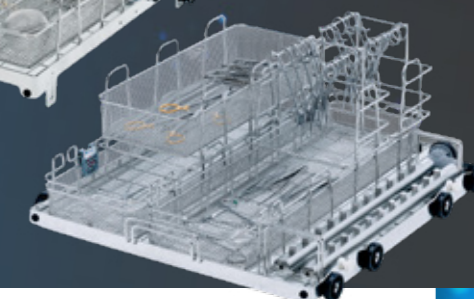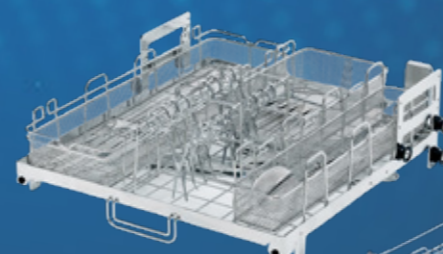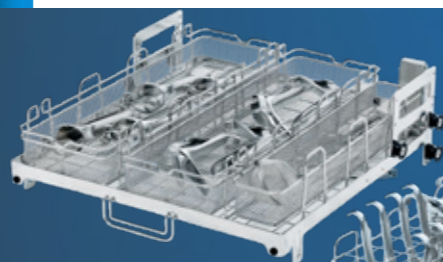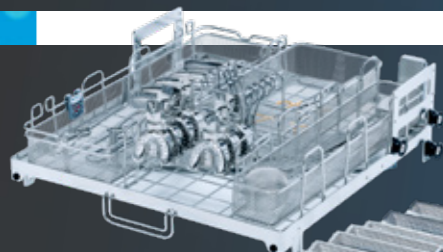

Ulteriori modelli di carico per chirurgia maxillo-facciale e ortodonzia sono disponibili all'indirizzo [www.melag.com/it](http://www.melag.com/it)

Ulteriori modelli di carico per podologia, medicina veterinaria, oftalmologia e centri di chirurgia ambulatoriale sono disponibili all'indirizzo [www.melag.com/it](http://www.melag.com/it)

Accessori per MELAtherm

## Flessibili come le vostre esigenze.

Trova gli accessori giusti per te. E per il tuo MELAtherm. Le nostre soluzioni appositamente sviluppate portano il ricondizionamento dei tuoi strumenti a un livello superiore: per una maggiore sicurezza, la massima efficienza e una praticità notevole.



### MELAcontrol Wash-Check

Tenete sempre sotto controllo le prestazioni di pulizia: il MELAcontrol Wash-Check coordinato consente un controllo semplice e regolare dei risultati di pulizia dei vostri strumenti, nel cestello di base o sulla guida dell'iniettore, in conformità alla norma DIN EN ISO 15883-5.

### Cleanfinity – Filtri centrali pulibili

I nostri filtri centrali pulibili non solo proteggono gli strumenti cavi sensibili, ma anche il vostro budget e l'ambiente. Che si tratti di Cleanfinity con indicatore di pulizia nel MELAtherm 10 Evolution o di Cleanfinity Pro come filtro centrale autopulente nel MELAtherm 20, Cleanfinity è la soluzione intelligente per un futuro pulito.

### Agenti di processo MEtherm

La chimica è perfetta: i nostri agenti di processo MEtherm – detergente, neutralizzante e brillantante – sono stati sviluppati appositamente per MELAtherm. Il risultato: pulizia senza compromessi, asciugatura ottimale e consumo minimo. Ciò consente di combinare la massima igiene con un'efficienza economica sostenibile.



### MELAdem 53

I sistemi di trattamento dell'acqua eseguono il risciacquo finale con acqua demineralizzata per proteggere e mantenere gli strumenti. Il potente MELAdem 53 consente anche di collegare ulteriori dispositivi nella sala di ricondizionamento.



### MELAstore

Aumenta l'efficienza e la qualità del processo di ricondizionamento: i tray MELAstore e i box MELAstore offrono un notevole risparmio di tempo e una riduzione degli sprechi grazie alla standardizzazione.



### Sale rigenerante MELAG

Questo sale ad elevata purezza è perfettamente compatibile con il sistema di addolcimento dell'acqua MELAtherm. La granulometria grossolana garantisce una solubilità uniforme, protegge il termo-disinfettore dai depositi di calcare e favorisce prestazioni di pulizia durature.



### Care Oil Spray

Con questo olio completamente sintetico per la cura di strumenti dinamici, tutto funziona alla perfezione: una cura mirata dopo la pulizia e la disinfezione delle macchine protegge i vostri strumenti, riduce l'usura e previene costose riparazioni.



# Il sistema MELAstore Il flusso di lavoro diventa.

Desiderate ottimizzare ulteriormente il vostro processo di igiene? Allora aumenta il riciclaggio dei vostri strumenti con MELAstore. I tray di lavaggio e i Box di varie dimensioni e sono perfettamente compatibili tra loro e con le lavastumenti e le a come questo può migliorare il vostro flusso di lavoro:



**Risparmio di tempo:**  
risparmio fino a 30 minuti per ogni ciclo di riciclaggio rispetto al confezionamento dei singoli strumenti



**Protezione dell'ambiente:**  
riduzione dei costi dei materiali e dei rifiuti dello studio grazie a un consumo di imballaggi notevolmente inferiore



**Ottimizzazione dei processi:**  
aumento del livello di standardizzazione e quindi della gestione della qualità



**Sicurezza:**  
il fissaggio sicuro con barre in silicone protegge il team dello studio e gli strumenti



## Il tuo processo di riciclaggio – reinventato con MELAstore:



Pulizia e disinfezione dei tray MELAstore con il Termo-Disinfettore MELAG



Imballaggio con MELAstore Box



Sterilizzazione con autoclavi MELAG



Documentazione e approvazione con MELAtrace



Marcatura con MELAprint 80

# Confrontateci con altri produttori Tenete gli occhi aperti quando acquistate un Termo-Disinfettore.

Siamo certi della qualità, delle caratteristiche e della facilità di manutenzione delle nostre lavastumenti. Per aiutarti a verificarlo di persona, la seguente checklist riassume le caratteristiche più importanti dei nostri prodotti. In questo modo potrai confrontare facilmente i nostri dispositivi con quelli di altri produttori.

Caratteristiche del prodotto	I tuoi vantaggi	MELAtherm 10 Evolution	MELAtherm 20 con passiveDRY	MELAtherm 20 con activeDRY	Altro produttore
		activeDRY	passiveDRY	activeDRY	
<b>Essiccazione</b>	→ Con l'essiccazione interna ed esterna activeDRY o l'apertura automatica della porta passiveDRY, potete proteggere in modo affidabile i vostri preziosi strumenti dalla corrosione e dai danni, garantendo la massima sicurezza e una durata significativamente più lunga dei vostri strumenti.	✓	✓	✓	
<b>Concetto touch intuitivo</b>	→ Nitido, luminoso, sensazionale: l'ampio display touch ti guida con facilità attraverso tutte le funzioni: chiaro, comprensibile e affidabile fin dal primo momento.	✓	✓	✓	
<b>Assunzione di agenti di processo</b>	→ Più spazio, più struttura: la combinazione tra il modulo di stoccaggio e dosaggio degli agenti di processo crea un ordine duraturo nella sala di riciclaggio.	✓ nel cassetto dei supporti di processo	✓ nella scatola di conservazione MediaGuard opzionale	✓	
<b>Agenti di processo liquidi</b>	→ Il dosaggio dei fluidi di processo liquidi garantisce risultati ottimali di pulizia e asciugatura ed è completamente riproducibile.	✓	✓	✓	
<b>Interfacce di documentazione</b>	→ Grazie alle connessioni per rete e supporti di documentazione, è possibile trasmettere i protocolli in conformità con le normative vigenti senza bisogno di software aggiuntivo: in modo semplice e affidabile.	✓ Scheda CF o rete	✓ Chiavetta USB o rete	✓	
<b>Approvazione in batch direttamente sul dispositivo</b>	→ L'autenticazione utente senza carta e l'approvazione in batch consentono il riutilizzo immediato degli strumenti non chirurgici (si prega di rispettare gli standard nazionali).	✓	✓	✓	
<b>Camera di riciclaggio ottimizzata per la pratica clinica</b>	→ In combinazione con i versatili accessori, il concetto di camera consente flussi di lavoro che consentono di risparmiare tempo e risorse. Un carico nel MELAtherm 10 corrisponde a circa due carichi dell'autoclave dello studio, mentre un carico nel MELAtherm 20 corrisponde a circa quattro carichi dell'autoclave dello studio.	✓ Strumenti per un massimo di 45 pazienti	✓ Strumenti per un massimo di 90 pazienti	✓	
<b>Filtro centrale pulibile</b>	→ Una soluzione economica per la massima sicurezza: Cleanfinity garantisce un riciclaggio affidabile degli strumenti cavi e, se necessario, può essere pulito direttamente in studio senza costi aggiuntivi.	✓ Cleanfinity con indicatore di sostituzione del filtro	✓ Filtro autopulente Cleanfinity Pro	✓	
<b>Ritratteggio delle punte degli ablatori a ultrasuoni</b>	→ Solo l'adattamento delle punte degli ablatori a ultrasuoni con chiavi dinamometriche garantisce la massima sicurezza dell'utente e previene gli incidenti sul lavoro.	✓	✓	✓	
<b>AquaBoost Tecnologia</b>	→ L'elevata pressione di lavaggio della tecnologia AquaBoost non solo consente di trattare ulteriori manipoli nel cestello Injector Basket Flex 1, ma migliora anche in modo significativo il risultato della pulizia.	✓ +44% rispetto al modello precedente, MELAtherm 10	✓ +63% rispetto a MELAtherm 10 Evolution	✓	
<b>Monitoraggio pressione e bracci di risciacquo</b>	→ Il monitoraggio di questi parametri garantisce l'affidabilità del processo.	✓	✓	✓	
<b>Cicli di manutenzione di facile esecuzione</b>	→ Cicli di manutenzione di 24 mesi o 1.000 cicli e un concetto di assistenza indipendente riducono i costi operativi correnti.	✓	✓	✓	
<b>Utenti soddisfatti nella tua regione</b>	→ Oltre 30.000 studi medici si affidano già a MELAtherm: scopri le loro esperienze su: <a href="http://www.melag.com/it/blog-globale">www.melag.com/it/blog-globale</a>	✓	✓	✓	



Se già utilizzate un'autoclave MELAG nel vostro studio, l'acquisto di una lavatrice-disinfettatrice MELAG è particolarmente vantaggioso grazie al notevole risparmio in termini di manutenzione e convalida congiunte!

## Dati tecnici

# Fatti e cifre in sintesi.

I Termo-disinfettori MELAG sono disponibili nelle varianti di collegamento a 400 volt (corrente trifase, DTA) e 230 volt (corrente alternata, DTB). Se i requisiti di installazione consentono un collegamento a 400 volt, si consiglia la variante DTA per i suoi tempi di funzionamento notevolmente più brevi.

Programmi MELAtherm 20*		
	400 V	230 V
Universale	42 min	78 min
Universale+	56 min	90 min
Intensivo	59 min	93 min
Oftalmologia	59 min	92 min

Programmi MELAtherm 10 Evolution*		
	400 V / DTA	230 V / DTB
Rapido	37 min	57 min
Universale	42 min	63 min
Intensivo	54 min	67 min
Oftalmologia	43 min	63 min

\* Tutti i programmi più asciugatura passiva tramite apertura automatica della porta e condensazione del vapore al termine del programma, oppure asciugatura attiva, che può essere interrotta in qualsiasi momento.

	MELAtherm 20		MELAtherm 10 Evolution
	passiveDRY	activeDRY	activeDRY
Dimensioni del dispositivo (L x A x P)	59,8 x 81,8 (83,6**) x 73 cm L'unità si inserisce sotto un piano di lavoro da 60 cm		59,8 x 81,8 (83,6**) x 67,8 cm L'unità si inserisce sotto un piano di lavoro da 60 cm
Volume della camera di lavaggio	160 litri		84 litri
Peso	74 kg (82 kg**)	78 kg (86 kg**)	80 kg (86 kg**) (106 kg con mobile base)
Collegamento elettrico 400 V / DTA	3 N AC 318-415 V, 50 Hz, 3 x 16 A		3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A
Consumo energetico 400 V / DTA	9,1 kW		10,2 kW
Collegamento elettrico 230 V / DTB	AC 220-240 V, 50 Hz, 1 x 16 A		AC 220-240 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Consumo energetico 230 V / DTB	2,9 kW		3,3 kW
Dimensioni MELAdem® 53 / 53 C	Ø 24 x 57 cm (61,5 cm compreso il gomito di collegamento) / Ø 24 x 44,3 cm (48,8 cm)		

\*\* con top acciaio

Prodotto	MELAtherm 20 passiveDRY 400 V	MELAtherm 20 activeDRY 400 V	MELAtherm 20 passiveDRY 230 V	MELAtherm 20 activeDRY 230 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 400 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 230 V
Codice articolo	ME20022A50	ME20022A50T	ME20022B50	ME20022B50T	ME20020	ME20021
Disponibilità	immediatamente	immediatamente	Estate 2026	Estate 2026	immediatamente	immediatamente

La disponibilità al di fuori dell'UE può variare a causa delle approvazioni normative.



**Risparmia carta, proteggi l'ambiente:**

Per ridurre il consumo di carta, mettiamo a disposizione la documentazione utente dei nostri prodotti in formato elettronico nel nostro centro download. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.melag.com/it](http://www.melag.com/it)

**MELAG**  
competence in hygiene