

Checkliste MELAtherm®

Herstellerempfehlungen zum Routinebetrieb

Seriennummer: _____

Kontrolle vor Praxisbeginn:					
Kontrolle auf Verunreinigungen, Ablagerungen oder Beschädigungen:				Monat / Jahr:	
Grob- und Feinsieb		Türdichtung und Waschkammer	Filterelemente	Anmerkung:	Unterschrift:
Tag					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Monatliche Kontrolle:			
Kontrolle der Adapter und Injektordüsen auf Durchgängigkeit	Kontrolle des Zubehörs und der Kunststofffront auf Verunreinigungen oder Beschädigungen	Datensicherung der Protokolle von der CF-Card (falls kein Netzwerkanschluss vorhanden)	Anmerkung:
Kontrolle OK:	Kontrolle OK:	Kontrolle OK:	Unterschrift:



Unser Video-Tutorial stellt Ihnen die Routine-Prüfungen für MELAG Thermodesinfektoren vor. Jetzt QR-Code scannen und Video starten.