

MELAG



MADE IN
GERMANY



Speed+

SteriHero

L'autoclave le plus rapide de sa catégorie.

Votre nouveau **super** pouvoir :

Toute la magie de SteriHero dans un encombrement réduit : L'autoclave de classe B de 5 litres offre des performances exceptionnelles, une facilité d'utilisation magique et une flexibilité remarquable pour un large éventail de spécialités. De la médecine vétérinaire à la podologie en passant par la beauté et le tatouage, SteriHero Speed+ est prêt à répondre à tous vos besoins.



Jusqu'à **80%**
des cycles plus rapides*



Jusqu'à **60%**
moins d'espace requis*



Jusqu'à **50%**
moins de poids*



Tout ceci avec : **100%**
Qualité - 100% fabriqué en Allemagne

Podologie et soins des pieds

La podologie et les soins des pieds sont confrontés aux mêmes défis que les cabinets médicaux : Respecter des règles d'hygiène strictes ! Cependant, ils n'ont souvent pas les moyens financiers de le faire. SteriHero Speed+ offre donc la stérilisation la plus sûre de la classe B à un rapport qualité-prix exceptionnel.

Beauté

Dans les salons de beauté et de manucure, une hygiène irréprochable est cruciale pour les clients. Un autoclave offre des avantages évidents et ne doit pas nécessairement être coûteux ou prendre beaucoup de place. Avec SteriHero Speed+, nous apportons une stérilisation sûre dans votre salon : Compact, rapide et fiable !

Médecine vétérinaire

Les cabinets et cliniques vétérinaires suivent de plus en plus les règles d'hygiène de la médecine humaine. SteriHero Speed+ est à vos côtés et est parfaitement adapté aux exigences de la médecine vétérinaire : Des fonctions au prix.

Tatouage et piercing

Qu'il s'agisse de fans de tatouage ou de piercing, même les clients les plus exigeants doivent être protégés contre les infections. Avec SteriHero Speed+, vous pouvez compter sur une hygiène imbattable : Le concept innovant de l'appareil offre une stérilisation fiable qui protège non seulement vos clients et donc la réputation de votre studio, mais aussi votre budget !



* Comparé à un autoclave conventionnel

Bye bye le temps d'attente, bonjour la stérilisation en un temps record.

De nombreux cabinets et studios doivent stériliser : Mais le temps que cela prend dépend de vous ! L'autoclave le plus rapide de sa catégorie permet des temps de cycle record pour des flux de travail jusqu'à 6 fois plus rapides.

Qu'elle soit utilisée seule ou en complément de l'autoclave de votre cabinet, la chambre de stérilisation de 5 litres avec 2 plateaux offre suffisamment d'espace pour une stérilisation rapide comme l'éclair des instruments emballés et non emballés entre les traitements. Aujourd'hui et demain.

de **6.5 min***

Durée du cycle d'un autoclave conventionnel : environ 40 minutes



NOUVEAU : MELAstore Box Compact (tapis en silicone inclus)

Le partenaire fiable aux côtés de votre SteriHero Speed+ : Pour un traitement et un stockage à l'épreuve des héros, de vos sets d'instruments jusqu'à leur prochaine utilisation.



Petit à l'extérieur, grand à l'intérieur : Un produit spécial à tous points de vue.

Cette centrale compacte, d'une largeur de 30 cm seulement, permet d'économiser jusqu'à 60 % d'espace par rapport aux autoclaves traditionnels.



Magiquement simple : Simplement magique.

Le concept d'appareil plug & play, le grand écran Smart-Touch et la fonction d'économie d'énergie facilitent tout, de l'installation à la protection de l'environnement en passant par l'utilisation.



Made in Germany: Made for You.

Nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité. Nous développons et produisons à Berlin selon les normes de qualité les plus strictes - 100% made in Germany. Parce que nous savons qu'un autoclave ne doit jamais tomber en panne.

* Temps de cycle avec une chambre vide et des conditions optimales (plus le séchage).

Pas grand. Mais génial.

SteriHero Speed+ a été conçu à Berlin, en Allemagne, dans les moindres détails pour une performance optimale : Attendez-vous à l'inattendu et découvrez les points forts de ce produit héroïque pour plus de sécurité, de productivité et de protection de l'environnement.



Autoclave de classe B selon la norme EN 13060

Le processus de vide fractionné garantit une stérilisation sûre, quels que soient la conception et l'emballage de l'instrument.



Temps de cycle ultra-rapides

A toute vapeur : Enregistrez des temps de stérilisation allant jusqu'à 2 kg sur 2 plateaux ou dans 1 conteneur en seulement 6,5 à 16 minutes (plus le séchage) - Fabriqué en Allemagne.



Écran Smart-Touch avec LED d'état

Écran tactile avec structure de menu intuitive pour une utilisation facile, comme sur votre smartphone - même avec des gants.



Connectivité et enregistrement des données

Conformité aux exigences légales grâce à l'enregistrement des paramètres de stérilisation via USB et réseau ou à l'impression de journaux avec MELAprint 80.



flexDRY séchage

Temps de séchage librement programmable de 1 à 60 minutes, adapté individuellement à votre flux de travail et à votre charge.



Économie d'énergie mode d'économie d'énergie

Le chauffage et l'affichage sont désactivés entre les stérilisations pour une efficacité énergétique optimale.



Prêt à l'emploi, stériliser toute la journée :

Le concept d'installation plug & play avec des réservoirs d'eau externes et le refroidissement par air très efficace permettent une installation rapide à l'endroit souhaité, car le SteriHero Speed+ ne nécessite pas de raccordement à l'eau ou à l'air comprimé.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo d'installation :
www.sterihero.com/en/tutorial

En option : nouveau kit de raccordement MELAdem pour l'arrivée et l'évacuation automatiques de l'eau.



Protégez l'environnement. Et vos patients.

Avec une large gamme de programmes, **SteriHero Speed+** garantit une stérilisation sûre qui répond à vos besoins. Mais ce n'est pas tout : le concept révolutionnaire d'appareil autonome et la fonction d'économie d'énergie Power Save font de **SteriHero Speed+** la solution la plus propre - pour votre budget et l'environnement.

Programmes SteriHero Speed+		Temps de fonctionnement (de la charge minimale à la charge maximale)*	Séchage (préréglé)
Universel-B	134° C, temps de plateau : 5,5 min	11 – 16 min	8 min (avec flexDRY à partir de 1 min)
Quick-S	134° C, temps de plateau : 3,5 min	6,5 – 10 min	5 min (avec flexDRY à partir de 1 min)
Douceur-B	121° C, temps de plateau : 20,5 min	26 – 32 min	20 min (avec flexDRY à partir de 1 min)
Prion-B	134° C, temps de plateau : 20,5 min	26 – 32 min	8 min (avec flexDRY à partir de 1 min)

*Données pour le programme Quick S pour les charges non emballées et pour tous les autres programmes pour les charges emballées. Les temps peuvent varier en fonction du type et de la quantité de chargement.

Rapide à déployer, stériliser avec plaisir : Notre concept d'installation plug & play avec des réservoirs d'eau externes permet une mise en service rapide à n'importe quel endroit : Découvrez les caractéristiques techniques de notre nouvel autoclave compact.

	SteriHero Speed+
Art. n°.	ME10105SB
Type d'appareil	Autoclave autonome (avec des conteneurs externes) En option : Kit de connexion pour système de traitement de l'eau disponible
Classe d'autoclave	Classe B
Taille de la chambre (H x L x P)	8 x 20.3 x 31 cm
Volume de la chambre	5 litres
Quantité de charge	Max. 2 kg d'instruments / 0,45 kg de textiles
Dimensions de l'appareil (H x L x P)	30 x 30 x 59 cm
Dimensions de l'appareil (H x L x P)	28 kg
Alimentation électrique	200 – 230 V / 50 – 60 Hz
Consommation électrique	2.100 watts
Interfaces de documentation	2 x USB, réseau

Pour votre sécurité : Tout d'une seule main !

Chaque cabinet et chaque studio est unique. Nous sommes le partenaire sur lequel vous pouvez compter et qui vous propose des solutions personnalisées. Profitez de l'interaction parfaite entre les laveurs-désinfecteurs, les dispositifs d'étanchéité et les solutions logicielles de MELAG avec les autoclaves **SteriHero**. C'est ainsi que nous concrétisons votre idée d'un flux de travail hygiénique permettant d'économiser du temps, de l'espace et de l'argent.



Rev.2.25-17402-06.25-FR-ME



Économisez du papier, protégez l'environnement :

Pour réduire la consommation de papier, nous vous fournissons la documentation de l'utilisateur sous forme électronique dans notre centre de téléchargement. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante : www.sterihero.com/en

MELAG
competence in hygiene