

Instrukcja użycia

Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony wielodawkowy

Każdy wstrzykiwacz zawiera 4 stałe dawki. Jedną dawkę przyjmuje się raz w tygodniu.

Mounjaro 2,5 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Mounjaro 5 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Mounjaro 7,5 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Mounjaro 10 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Mounjaro 12,5 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Mounjaro 15 mg/dawkę KwikPen, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

tirzepatyd

Ta instrukcja użycia zawiera informacje dotyczące sposobu podawania leku Mounjaro za pomocą wstrzykiwacza KwikPen.



Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed wykonaniem wstrzyknięcia leku Mounjaro za pomocą wstrzykiwacza KwikPen.

Należy przeczytać tę instrukcję użycia i ulotkę dołączoną do opakowania przed użyciem wstrzykiwacza KwikPen z lekiem Mounjaro i za każdym razem po otrzymaniu nowego wstrzykiwacza. Mogą pojawić się w niej nowe informacje. Informacje te nie zastępują rozmowy z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką na temat schorzenia lub stosowanego leczenia.

Mounjaro KwikPen to jednorazowy, wielodawkowy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony. **Wstrzykiwacz zawiera 4 stałe dawki. Jedną dawkę przyjmuje się raz w tygodniu.** Należy wstrzykiwać jedną dawkę raz w tygodniu, podskórnie.


Po podaniu 4 dawek wstrzykiwacz należy wyrzucić wraz z niewykorzystanym lekiem. Wstrzykiwacz uniemożliwi wybranie pełnej dawki po podaniu 4 cotygodniowych dawek. **Nie należy** wstrzykiwać pozostałości leku. Nie należy pobierać leku ze wstrzykiwacza do strzykawki.

Nie należy udostępniać wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen innym osobom, nawet jeśli igła została wymieniona. Można zarazić inne osoby ciężką chorobą lub zarazić się od nich ciężką chorobą.

Pacjenci niewidomi lub mający problemy ze wzrokiem nie powinni używać wstrzykiwacza bez pomocy osoby przeszkolonej w zakresie korzystania ze wstrzykiwacza.

Opis części

Części wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen

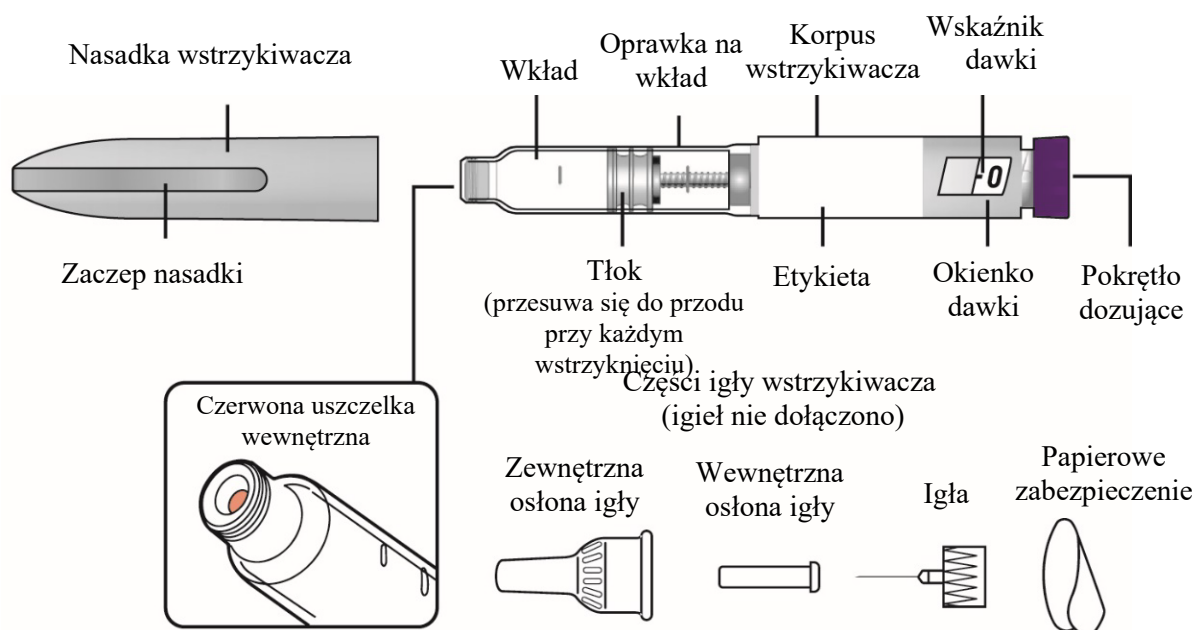


Igła zgodna ze wstrzykiwaczem KwikPen (jeśli pacjent nie wie, jakiej igły do wstrzykiwacza należy użyć, powinien zapytać przedstawiciela fachowego personelu medycznego)

Materiały potrzebne do wykonania wstrzyknięcia


- Mounjaro KwikPen
- Igła zgodna ze wstrzykiwaczem KwikPen (jeśli pacjent nie wie, jakiej igły do wstrzykiwacza należy użyć, powinien zapytać wykwalifikowanego przedstawiciela personelu medycznego)
- Tampon, gazik lub wacik
- Pojemnik na ostre odpady lub pojemnik gospodarczy

Przygotowanie do podania leku Mounjaro za pomocą wstrzykiwacza KwikPen

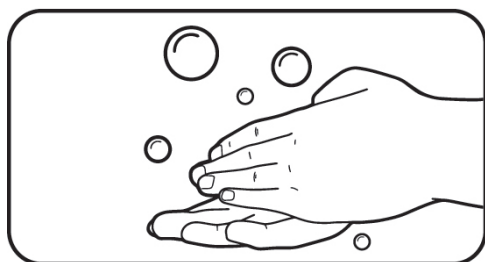

Krok 1


- Umyć ręce wodą z mydłem.

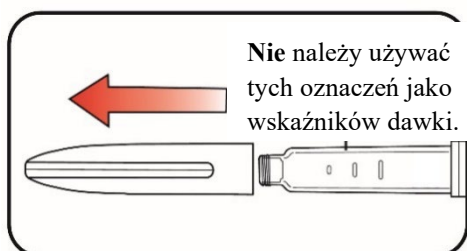

Krok 2:


- Zdjąć nasadkę ze wstrzykiwacza prostym ruchem.
- Sprawdzić wstrzykiwacz i etykietę. **Nie** używać, jeśli:
 - nazwa leku lub moc dawki nie zgadzają się z podanymi na receptę

- upłynął termin ważności wstrzykiwacza (EXP) lub wstrzykiwacz wygląda na uszkodzony
- lek został zamrożony, zawiera cząstki stałe, jest mętny lub zmienił kolor. Lek Mounjaro powinien być bezbarwny do jasnożółtego.

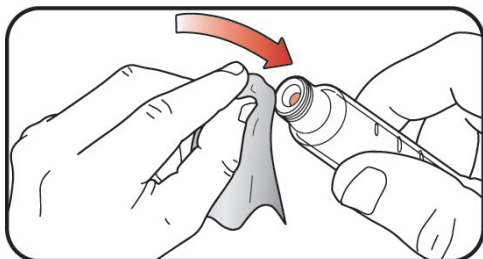


Krok 3:

- Przetrzeć wacikiem czerwoną wewnętrzną uszczelkę.

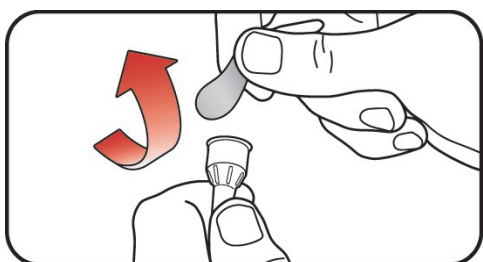


Krok 4:

- **Wziąć nową igłę przeznaczoną do wstrzykiwacza.** Każde wstrzyknięcie należy wykonywać nową igłą, aby zapobiec zakażeniu i uniknąć zablokowania igły.
- Zerwać papierowe zabezpieczenie z zewnętrznej osłony igły.

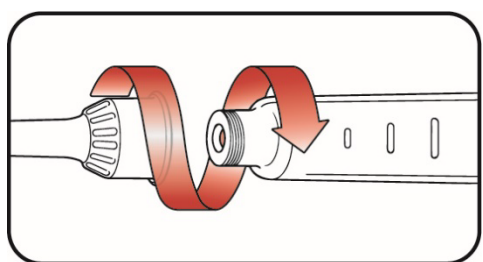

Krok 5:

- Zabezpieczoną zewnętrzną osłoną igły nałożyć prostym ruchem na wstrzykiwacz i mocno dokręcić.

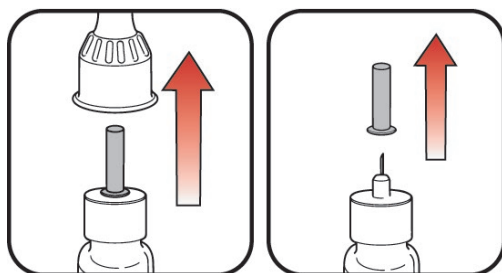


a. Zewnętrzna osłona igły

b. Wewnętrzna osłona igły


Krok 6:

- Zdjąć i odłożyć zewnętrzną osłonę igły. Osłona będzie użyta ponownie.
- Zdjąć wewnętrzną osłonę igły i wyrzucić ją.

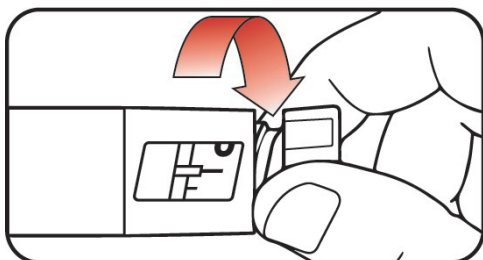


Krok 7:

- Powoli obracać pokrętkiem dozującym do chwili, gdy słychać będzie **2 kliknięcia**, a w okienku dawki pojawi się dłuższa kreska . To jest ustawienie przygotowania wstrzykiwacza. Można je skorygować, obracając pokrętko dozujące w dowolnym kierunku, dopóki linia ustawienia przygotowania wstrzykiwacza nie zrówna się ze wskaźnikiem dawki.

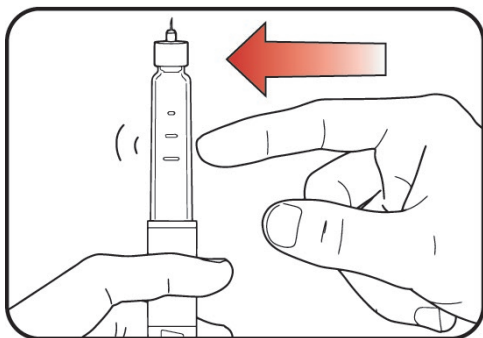

Krok 8

- Trzymać wstrzykiwacz z igłą skierowaną do góry.
- Delikatnie postukać palcem w oprawkę wkładu, aby pęcherzyki powietrza zebrały się w jego górnej części.

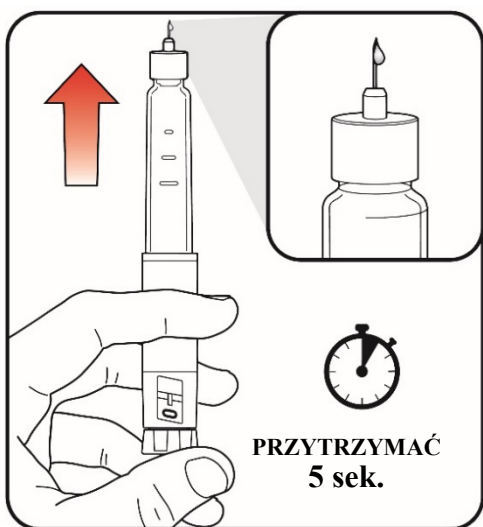


Krok 9:

- Wypuścić trochę leku ze wstrzykiwacza, **wciskając pokrętko dozujące** do oporu, a następnie **powoli policzyć do 5, przytrzymując pokrętko dozujące**. W okienku dawki musi być widoczna ikona . **Nie wstrzykiwać** do organizmu.

Przygotowanie wstrzykiwacza powoduje usunięcie powietrza z wkładu i zapewnia jego prawidłowe działanie. Wstrzykiwacz został przygotowany, jeśli z końcówki igły wypływa niewielka ilość leku.


- Jeśli nie widać leku, należy powtórzyć **kroki 7-9**, nie więcej niż 2 razy.
- Jeśli nadal nie widać leku, należy zmienić igłę wstrzykiwacza i powtórzyć **kroki 7-9**, nie więcej niż 1 raz.
- Jeżeli wciąż nie widać leku, należy skontaktować się z lokalnym biurem firmy **Lilly** wymienionym w ulotce informacyjnej dla pacjenta.

Podawanie leku Mounjaro za pomocą wstrzykiwacza KwikPen

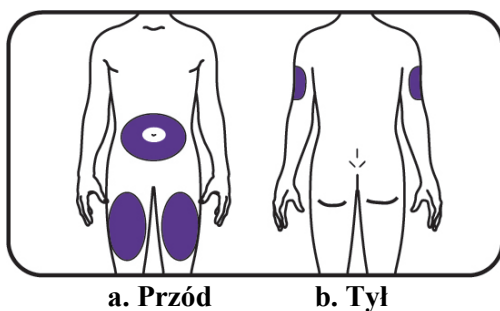


Krok 10:

- Wybrać miejsce wstrzyknięcia.
 - a. Pacjent lub inna osoba mogą wstrzyknąć lek w udo lub w okolicę brzucha (powłoki brzuszne) w odległości co najmniej 5 cm od pępka.
 - b. Inna osoba może wykonać u pacjenta wstrzyknięcie w tylną górną część ramienia.
- Miejsce wstrzyknięcia należy **zmieniać** co tydzień. Można wybrać tę samą okolicę ciała, ale lek należy wstrzykiwać w różnych miejscach w obrębie tej okolicy.

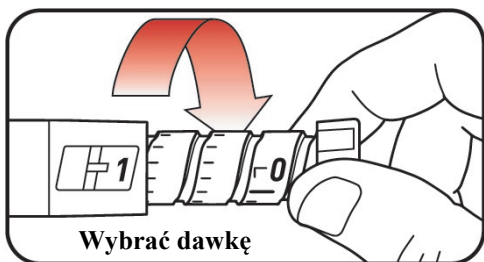


Krok 11:

- Obrócić pokrętkę dozującą do oporu, aż w okienku dawki pojawi się ikona **1**. Ikona **1** odpowiada pełnej dawce.

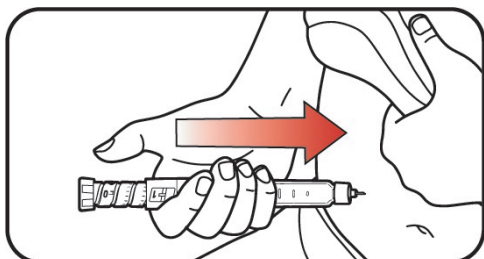


Krok 12:

- Wkłuć igłę w skórę.

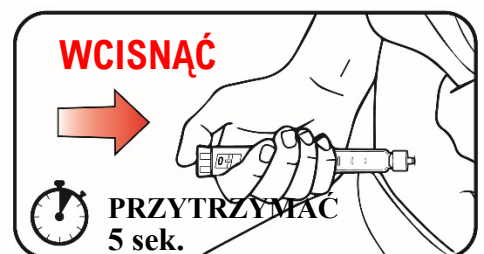

- Wstrzyknąć lek **wciskając pokrętkę dozującą** do oporu, a następnie **powoli policzyć do 5, nadal przytrzymując pokrętkę dozującą**. W okienku dawki musi być widoczna ikona **0** zanim będzie można wyjąć igłę.

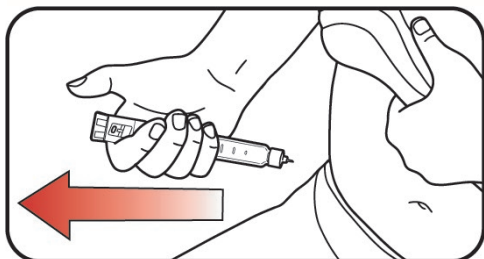

Krok 13:


- Wyjąć igłę ze skóry. Obecność kropli leku na czubku igły jest zjawiskiem normalnym. Nie wpłynie to na wielkość podanej dawki.
- Należy upewnić się, że w okienku dawki znajduje się ikona **0**.

Jeśli w okienku widoczna jest ikona **0**, podana została pełna dawka leku.

Jeśli w okienku dawki nie widać ikony **0**, należy jeszcze raz wkłuć igłę w skórę i dokończyć podawanie wstrzyknięcia. **Nie należy** ponownie wybierać dawki.


Jeżeli nadal są wątpliwości, czy podana została pełna dawka, **nie należy** ponownie rozpoczynać ani powtarzać wstrzyknięcia. Więcej informacji można znaleźć w punktach „Przechowywanie wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen” lub „Często zadawane pytania”.

Po podaniu leku Mounjaro za pomocą wstrzykiwacza KwikPen

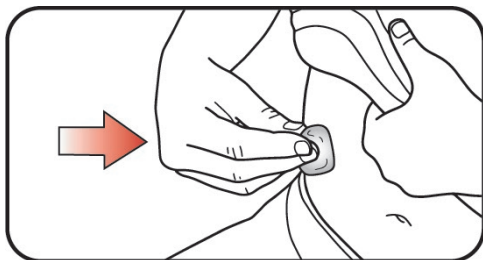


Krok 14:

- Jeżeli po wyjęciu igły ze skóry pojawi się krew, miejsce wstrzyknięcia należy lekko ucisnąć gazikiem lub wacikiem. **Nie** pocierać miejsca wstrzyknięcia.

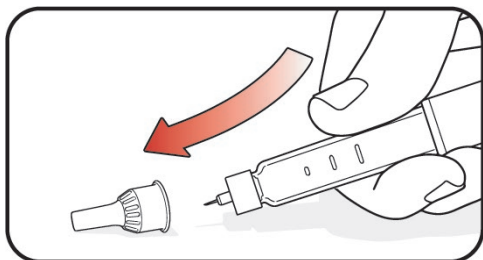


Krok 15:

- Ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonę igły.

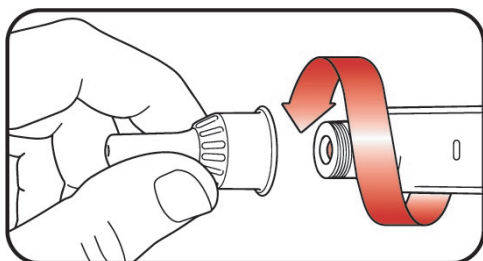

Krok 16:

- Odkręcić igłę zabezpieczoną zewnętrzną osłoną i umieścić ją w pojemniku na ostre odpady (patrz „Utylizacja wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen i igieł do wstrzykiwaczy”).
Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z nałożoną igłą, aby uniknąć wyciekania leku, zablokowania igły czy przedostania się powietrza do wnętrza wstrzykiwacza.

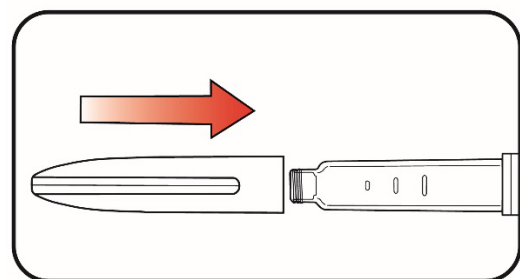

Krok 17:

- Nałożyć nasadkę na wstrzykiwacz.
Nie należy przechowywać wstrzykiwacza bez nałożonej nasadki.

Przechowywanie wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen

Nie używane wstrzykiwacze:


- Nie używane wstrzykiwacze należy przechowywać w **lodówce** w temperaturze od 2°C do 8°C.
- Nie używane wstrzykiwacze można zużyć do daty ważności wydrukowanej na etykiecie, jeśli były przechowywane w lodówce.
- **Nie** zamrażać wstrzykiwacza. Jeśli wstrzykiwacz został zamrożony, należy go wyrzucić (zutylizować).

Używane wstrzykiwacze:

- Po wykonaniu wstrzyknięcia **używany wstrzykiwacz** można przechowywać w **temperaturze pokojowej** poniżej 30°C.
- Wstrzykiwacz i igły należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucić wstrzykiwacz 30 dni po pierwszym użyciu, nawet jeśli zawiera pozostałości leku.
- Wstrzykiwacz należy wyrzucić po podaniu 4 cotygodniowych dawek. Próba wstrzyknięcia jakiegokolwiek pozostałości leku może spowodować podanie niepełnej dawki, nawet jeśli we wstrzykiwaczu nadal znajduje się lek.

Pozostałość leku:

- Po wykonaniu **czwartego wstrzyknięcia** widoczna jest pozostałość leku i jest to zjawisko normalne. Ten pozostały lek zapewnia prawidłowe działanie wstrzykiwacza.
 - Wstrzykiwacz należy wyrzucić.
 - Nawet jeśli we wstrzykiwaczu nadal znajduje się lek, **nie należy** próbować wstrzykiwać pozostałości leku. Próba wstrzyknięcia jakiegokolwiek pozostałości leku może spowodować podanie niepełnej dawki.

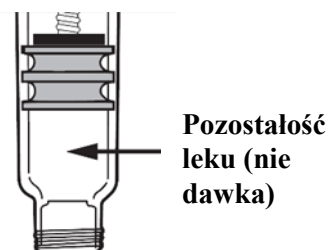

Utylizacja wstrzykiwacza Mounjaro KwikPen i igieł do wstrzykiwaczy

- Zużyte igły do wstrzykiwacza należy umieszczać w pojemniku na ostre odpady lub pojemniku z twardego plastiku z pokrywą zabezpieczającą.
- **Nie należy** wyrzucać igieł do wstrzykiwacza luzem do domowego pojemnika na odpadki.
- Zużyty wstrzykiwacz należy zutylizować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez wykwalifikowanego przedstawiciela personelu medycznego.
- Należy zapytać się wykwalifikowanego przedstawiciela personelu medycznego, jak prawidłowo pozbyć się pojemnika na ostre odpady.
- Napelnionego pojemnika na ostre odpady nie można ponownie wykorzystywać.

Często zadawane pytania

- Jeżeli nie można zdjąć nasadki wstrzykiwacza, należy ją delikatnie przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w przeciwną stronę, a następnie ściągnąć prostym ruchem.
- Jeśli nie można obrócić pokrętki dozującego do momentu, gdy **1** znajdzie się w okienku dawki:
 - Wstrzykiwacz wraz z niewykorzystanym lekiem należy wyrzucić. We wstrzykiwaczu może być niewystarczająca ilość leku, aby podać pełną dawkę. **Nie należy** próbować wstrzykiwać pozostałości leku.
- W przypadku trudności z wciśnięciem pokrętki dozującego:
 - wolniejsze wciskanie pokrętki dozującego ułatwia wstrzykiwanie
 - igła może być zatkana. Należy nałożyć nową igłę, a następnie przygotować wstrzykiwacz.
 - do wnętrza wstrzykiwacza mógł przedostać się kurz, jedzenie lub płyn. Należy wyrzucić wstrzykiwacz i wziąć nowy.

- W razie dodatkowych pytań lub jakichkolwiek problemów ze wstrzykiwaczem Mounjaro KwikPen należy skontaktować się z firmą **Lilly** albo lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Terminarz podawania leku

Wstrzykiwacz Mounjaro
KwikPen należy używać 1 raz
w tygodniu.

Cotygodniową dawkę wstrzykuję w poniższych terminach.

Należy wpisać wybrany dzień
tygodnia, w którym
wykonywany będzie zastrzyk.
Zastrzyk należy wykonywać w
tym dniu każdego tygodnia
(przykładowo: poniedziałek)

(Dzień/miesiąc) (Dzień/miesiąc) (Dzień/miesiąc) (Dzień/miesiąc)

--

--	--	--	--

Data ostatniej aktualizacji: 02/2025