

Instrukcja użycia

Trulicity 3 mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napelnionym dulaglutyd



← Rozłożyć i wyprostować →



Przeczytać tekst po obu stronach, aby zapoznać się z instrukcjami

INFORMACJE NA TEMAT LEKU TRULICITY WE WSTRZYKIWACZU PÓLAUTOMATYCZNYM NAPEŁNIONYM

Przed zastosowaniem wstrzykiwacza półautomatycznego napelnionego należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia oraz informację dla pacjenta w ulotce dołączonej do opakowania. Należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką zasady prawidłowego wstrzykiwania leku Trulicity.

- Wstrzykiwacz to gotowe do użycia, fabrycznie napelnione urządzenie dozujące. Każdy wstrzykiwacz zawiera jedną tygodniową dawkę leku Trulicity (3 mg). Każdy wstrzykiwacz podaje tylko jedną dawkę.
- **Lek Trulicity podawany jest raz w tygodniu.** Odpowiedni dzień można zaznaczyć w kalendarzu, aby pamiętać o terminie wstrzyknięcia następnej dawki.
- Po wciśnięciu zielonego przycisku do wstrzykiwania igła wstrzykiwacza automatycznie wbije się w skórę, lek zostanie wstrzyknięty, a **po zakończeniu wstrzykiwania** igła sama się schowa (zostanie wciągnięta).

PRZED UŻYCIEM

Wyjąć

z lodówki.
Pozostawić zatyczkę podstawy na wstrzykiwaczu do czasu, kiedy pacjent będzie gotowy na wstrzyknięcie.

Sprawdzić

etykietę, aby upewnić się że to właściwy lek i że nie upłynął termin jego ważności.

Skontrolować


wstrzykiwacz. Nie należy stosować leku, jeśli wstrzykiwacz jest uszkodzony lub lek jest mętny, zmienił barwę albo zawiera widoczne zanieczyszczenia stałe.

Przygotować się

myjąc ręce.

WYBRAĆ MIEJSCE WSTRZYKNIĘCIA

- Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka mogą pomóc w wyborze najodpowiedniejszego miejsca wstrzyknięcia.
- Lek można wstrzyknąć w skórę na brzuchu lub w udo.
- Inna osoba może wstrzyknąć lek pacjentowi w górną część ramienia.
- W każdym tygodniu należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (w sposób rotacyjny). Można wybrać tę samą okolicę ciała, jednak lek należy wstrzykiwać w różnych miejscach w obrębie tej okolicy.

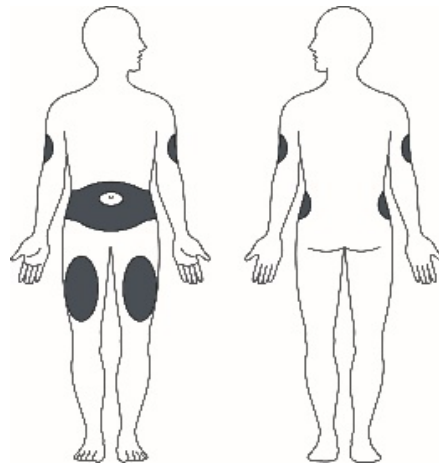

PRZEDNIA
CZĘŚĆ CIAŁA


TYLNA
CZĘŚĆ CIAŁA

1. ZDJĄĆ ZATYCZKĘ
2. PRZYŁOŻYĆ I ODBLOKOWAĆ
3. WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ

Część górna ►




1 ZDJĄĆ ZATY CZKĘ

-  Upewnić się, że wstrzykiwacz jest **zablokowany**.
- Zdjąć szarą zatyczkę.

Nie wolno ponownie zakładać zatyczki, ponieważ można w ten sposób uszkodzić igłę. Nie dotykać igły.

- Po zdjęciu, szara zatyczka wygląda tak jak pokazano na rysunku. Można ją wyrzucić.

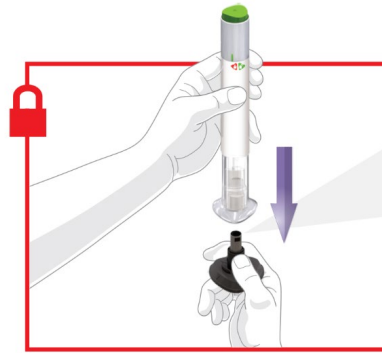


← Szara zatyczka


Jeżeli szara zatyczka nie wygląda jak na powyższym rysunku:

- **Nie używać** wstrzykiwacza.
- Bezpiecznie przechować wstrzykiwacz oraz zatyczkę i skontaktować się z firmą Lilly.
- Użyć nowego wstrzykiwacza.


2 PRZYŁOŻYĆ I ODBLOKOWAĆ



- Przyłożyć przezroczystą podstawę wstrzykiwacza płasko i mocno do skóry w miejscu wstrzyknięcia.

-  Odblokować, przekręcając pierścień blokady.

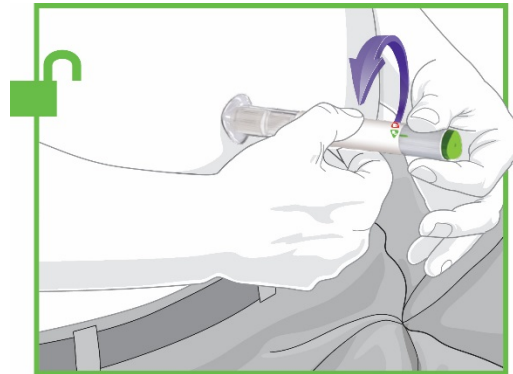

3 WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ

- Wcisnąć i przytrzymać zielony przycisk do wstrzykiwania; będzie można usłyszeć głośne kliknięcie.
-  Mocno przyciskać przezroczystą podstawę wstrzykiwacza do skóry, dopóki nie usłyszysz się drugiego kliknięcia. Kliknięcie będzie słychać w ciągu około 5-10 sekund, gdy igła zacznie się chować.
- Odsunąć wstrzykiwacz od skóry.

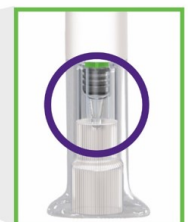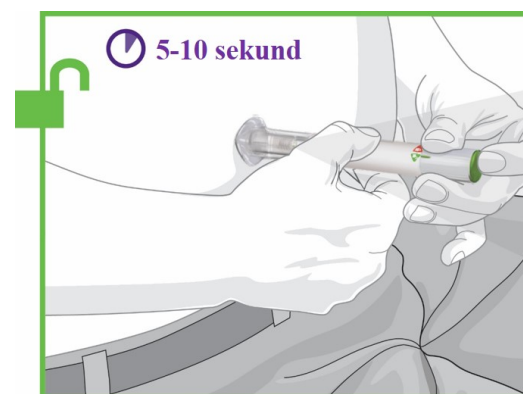

- **Kiedy w komorze widoczny będzie szary element, wstrzyknięcie zostanie zakończone.**

WAŻNE INFORMACJE

Przechowywanie i sposób obchodzenia się ze wstrzykiwaczem

Utylizacja wstrzykiwacza

Często zadawane pytania

Inne informacje

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje

PRZECHOWYWANIE I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ ZE WSTRZYKIWACZEM

- Wstrzykiwacz zawiera szklane elementy. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie używać w przypadku upuszczenia na twarde podłoże. Kolejne wstrzyknięcie wykonać używając nowego wstrzykiwacza.
- Wstrzykiwacz przechowywać w lodówce.
- W przypadku braku dostępu do lodówki, wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C), nie dłużej niż przez 14 dni.
- Nie zamrażać wstrzykiwacza. **NIE UŻYWAĆ** wstrzykiwacza, jeśli został zamrożony.
- Wstrzykiwacz przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
- Wstrzykiwacz należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy zapoznać się z pełną informacją dotyczącą prawidłowego przechowywania wstrzykiwacza podaną w Ulotce dla pacjenta.

UTYLIZACJA WSTRZYKIWACZA

- Wstrzykiwacz należy wyrzucić do pojemnika na ostre przedmioty lub usunąć w sposób zalecony przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.
- Wypełnionych pojemników na ostre przedmioty nie można ponownie wykorzystywać.
- Należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę co zrobić z lekami, których się już nie używa.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co zrobić w przypadku zauważenia pęcherzyków powietrza we wstrzykiwaczu?

Obecność pęcherzyków powietrza jest zjawiskiem normalnym i nie zaszkodzi pacjentowi ani nie wpłynie na wysokość dawki.

Co zrobić w przypadku odblokowania wstrzykiwacza i wciśnięcia zielonego przycisku do wstrzykiwania przed zdjęciem zatyczki?

Nie zdejmować zatyczki i nie używać wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz należy usunąć w sposób zalecony przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Wstrzyknąć lek używając innego wstrzykiwacza.

Co zrobić w przypadku zauważenia kropli płynu na końcówce igły po zdjęciu zatyczki?

Obecność kropli płynu na końcówce igły jest zjawiskiem normalnym i nie wpłynie na wysokość podanej dawki.

Czy konieczne jest przytrzymywanie wciśniętego zielonego przycisku do wstrzykiwania, dopóki wstrzyknięcie nie zostanie zakończone?

To nie jest konieczne, ale ułatwi nieruchome przytrzymanie wstrzykiwacza mocno przyłożonego do skóry.

Podczas wykonywania wstrzyknięcia słyhać było więcej niż dwa kliknięcia – dwa głośniejsze i jedno ciche. Czy wstrzyknięcie zostało prawidłowo wykonane?

Niektórzy pacjenci mogą usłyszeć ciche kliknięcie bezpośrednio przed drugim głośnym kliknięciem. Oznacza ono, że wstrzykiwacz działa prawidłowo. Nie należy odsuwać wstrzykiwacza od skóry zanim nie usłyszysz się drugiego głośniejszego kliknięcia.

Co zrobić, gdy po wstrzyknięciu na powierzchni skóry pojawia się kropla płynu lub krwi?

Jest to normalne zjawisko, które nie wpłynie na wysokość podanej dawki.

Nie mam pewności, czy wstrzykiwacz działa prawidłowo.


Należy sprawdzić, czy dawka została podana. Dawka została podana prawidłowo, gdy w komorze widoczny jest szary element (patrz punkt 3). Aby uzyskać dodatkowe instrukcje, należy zwrócić się do miejscowego oddziału firmy Lilly wymienionego w ulotce dla pacjenta. Do tego czasu wstrzykiwacz należy bezpiecznie przechować, aby uniknąć przypadkowego ukłucia igłą.

INNE INFORMACJE

- Osoby źle widzące NIE powinny używać wstrzykiwacza bez pomocy osoby przeszkolonej w zakresie korzystania ze wstrzykiwacza Trulicity.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE

- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów ze wstrzykiwaczem Trulicity należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

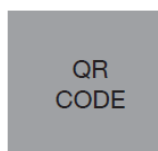

ZESKANUJ TEN KOD ABY PRZEJŚĆ DO:
www.trulicity.eu

Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2021