

## Instrukcja użycia

Trulicity 4,5 mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym dulaglutyd



← Rozłożyć i wyprostować →



Przeczytać tekst po obu stronach, aby zapoznać się z instrukcjami

### INFORMACJE NA TEMAT LEKU TRULICITY WE WSTRZYKIWACZU PÓLAUTOMATYCZNYM NAPEŁNIONYM

Przed zastosowaniem wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia oraz informację dla pacjenta w ulotce dołączonej do opakowania. Należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką zasady prawidłowego wstrzykiwania leku Trulicity.

- Wstrzykiwacz to gotowe do użycia, fabrycznie napełnione urządzenie dozujące. Każdy wstrzykiwacz zawiera jedną tygodniową dawkę leku Trulicity (4,5 mg). Każdy wstrzykiwacz podaje tylko jedną dawkę.
- **Lek Trulicity podawany jest raz w tygodniu.** Odpowiedni dzień można zaznaczyć w kalendarzu, aby pamiętać o terminie wstrzyknięcia następnej dawki.
- Po wciśnięciu zielonego przycisku do wstrzykiwania igła wstrzykiwacza automatycznie wbije się **w skórę**, lek zostanie wstrzyknięty, a **po zakończeniu wstrzykiwania** igła sama się schowa (zostanie wciągnięta).

## PRZED UŻYCIEM

### Wyjąć

z lodówki.  
Pozostawić zatyczkę podstawy na wstrzykiwaczu do czasu, kiedy pacjent będzie gotowy na wstrzyknięcie.

### Sprawdzić

etykietę, aby upewnić się że to właściwy lek i że nie upłynął termin jego ważności.

### Skontrolować


wstrzykiwacz. Nie należy stosować leku, jeśli wstrzykiwacz jest uszkodzony lub lek jest mętny, zmienił barwę albo zawiera widoczne zanieczyszczenia stałe.

### Przygotować się

myjąc ręce.

## WYBRAĆ MIEJSCE WSTRZYKNIĘCIA

- Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka mogą pomóc w wyborze najodpowiedniejszego miejsca wstrzyknięcia.
- Lek można wstrzyknąć w skórę na brzuchu lub w udo.
- Inna osoba może wstrzyknąć lek pacjentowi w górną część ramienia.
- W każdym tygodniu należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia (w sposób rotacyjny). Można wybrać tę samą okolicę ciała, jednak lek należy wstrzykiwać w różnych miejscach w obrębie tej okolicy.

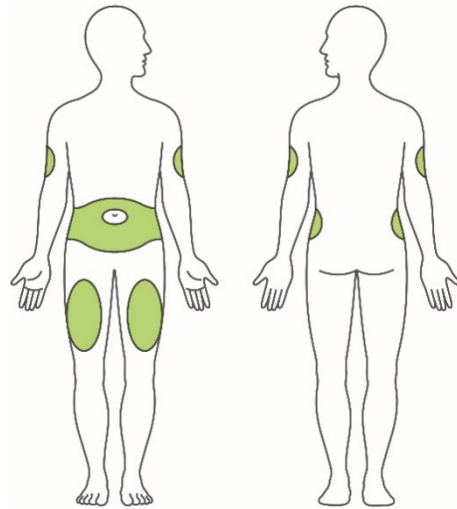


PRZEDNIA  
CZĘŚĆ CIAŁA


TYLNA  
CZĘŚĆ CIAŁA

1. ZDJĄĆ ZATYCZKĘ
2. PRZYŁOŻYĆ I ODBLOKOWAĆ
3. WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ

Część górna ▶

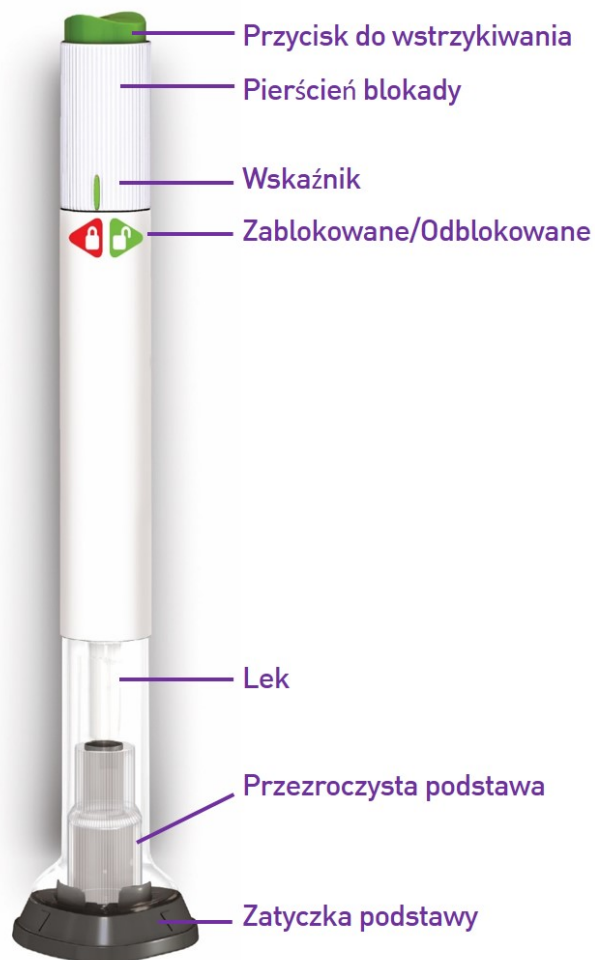


## 1 ZDJĄĆ ZATY CZKĘ

-  Upewnić się, że wstrzykiwacz jest **zablokowany**.
- Zdjąć szarą zatyczkę.

**Nie wolno ponownie zakładać zatyczki, ponieważ można w ten sposób uszkodzić igłę. Nie dotykać igły.**

- Po zdjęciu, szara zatyczka wygląda tak jak pokazano na rysunku. Można ją wyrzucić.

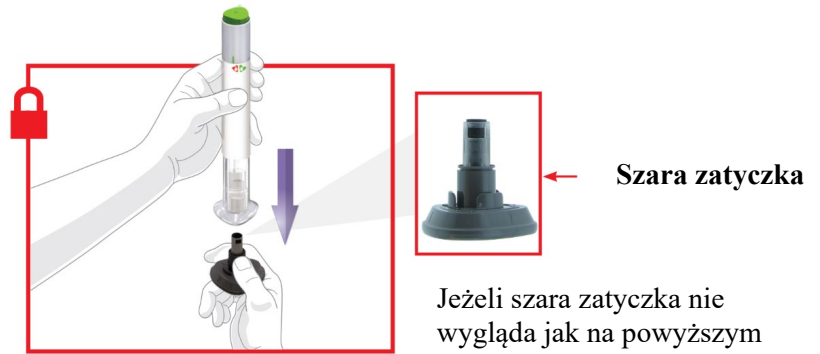


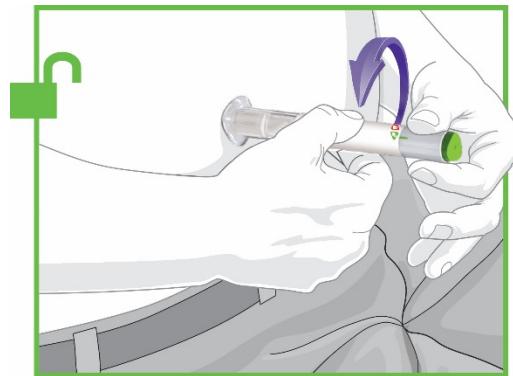
Jeżeli szara zatyczka nie wygląda jak na powyższym rysunku:

- **Nie używać** wstrzykiwacza.
- Bezpiecznie przechować wstrzykiwacz oraz zatyczkę i skontaktować się z firmą Lilly.
- Użyć nowego wstrzykiwacza.


## 2 PRZYŁOŻYĆ I ODBLOKOWAĆ


- Przyłożyć przezroczystą podstawę wstrzykiwacza płasko i mocno do skóry w miejscu wstrzyknięcia.

-  Odblokować, przekręcając pierścień blokady.



## 3 WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ

- Wcisnąć i przytrzymać zielony przycisk do wstrzykiwania; będzie można usłyszeć głośne kliknięcie.
-  Mocno przyciskać przezroczystą podstawę wstrzykiwacza do skóry, dopóki nie usłyszysz się drugiego kliknięcia. Kliknięcie będzie słychać w ciągu około 5-10 sekund, gdy igła zacznie się chować.
- Odsunąć wstrzykiwacz od skóry.

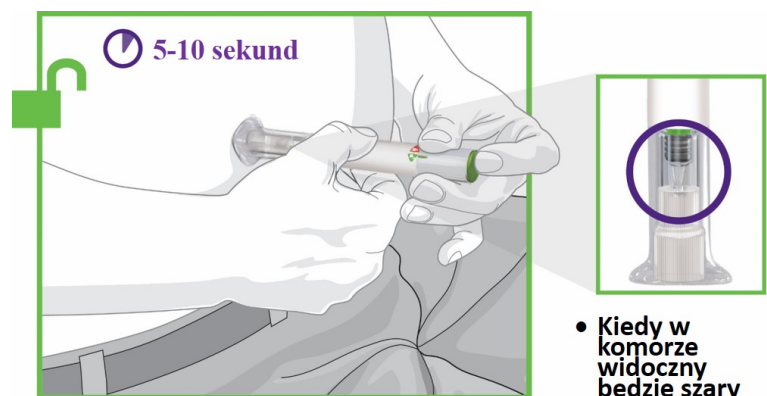

- Kiedy w komorze widoczny będzie szary element, wstrzyknięcie zostanie zakończone.

## WAŻNE INFORMACJE

Przechowywanie i sposób obchodzenia się ze wstrzykiwaczem

Utylizacja wstrzykiwacza

Często zadawane pytania

Inne informacje

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje

## PRZECHOWYWANIE I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ ZE WSTRZYKIWACZEM

- Wstrzykiwacz zawiera szklane elementy. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie używać w przypadku upuszczenia na twarde podłoże. Kolejne wstrzyknięcie wykonać używając nowego wstrzykiwacza.
- Wstrzykiwacz przechowywać w lodówce.
- W przypadku braku dostępu do lodówki, wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C), nie dłużej niż przez 14 dni.
- Nie zamrażać wstrzykiwacza. **NIE UŻYWAĆ** wstrzykiwacza, jeśli został zamrożony.
- Wstrzykiwacz przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
- Wstrzykiwacz należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy zapoznać się z pełną informacją dotyczącą prawidłowego przechowywania wstrzykiwacza podaną w Ulotce dla pacjenta.

## UTYLIZACJA WSTRZYKIWACZA

- Wstrzykiwacz należy wyrzucić do pojemnika na ostre przedmioty lub usunąć w sposób zalecony przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.
- Wypełnionych pojemników na ostre przedmioty nie można ponownie wykorzystywać.
- Należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę co zrobić z lekami, których się już nie używa.



## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

### Co zrobić w przypadku zauważenia pęcherzyków powietrza we wstrzykiwaczu?

Obecność pęcherzyków powietrza jest zjawiskiem normalnym i nie zaszkodzi pacjentowi ani nie wpłynie na wysokość dawki.

### Co zrobić w przypadku odblokowania wstrzykiwacza i wciśnięcia zielonego przycisku do wstrzykiwania przed zdjęciem zatyczki?

Nie zdejmować zatyczki i nie używać wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz należy usunąć w sposób zalecony przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Wstrzyknąć lek używając innego wstrzykiwacza.

### **Co zrobić w przypadku zauważenia kropli płynu na końcówce igły po zdjęciu zatyczki?**

Obecność kropli płynu na końcówce igły jest zjawiskiem normalnym i nie wpłynie na wysokość podanej dawki.

### **Czy konieczne jest przytrzymywanie wciśniętego zielonego przycisku do wstrzykiwania, dopóki wstrzyknięcie nie zostanie zakończone?**

To nie jest konieczne, ale ułatwi nieruchome przytrzymanie wstrzykiwacza mocno przyłożonego do skóry.

### **Podczas wykonywania wstrzyknięcia słyhać było więcej niż dwa kliknięcia – dwa głośniejsze i jedno ciche. Czy wstrzyknięcie zostało prawidłowo wykonane?**

Niektórzy pacjenci mogą usłyszeć ciche kliknięcie bezpośrednio przed drugim głośnym kliknięciem. Oznacza ono, że wstrzykiwacz działa prawidłowo. Nie należy odsuwać wstrzykiwacza od skóry zanim nie usłyszysz się drugiego głośniejszego kliknięcia.

### **Co zrobić, gdy po wstrzyknięciu na powierzchni skóry pojawia się kropla płynu lub krwi?**

Jest to normalne zjawisko, które nie wpłynie na wysokość podanej dawki.

### **Nie mam pewności, czy wstrzykiwacz działa prawidłowo.**


Należy sprawdzić, czy dawka została podana. Dawka została podana prawidłowo, gdy w komorze widoczny jest szary element (patrz punkt 3). Aby uzyskać dodatkowe instrukcje, należy zwrócić się do miejscowego oddziału firmy Lilly wymienionego w ulotce dla pacjenta. Do tego czasu wstrzykiwacz należy bezpiecznie przechować, aby uniknąć przypadkowego ukłucia igłą.

## **INNE INFORMACJE**

- Osoby źle widzące NIE powinny używać wstrzykiwacza bez pomocy osoby przeszkolonej w zakresie korzystania ze wstrzykiwacza Trulicity.

## **GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE**

- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów ze wstrzykiwaczem Trulicity należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

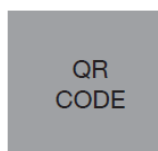

**ZESKANUJ TEN KOD ABY PRZEJŚĆ DO:**  
[www.trulicity.eu](http://www.trulicity.eu)

**Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2021**