

Często zadawane pytania

Pyt.: Co się stanie, jeśli przed wstrzyknięciem zostawię wstrzykiwacze na dłużej niż 30 minut w temperaturze pokojowej?

Odp.: Wstrzykiwacz może pozostawać w temperaturze pokojowej do 30°C przez okres do 2 tygodni.

Pyt.: Co zrobić w przypadku zauważenia pęcherzyków powietrza we wstrzykiwaczu?

Odp.: Pęcherzyki powietrza we wstrzykiwaczu są normalnym zjawiskiem. Nie zaszkodzą pacjentowi ani nie wpłyną na wielkość dawki.

Pyt.: Co zrobić w przypadku zauważenia kropli płynu na końcówce igły po wyjęciu szarej zatyczki podstawy?

Odp.: Obecność kropli płynu na końcówce igły jest zjawiskiem normalnym. Nie zaszkodzi pacjentowi ani nie wpłynie na wielkość dawki.

Pyt.: Co zrobić w przypadku odblokowania wstrzykiwacza i wciśnięcia niebieskiego przycisku do wstrzykiwania, aż do zakończenia wstrzyknięcia?

Odp.: Nie należy wyjmować szarej zatyczki podstawy. Nie używać wstrzykiwacza. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, aby uzyskać nową strzykawkę.

Pyt.: Czy konieczne jest przytrzymywanie wciśniętego niebieskiego przycisku do wstrzykiwania, dopóki wstrzyknięcie nie zostanie zakończone?

Odp.: Przytrzymywanie wciśniętego niebieskiego przycisku do wstrzykiwania nie jest konieczne, ale ułatwi nieruchome przytrzymanie wstrzykiwacza mocno przyłożonego do skóry.

Pyt.: Co zrobić, gdy igła nie schowa się po wstrzyknięciu?

Odp.: Nie dotykać igły ani nie zakładać szarej zatyczki na podstawę. Przechowywać wstrzykiwacz w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego zakłucia igłą i skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Pyt.: Co zrobić, gdy po wstrzyknięciu na powierzchni skóry pojawia się kropla płynu lub krwi?

Odp.: Jest to normalne zjawisko. Należy ucisnąć miejsce wstrzyknięcia wacikiem lub gazikiem. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia.

Pyt.: Co należy zrobić, gdy podczas wykonywania wstrzyknięcia słychać więcej niż 2 kliknięcia – 2 głośne i jedno ciche? Czy wstrzyknięcie zostało w pełni wykonane?

Odp.: Niektórzy pacjenci mogą usłyszeć ciche kliknięcie bezpośrednio przed drugim głośnym kliknięciem. Takie jest prawidłowe działanie wstrzykiwacza. Nie należy odsuwać wstrzykiwacza od skóry zanim nie usłyszysz się drugiego głośnego kliknięcia.

Pyt.: Skąd mam wiedzieć, czy wstrzyknięcie zostało zakończone?

Odp.: Po wciśnięciu niebieskiego przycisku do wstrzykiwania będzie można usłyszeć 2 głośne kliknięcia. Drugie głośne kliknięcie oznacza, że wstrzyknięcie zostało zakończone. Szary tłok będzie widoczny w górnej części przezroczystej podstawy.

Należy zapoznać się z pełną treścią ulotki dołączonej do opakowania leku Omvoh zawierającej dodatkowe informacje o tym leku.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2023



Odwrócić, aby przeczytać INSTRUKCJĘ UŻYCIA



Przed wstrzyknięciem leku Omvoh należy przeczytać poniższe informacje. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi punktami instrukcji.


- **W celu podania pełnej dawki leku Omvoh konieczne jest wykonanie 2 wstrzyknięć.**
- Wstrzyknąć zawartość 1 wstrzykiwacza z lekiem Omvoh, a następnie natychmiast – zawartość drugiego wstrzykiwacza.

Należy również pamiętać, że:

- Lekarz powinien zademonstrować, jak należy przygotować i wstrzykiwać lek Omvoh przy użyciu wstrzykiwacza. **Nie należy** wykonywać wstrzyknięć sobie ani innym osobom, dopóki nie zostanie zademonstrowany sposób wstrzykiwania leku Omvoh.
- Każdy wstrzykiwacz z lekiem Omvoh jest przeznaczony **wyłącznie do jednorazowego użycia**. Wstrzykiwacza **nie należy** ponownie używać ani udostępniać innym osobom, ze względu na możliwość przeniesienia zakażenia na tę osobę lub od nich.
- Lekarz może pomóc w wyborze miejsca wstrzyknięcia leku. Można także przeczytać część tej instrukcji zatytułowaną „**Wybrać miejsce wstrzyknięcia**”, aby ułatwić sobie wybór najodpowiedniejszej okolicy ciała.
- Osoby mające problemy ze wzrokiem lub słuchem **nie powinny** używać wstrzykiwacza z lekiem Omvoh bez pomocy opiekuna.
- Należy zachować tę Instrukcję użycia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Przed użyciem wstrzykiwaczy z lekiem Omvoh należy uważnie przeczytać wszystkie punkty instrukcji.

Części wstrzykiwacza z lekiem Omvoh

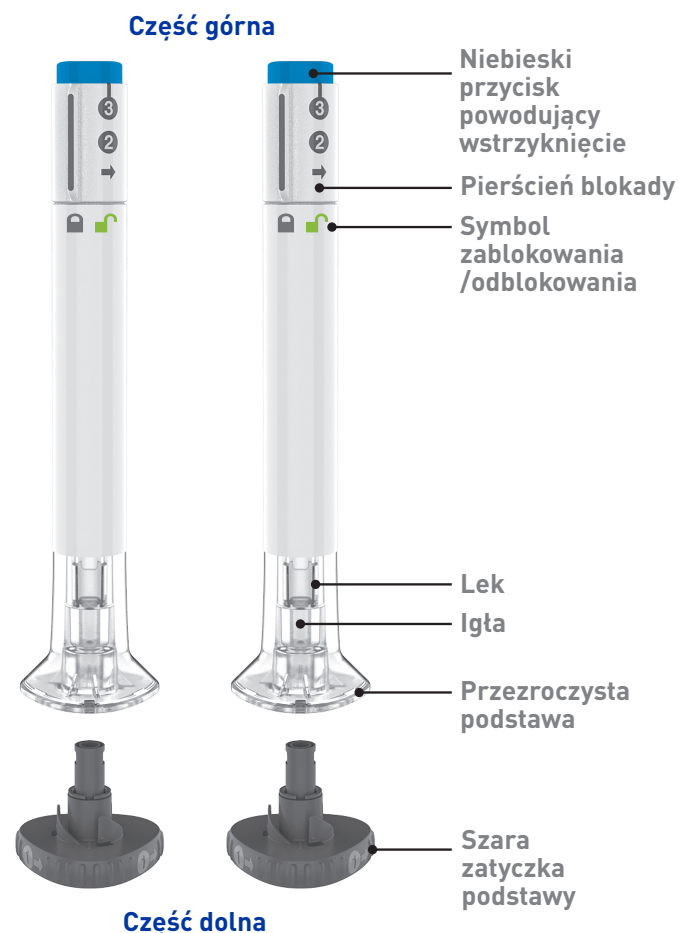

100 mg/ml + 100 mg/ml = 1 pełna dawka

WAŻNE:


- W celu podania pełnej dawki konieczne jest wykonanie 2 wstrzyknięć.
- Wstrzyknąć zawartość 1 wstrzykiwacza, a następnie natychmiast – zawartość drugiego wstrzykiwacza.

Przygotowanie do podania leku Omvoh we wstrzyknięciu


Wyjąć wstrzykiwacze z lodówki

Zebrać potrzebne materiały

Sprawdzić wstrzykiwacze i lek

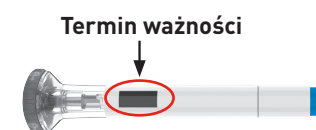

Przygotować się do wstrzyknięcia Wybrać miejsce wstrzyknięcia

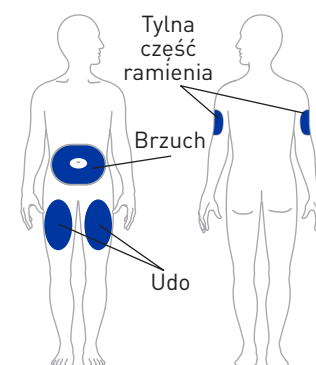

Wyjąć 2 wstrzykiwacze z lekiem Omvoh z lodówki. **Nie wyjmować szarej zatyczki z podstawy, dopóki pacjent nie będzie gotowy na wstrzyknięcie.** Przed wykonaniem wstrzyknięcia pozostawić wstrzykiwacze w temperaturze pokojowej na 30 minut. **Nie** ogrzewać wstrzykiwaczy w kuchenke mikrofalowej lub pod strumieniem gorącej wody ani nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Nie** używać wstrzykiwaczy, jeśli lek został zamrożony. **Nie** wstrząsać.

Materiały:

- 2 waciki nasączone alkoholem
- 2 waciki lub gaziki
- 1 pojemnik na ostre odpady medyczne (patrz „Utylizacja wstrzykiwaczy z lekiem Omvoh”)

Należy upewnić się, że jest to właściwy lek. Lek wewnątrz strzykawki powinien być przejrzysty. Może być bezbarwny lub jasnożółty.

Wstrzykiwacza **nie wolno** używać i należy pozbyć się go w sposób zalecony przez fachowy personel medyczny, jeśli:

- wygląda na uszkodzony
- lek jest mętny, zmienił barwę lub wewnątrz widoczne są cząstki stałe
- upłynął termin ważności podany na etykiecie
- lek został zamrożony

Przed wstrzyknięciem leku Omvoh należy umyć ręce wodą z mydłem.

Przedstawiciel fachowego personelu medycznego pomoże pacjentowi wybrać najlepsze miejsce wstrzyknięcia.

- Pacjent lub inna osoba** może wstrzyknąć lek w okolicę brzucha. **Nie należy** wykonywać wstrzyknięć w promieniu 5 cm od pępka.
- Pacjent lub inna osoba** może wstrzyknąć lek w przednią część uda. Obszar ten powinien znajdować się co najmniej 5 cm nad kolanem i 5 cm poniżej pachwiny.
- Inna osoba** może wykonać wstrzyknięcie w tylną część ramienia pacjenta.
- Nie należy** wykonywać wstrzyknięć za każdym razem w tym samym miejscu. Na przykład, jeśli pierwsze wstrzyknięcie wykonano w okolicy brzucha, drugie – konieczne do podania pełnej dawki – można wykonać w innym miejscu brzucha.
- Nie należy** wykonywać wstrzyknięć w miejscach, w których skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona lub stwardniała.

Miejsce wstrzyknięcia oczyścić wacikiem nasączonym alkoholem. Przed wstrzyknięciem leku należy poczekać, aż skóra w miejscu wstrzyknięcia wyschnie.

Wstrzykiwanie leku Omvoh

1 Zdjąć zatyczkę z wstrzykiwacza.


Upewnić się, że wstrzykiwacz jest zablokowany.

- Nie wyjmować szarej zatyczki z podstawy, dopóki pacjent nie będzie gotowy na wstrzyknięcie.
- Odkręcić szarą zatyczkę z podstawy i wyrzucić ją do domowego pojemnika na odpadki.
- Nie wolno** ponownie zakładać szarej zatyczki podstawy, ponieważ można w ten sposób uszkodzić igłę.
- Nie** dotykać igły.




2 Przyłożyć i odblokować

- Przyłożyć przezroczystą podstawę wstrzykiwacza płasko i mocno do skóry i przytrzymać ją.
- Przytrzymując podstawę przy skórze przekręcić pierścień blokady do pozycji **odblokowanej**.

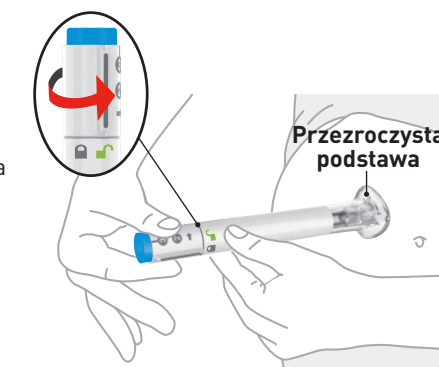

3 Wcisnąć i przytrzymać przez maksymalnie 10 sekund

- Wcisnąć i przytrzymać niebieski przycisk do wstrzykiwania. Będzie można usłyszeć głośne kliknięcie (wstrzyknięcie rozpoczęte).
- Przytrzymywać przezroczystą podstawę wstrzykiwacza mocno przy skórze.** Drugie głośne kliknięcie będzie słychać około 10 sekund po pierwszym (wstrzyknięcie zakończone).

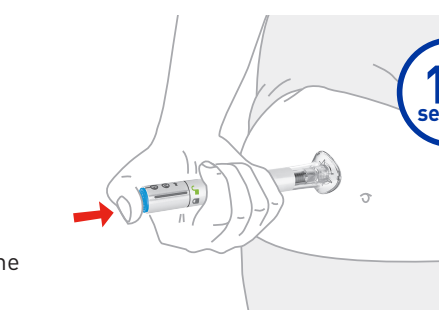

- Wstrzyknięcie zostanie zakończone, kiedy w komorze widoczny będzie szary tłok.
- Odsunąć wstrzykiwacz od skóry.
- W przypadku krwawienia należy ucisnąć miejsce wstrzyknięcia wacikiem lub gazikiem.
- Nie** pocierać miejsca wstrzyknięcia.



Utylizacja wstrzykiwaczy z lekiem Omvoh

Wyrzucić zużyte wstrzykiwacze

- Zużyty wstrzykiwacz należy umieścić w pojemniku na ostre odpady medyczne natychmiast po użyciu. Nie wyrzucać wstrzykiwacza bezpośrednio do domowych pojemników na odpadki.
- Jeśli pacjent nie posiada pojemnika na ostre odpady medyczne, można użyć pojemnika domowego, który:
 - jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
 - może zostać zamknięty szczelnie przylegającą, odporną na przebicie pokrywą, uniemożliwiającą wydostanie się ostrych przedmiotów,
 - stoi pionowo i stabilnie podczas użytkowania,
 - nie przecieka,
 - jest odpowiednio oznakowany, aby ostrzegać o niebezpiecznych odpadach wewnątrz pojemnika.

- Gdy pojemnik na ostre odpady medyczne jest prawie pełny, należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwego sposobu utylizacji pojemnika na ostre odpady medyczne. Mogą obowiązywać lokalne przepisy dotyczące sposobu wyrzucania igieł i strzykawek.

- Napelnionego pojemnika na ostre odpady nie można ponownie wykorzystywać.

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat prawidłowej utylizacji pojemnika należy zapytać przedstawiciela fachowego personelu medycznego o opcje dostępne w danym regionie.



Pociągnąć aby otworzyć

W celu podania pełnej dawki konieczne jest wykonanie 2 wstrzyknięć. Wstrzyknąć zawartość jednego wstrzykiwacza, a następnie natychmiast – zawartość drugiego wstrzykiwacza.

Otworzyć, aby przeczytać INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Odwrócić w celu uzyskania dodatkowych informacji