

I miei
piani
personalizzati
finiti al momento.

Ottieni piani ClinCheck® iniziali



**il 56% più
velocemente***
grazie alla nuova ClinCheck® Signature.

- Riduci al minimo le comunicazioni con i tecnici CAD
- Ottimizza coerenza e controllo
- Ottieni più tempo per ciò che conta di più

Guida rapida a ClinCheck® Signature


Una raccolta delle ultime innovazioni apportate di recente per la pianificazione del trattamento che ti aiutano a creare con fiducia e in poco tempo piani di trattamento coerenti e personalizzati, dandoti più tempo da dedicare a ciò che per te è più importante.

Suite di innovazioni per la pianificazione del trattamento

- Modulo di invio Flex Rx
- Software di pianificazione del trattamento ClinCheck® Pro
- Plan Editor
- Controlli 3D
- ClinCheck® Live Update

* -In base agli ordini di trattamenti Invisalign Comprehensive originari effettuati da medici che hanno attivato il template delle preferenze per la pianificazione del trattamento. Sono stati analizzati in totale 487.926 ordini. Il confronto è tra gli ordini inviati utilizzando un template delle preferenze per la pianificazione del trattamento e gli ordini inviati senza template. Il tempo viene calcolato dal momento in cui viene ricevuto l'ordine fino a quando il piano ClinCheck è disponibile per la revisione da parte del medico. Il tempo impiegato per gli ordini inviati utilizzando un template delle preferenze di pianificazione del trattamento è inferiore del 56%. È stato utilizzato il valore medio. Gli ordini riguardavano il periodo compreso tra aprile 2022 e maggio 2023. Hanno partecipato Invisalign Provider (ortodontisti e odontoiatri) delle aree NA, LATAM, EMEA e APAC. Dati archiviati presso Align Technology, Inc.

Gerarchia di pianificazione del trattamento ClinCheck®

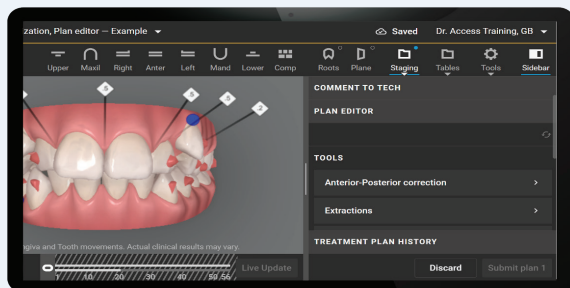

Controlli 3D
con ClinCheck® Live Update

Plan Editor
con ClinCheck® Live Update

Può essere personalizzato
con le preferenze cliniche
specifiche per il caso

Modulo di invio Flex Rx

Può essere
personalizzato con
Template Editor

Template delle preferenze cliniche globali

Invio del caso *con il* modulo Flex Rx

04 Select treatment option

Patient list / Patient file /

Patient type: Adult Product type: Invisalign clear aligners Treatment options

Select treatment option

Comprehensive Package	Moderate Package	Lite Package
Unlimited stages Selectable additional aligner options Flex Rx is supported	Up to 20 stages 2 set(s) of additional aligners included	Up to 14 stages 2 set(s) of additional aligners included
dual arch 5 year(s), unlimited additional aligners included 3 year(s), 3 set(s) of additional aligners included £1810 £1710	dual arch single arch	
Select		

"Flex Rx è supportato"
apparirà nelle opzioni di
trattamento supportate
con il modulo Flex Rx.

05 Complete Flex Rx

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx
Some cases may require submission with the Traditional Rx. [Switch to Traditional Rx](#)

Preferences Global Clinical Preferen... View Edit for all cases

Case specific clinical preferences (optional) No case specific clinical preferences added

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth
Tooth movement restrictions: none
Attachments restrictions: none
Extractions: none
Missing teeth: none

Eruption compensation
Eruption compensation: none
Molar tab: none

Uploaded Records None

Private Notes 0/10000
Write private notes here (only visible to you).
Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software

Modulo Flex Rx: preferenze specifiche del caso

- Personalizza in base alle esigenze specifiche del paziente
- Gestisci le eccezioni al tuo template delle preferenze
- Gestisci i denti mancanti
- Programma l'IPR
- Gestisci l'affollamento

invisalign

Patients Account Store Education Support Marketing Site

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx
Some cases may require submission with the Traditional Rx. [Switch to Traditional Rx](#)

Preferences test View

Case specific clinical preferences (optional) IPR x

IPR

Follow chosen preferences template
[Click here to view your predefined clinical preferences for "IPR"](#)

Select segments where IPR is allowed

Right Left

Limit anterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

Limit posterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

IPR timing (roundtripping)
☐ Perform alignment after IPR
☒ Perform alignment before IPR
☐ Delay IPR

Schedule IPR
☒ Based on access to contacts
☐ Every (certain number) stages
☐ At specific stages

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth



Template delle preferenze cliniche globali (Global Template)

Questo template contiene le preferenze predefinite di Align, che verranno applicate al caso se non definisci preferenze cliniche specifiche.



- Il template delle preferenze cliniche globali è stato creato sulla base dei risultati di anni di esperienza nella preparazione di **milioni di piani di trattamento ClinCheck®** per i pazienti Invisalign.
- Le preferenze cliniche definite nel template delle preferenze cliniche globali seguono un **approccio che tiene conto di molteplici fattori**, quali **analisi dei dati, protocolli standard, feedback dei clienti (inclusi i docenti) e il contributo dei team interni di Align di tutto il mondo.**
- Per modificare queste preferenze, utilizza il Template Editor.


Pagina delle preferenze cliniche

La pagina delle preferenze cliniche è costituita da tre opzioni:

- **Template Flex Rx**
- **Tradizionale**
- **Impostazioni generali**

come usare il Template Editor



- Tutte le opzioni nel Template Editor sono precompilate sulla base delle preferenze nel template delle preferenze cliniche globali
- Al primo avvio, tutte le opzioni vengono impostate **utilizzando le preferenze cliniche tradizionali correnti sull'IDS e combinate con le preferenze predefinite di Align** nel template delle preferenze cliniche globali
- Queste preferenze possono essere modificate in qualsiasi momento e verranno applicate istantaneamente nel template delle preferenze cliniche globali
- Il template delle preferenze cliniche globali aggiornato verrà utilizzato in tutti i casi inviati con il modulo Flex Rx. Non riguarda i casi già inviati con il modulo Flex Rx

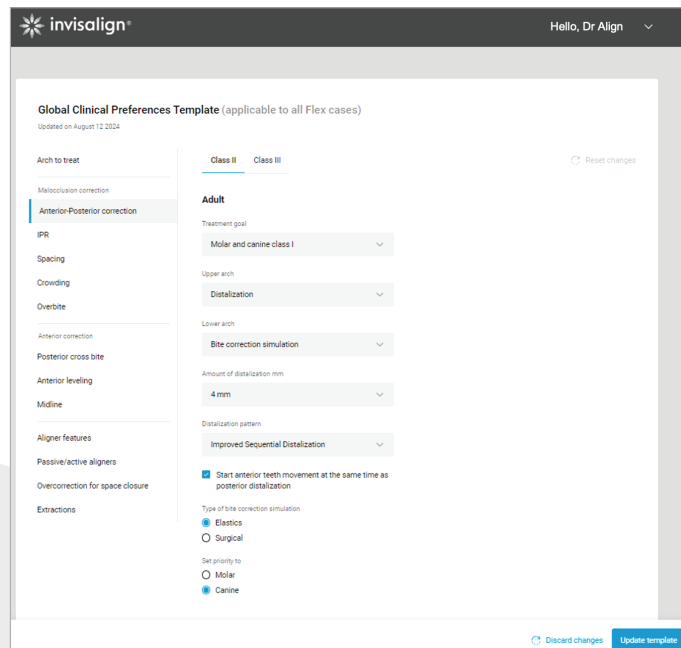

Plan Editor

Nuove opzioni per:

- Personalizzare il piano in base alle esigenze specifiche del paziente
- Gestire le eccezioni all'IPP
- Programmare l'IPR
- Modificare l'approccio o l'obiettivo AP
- Gestire la spaziatura
- Simulare le estrazioni
- E molte altre ancora

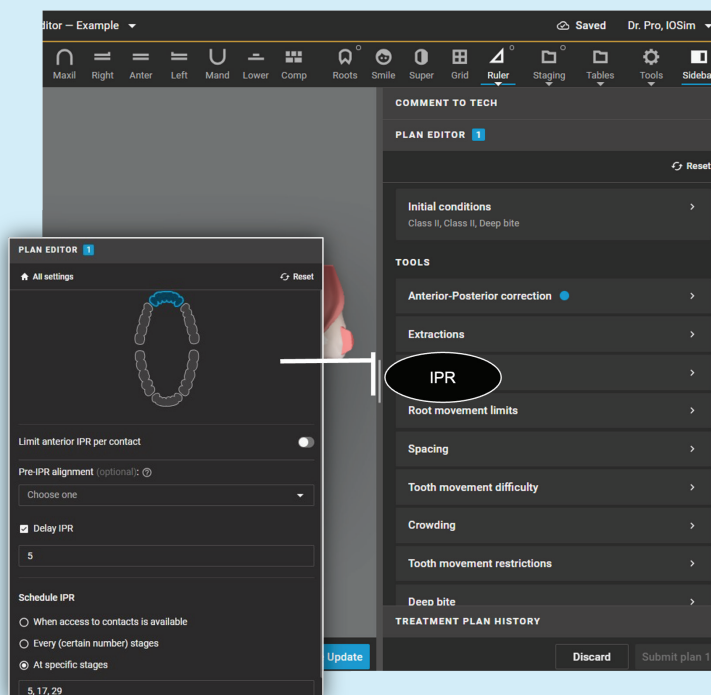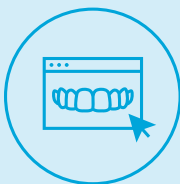

Una suite di strumenti di pianificazione del trattamento Invisalign® basata su oltre 25 anni di innovazione e 20 milioni di sorrisi.

Piani coerenti e affidabili.

- ✓ Piano Personalizzato Invisalign®
 - Inizio rapido con il Global Template.
 - Personalizza il tuo piano come desideri.

I piani vengono reinviati al tecnico CAD in meno della metà del tempo¹

Personalizzazione quando ne hai bisogno.

- ✓ Preferenze specifiche del caso nel modulo Flex Rx
- ✓ Software di visualizzazione ClinCheck® Pro
- ✓ Plan Editor
- ✓ Controlli 3D

I medici hanno approvato i casi l'82% più velocemente²

1. In base agli ordini di trattamenti Invisalign Comprehensive primari effettuati da medici che hanno utilizzato il Piano Personalizzato Invisalign® in almeno il 50% degli ordini Comprehensive. Sono stati analizzati in totale 10.992 ordini. Il numero di modifiche corrisponde a quante volte il piano di trattamento è stato inviato al tecnico CAD prima dell'approvazione. Il confronto è tra tutti gli ordini con e senza il Piano Personalizzato Invisalign® e ClinCheck Live Update. Il numero di modifiche nel caso degli ordini con il Piano Personalizzato Invisalign® e ClinCheck Live Update è inferiore del 57%. Gli ordini sono stati approvati nel periodo compreso tra novembre 2022 e aprile 2023.

2. In base agli ordini di trattamenti Invisalign Comprehensive originari (n = 50.114 casi) effettuati da medici (n = 165 ortodontisti e odontoiatri) che hanno preso parte al lancio limitato sul mercato e che hanno utilizzato solo ClinCheck Live Update per i controlli 3D rispetto a coloro che hanno utilizzato solo la sezione commenti per i tecnici CAD per le modifiche ai piani di trattamento ClinCheck nel periodo dal 1° giugno 2021 al 23 dicembre 2021. Il tempo viene calcolato dal momento in cui il medico apre il piano ClinCheck per la prima volta fino all'approvazione finale del piano ClinCheck.

 Scopri di più alla pagina learn.aligntech.com



Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway, San Jose, CA USA 95134



Align Technology B.V., Herikerbergweg 312,
1101CT, Amsterdam, The Netherlands



0344