

Mis
planes
personalizados,
finalizados al
momento.

Consiga planes de tratamiento
ClinCheck® iniciales



**un 56 %
más rápido***

con la nueva característica
ClinCheck® Signature.

- Minimice la comunicación con los CAD designers
- Maximice la coherencia y el control
- Dedique más tiempo a lo que realmente importa

Guía de inicio rápido para ClinCheck® Signature


Una recopilación de nuestras últimas innovaciones en la planificación de tratamientos que le ayuda a elaborar planes de tratamiento personalizados de manera coherente más rápido que nunca, permitiéndole pasar tiempo haciendo lo que realmente importa.

Conjunto de innovaciones para la planificación de tratamientos

- Formulario de Prescripción Flex
- Software de planificación de tratamientos ClinCheck® Pro
- Plan Editor
- Controles 3D
- Herramienta ClinCheck® Live Update

*Según los pedidos primarios de tratamientos del sistema Invisalign Comprehensive solicitados por doctores que se activaron con una plantilla de preferencias para la planificación de tratamientos. Se analizó un total de 487.926 tratamientos. Comparación efectuada entre pedidos enviados utilizando una plantilla de preferencias de planificación de tratamientos y pedidos enviados sin ella. El tiempo se mide desde que se recibe un tratamiento hasta que el plan de tratamiento ClinCheck está disponible para que lo revise el doctor. El tiempo necesario para enviar los pedidos utilizando una plantilla de preferencias de planificación de tratamiento es un 56 % menor. Se utilizó el valor de la mediana. Los pedidos se efectuaron entre abril de 2022 y mayo de 2023. Incluye ortodoncistas y odontólogos certificados en el sistema Invisalign en las regiones de NA (Norteamérica), LATAM (Latinoamérica), EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) y APAC (Asia-Pacífico). Datos de archivo en Align Technology, Inc.

Jerarquía de planificación del tratamiento ClinCheck®

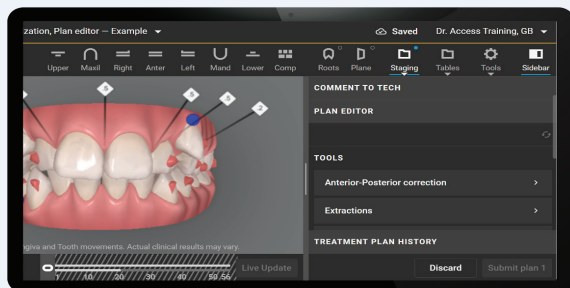

Controles 3D

con la herramienta
ClinCheck® Live Update

Plan Editor

con la herramienta ClinCheck® Live Update

Formulario de Prescripción Flex

Se puede personalizar con
las Preferencias clínicas
específicas de cada caso

Plantilla de Preferencias Clínicas Globales

Se puede
personalizar con el
Editor de plantillas

Envío de casos *con* el Formulario de Prescripción Flex

04 Select treatment option

Patient type: Adult, Product type: Invisalign clear aligners

Select treatment option

Comprehensive Package	Moderate Package	Lite Package
Unlimited stages	Up to 20 stages	Up to 14 stages
Selectable additional aligner options	2 set(s) of additional aligners included	2 set(s) of additional aligners included
Flex Rx is supported		
dual arch 5 year(s), unlimited additional aligners included 3 year(s), 3 set(s) of additional aligners included £1810 £1710	dual arch single arch	
Select		

La opción «Admite el Formulario de Prescripción Flex» aparece en las opciones de tratamiento admitidas con el Formulario de Prescripción Flex.

05 Complete Flex Rx

Welcome to Flex Rx

Global Clinical Preferen... View Edit for all cases

Case specific clinical preferences (optional) No case specific clinical preferences added

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth
Tooth movement restrictions: none
Attachments restrictions: none
Extractions: none
Missing teeth: none

Eruption compensation
Eruption compensation: none
Molar tab: none

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. Switch to Traditional Rx

Uploaded Records
None

Private Notes
0/10000
Write private notes here (only visible to you).
Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software

Formulario de Prescripción Flex: opciones de preferencias específicas del caso

- Hacer personalizaciones según las necesidades específicas del paciente
- Gestionar las excepciones de su plantilla de preferencias
- Gestionar dientes ausentes
- Programar el IPR
- Gestionar el apiñamiento

invisalign®

Welcome to Flex Rx

test View

Case specific clinical preferences (optional) IPR x

Follow chosen preferences template
Click here to view your predefined clinical preferences for IPR

Select segments where IPR is allowed
Right Left

Limit anterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

Limit posterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

IPR timing (roundtrips)
Perform alignment after IPR
Perform alignment before IPR
Delay IPR

Schedule IPR
Based on access to contacts
Every (certain number) stages
At specific stages

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. Switch to Traditional Rx

Uploaded Records
None

Private Notes
0/10000
Write private notes here (only visible to you).
Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software



Plantilla de Preferencias Clínicas Globales (Plantilla global)

Si no tuviera ninguna preferencia clínica definida, con esta plantilla podrá aplicar a sus casos las preferencias predeterminadas de Align.



- La plantilla de Preferencias Clínicas Globales se creó con base en los resultados de tratamientos obtenidos durante años en la preparación exitosa de **millones de planes de tratamiento ClinCheck®** para pacientes Invisalign.
- Las Preferencias clínicas de la plantilla de Preferencias Clínicas Globales se configuran mediante un **enfoque multifacético que abarca** una combinación de factores, incluido el **análisis de datos, protocolos establecidos, feedback de los doctores (incluido del profesorado universitario) y aportes de los equipos internos de Align de todo el mundo.**
- La modificación de estas preferencias se puede hacer a través del Editor de plantillas.


Página de Preferencias clínicas

La página de Preferencias clínicas consta de tres opciones:

- **Plantilla del Formulario de Prescripción Flex**
- **Tradicional**
- **Ajustes generales**

Cómo utilizar el Editor de plantillas



- Todas las opciones del editor de plantillas siempre se rellenan previamente según las preferencias indicadas en la plantilla de Preferencias Clínicas Globales
- Después de abrirlo por primera vez, todas las opciones se configurarán **utilizando sus Preferencias clínicas tradicionales actuales de Invisalign Doctor Site (IDS)** y se combinarán con las preferencias **predeterminadas de Align** en la plantilla de Preferencias Clínicas Globales
- Estas preferencias se pueden modificar en cualquier momento y se reflejarán en la plantilla de Preferencias Clínicas Globales de forma instantánea
- La plantilla de Preferencias Clínicas Globales actualizada se utilizará en todos los casos enviados con el Formulario de Prescripción Flex. No afecta a los casos ya enviados con el Formulario de Prescripción Flex

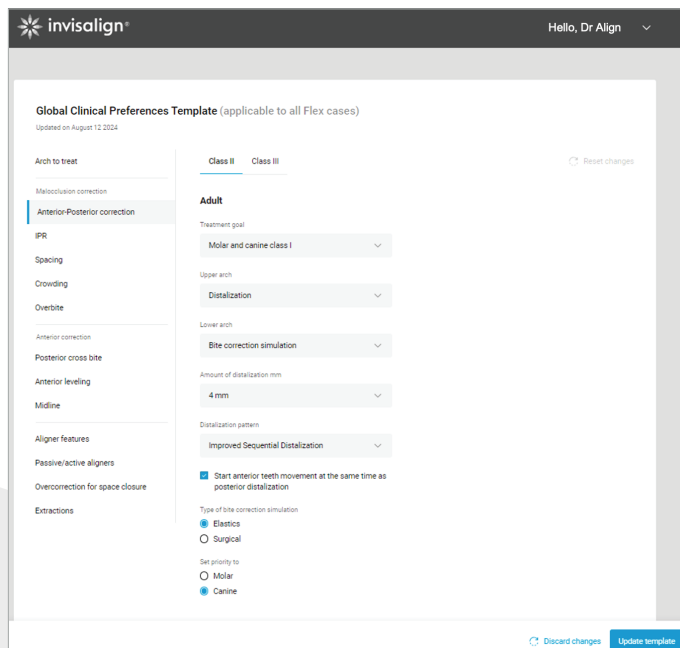

Plan Editor

Nuevas formas de:

- Hacer personalizaciones según las necesidades específicas del paciente.
- Gestionar las excepciones del Plan Personalizado Invisalign
- Programar el IPR
- Ajustar el enfoque o el objetivo anteroposterior
- Gestionar espaciados
- Simular extracciones
- Y más

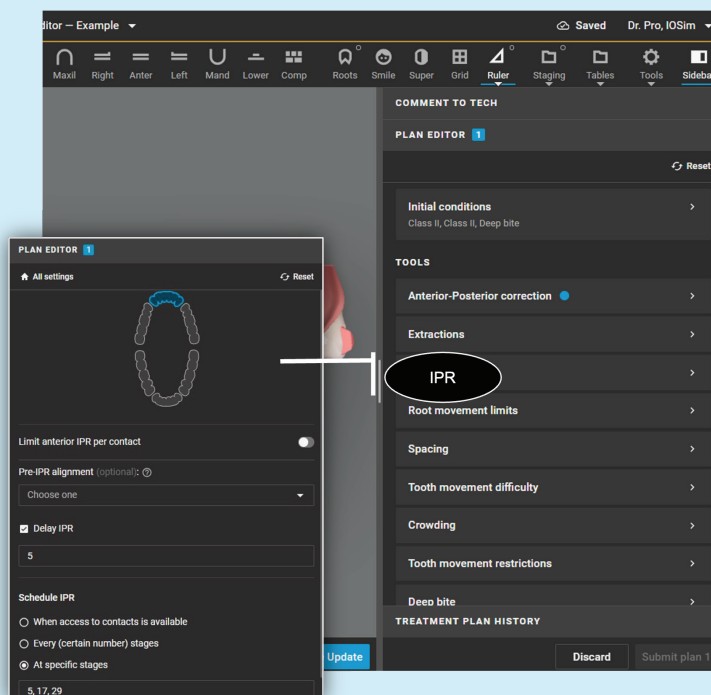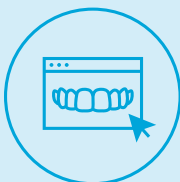

Un conjunto de herramientas para planificar los tratamientos Invisalign® basadas en más de 25 años de innovación y 20 millones de sonrisas.

Planes coherentes en los que puede confiar.

- ✓ Plan Personalizado Invisalign®
 - Inicio rápido con la plantilla de Preferencias Clínicas Globales.
 - Personalice sus planes como desee.

Los planes se envían de vuelta al CAD designer en menos de la mitad de tiempo¹

Personalícelas cada vez que lo necesite.

- ✓ Preferencias específicas del caso en la Prescripción Flex
- ✓ Software de visualización ClinCheck® Pro
- ✓ Plan Editor
- ✓ Controles 3D

Los doctores aprobaron sus casos un 82 % más rápido²

1. A partir de un estudio llevado a cabo con doctores que hubieran aplicado el Plan Personalizado Invisalign® a un mínimo del 50 % de sus tratamientos primarios de la opción Invisalign Comprehensive. Se analizó un total de 10.992 tratamientos. Las modificaciones se contabilizan como el número de veces que se devuelve un plan de tratamiento a un CAD designer hasta que se aprueba. Se comparó el volumen total de pedidos que utilizaron tanto el Plan Personalizado Invisalign® como la herramienta ClinCheck Live Update con el volumen total de pedidos que no los usó. La tasa de modificación es un 57 % menor para el volumen total de pedidos que utilizó el Plan Personalizado Invisalign® y la herramienta ClinCheck Live Update. Los pedidos se aprobaron entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

2. Según un estudio que se llevó a cabo con n = 165 doctores (ortodoncistas y odontólogos) que participaron en un lanzamiento de mercado limitado entre el 1 de junio de 2021 y el 23 de diciembre de 2021; el estudio recabó datos de los tratamientos primarios que se habían efectuado de tratamientos Invisalign Comprehensive (n = 50.114 tratamientos) y comparó los resultados cosechados por doctores que solo habían usado la herramienta ClinCheck Live Update para Controles 3D con aquellos que solo habían recurrido a CAD designers a la hora de modificar los planes de tratamiento ClinCheck. El tiempo se calcula desde el momento en que el doctor abre el plan ClinCheck por primera vez hasta el momento en el que se aprueba el plan de tratamiento ClinCheck final.

 Más información en learn.aligntech.com



Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway, San Jose, CA USA 95134



Align Technology B.V., Herikerbergweg 312,
1101CT, Amsterdam, The Netherlands



0344

align™

© 2025 Align Technology, Inc. Align, Invisalign, la marca con forma de flor y ClinCheck son marcas comerciales de Align Technology, Inc. 000407-ES-ES-A



invisalign®

Transforming smiles, changing lives.