




Dispositivo per iniezione da utilizzare con cartucce di
Humatrope® (somatropina)

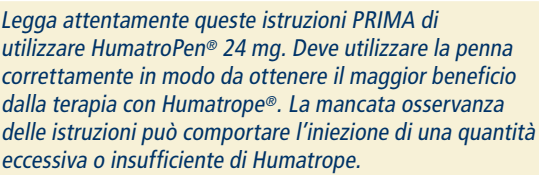

Queste istruzioni non sostituiscono il colloquio con il medico sulla condizione medica o il trattamento. Se ha dubbi o problemi con l'utilizzo di HumatroPen 24 mg, contatti il medico, il farmacista o il personale infermieristico o contatti l'affiliata Lilly locale (vedere in ultima pagina per i dettagli).

- **NON UTILIZZILI** la penna se qualsiasi parte di essa o della cartuccia risulta rotta o danneggiata. Contatti il medico o il farmacista o il personale infermieristico.
- Si assicurati di avere una cartuccia da 24 mg di HumatroPen da utilizzare con HumatroPen 24 mg. Se non corrispondi **NON LA USI** e contatti il medico, il farmacista o il personale infermieristico.
- Segua la Sezione 2 **SOLO** per inserire una nuova cartuccia prima del primo uso.
- La Sezione 3 di questo manuale deve essere usata ad ogni iniezione.
- **NON CONDIVIDA** HumatroPen 24 mg o gli aghi per la penna perché può esserci il rischio di trasmissione di agenti infettivi.
- HumatroPen 24 mg non è raccomandata per un uso da parte di una persona non vedente o di coloro che hanno difficoltà visive senza l'assistenza di qualcuno istruito ad utilizzarla.

- *Getti via gli aghi utilizzati seguendo le istruzioni del medico, del farmacista o del personale infermieristico.*

- **NON CONSERVI** la penna con l'ago inserito.

 Legga il foglio illustrativo di Humatrope.

Diagram illustrating the components of the Humatrope®/Umatrope® 24 mg syringe:

- Cartouche d'Umatrope® / Humatrope® 24 mg (vendue séparément)** / **Humatrope® Cartuccia da 24 mg (venduta separatamente)**
- Capuchon du stylo** / **Cappuccio della penna**
- Joint en caoutchouc** / **Sigillo di gomma**
- Extrémité blanche** / **Estremità bianca**
- Tige Vite**
- Boîtier de vissage** / **Alloggiamento frontale**
- Corps du stylo 24 mg** / **Corpo della penna 24 mg**
- Bouton d'injection** / **Pulsante di iniezione**
- Baguette de dosage** / **Pulsante selettore della dose**
- Finestra de lecture** / **Finestra della dose**

capacité externe	Aligame
capacité interne	capacité interne

 *Si assicuri di seguire le istruzioni per la ricostituzione (mescolamento) come descritto nel Kit della cartuccia di Humatrope. Esegua la preparazione della nuova cartuccia solo una volta all'inizio di ogni nuova cartuccia. Per un uso giornaliero, **NON RIPETA** la preparazione di una nuova cartuccia. Se lo fa, può finire Humatrope prima del tempo.*

NOTA

- **NON RIPETA** la preparazione della cartuccia prima di ogni dose.
- **Lasci** la cartuccia inserita e **NON LA RIMUOVA** fino a che la cartuccia è vuota.
- **Vada alla Sezione 3, Fase 3**, per le istruzioni su come iniettarsi la prima dose.



