

類別:機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000
販売名:ホワイトマックチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



[原材料]

ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。注出部の径が大きいため、高粘度の材料や多量の注入、塗布に適している。

【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を注入、塗布する。

*** 【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流れ具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・ 破損、折損
 - ・ 動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社
電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)