

ホームホワイトニング材オパールエッセンスGo 使用上の注意

Opalescence
Tooth Whitening *go*

本製品を使用する前に必ず歯科医師による口腔内の診断が必要です。

1. ジェルが歯肉に触れないように装着してください。
2. ホワイトニングにより、アマルガム（銀の詰め物）に面したトレイの一部に紫色の着色が見られる場合がありますが、問題ありません。
3. トレイを飲み込んだり吸引したりしないでください。
4. 製品の使用に関して質問がある場合は、歯科医師に相談してください。
5. 本品使用中、歯肉、唇、喉、舌などの口腔内に不快感が生じる場合があります。その際は、製品の使用を中止してください。使用中止後も症状が続いたり悪化する場合は、直ちに歯科医師へ連絡してください。
6. 睡眠中はトレイを着用しないでください。
7. 使用中にジェルを飲み込まないように注意してください。
8. アレルギーをお持ちの場合、歯科医師に相談し、必要に応じて専門医に受診してください。また、使用後にアレルギーが発生した場合は、使用を中止し専門医等にご相談ください。
9. 修復物（かぶせ物、詰め物）は白くなりません。
10. ホワイトニング治療後は、歯の色が安定するのに2週間ほど要するので、審美修復や接着修復は本品治療の2週間後から行うようにします。
11. 健康上の懸念（疾患等）がある場合は、ホワイトニング治療前にかかりつけ専門医に相談をしてください。
12. 妊娠中または授乳期の方は本品を使用しないでください。
13. 歯面の状態により他の箇所比べて早くホワイトニング効果が進むことがあります。そのため、白さに差が表れて色むら（白い斑点）が見られる場合がありますが、使用を繰り返すことで色むらは抑えられます。
14. ホワイトニング後、時間の経過と共に色戻りしますので、必要に応じてホワイトニングのタッチアップのために歯科医院を受診してください。
15. ジェルが目に入らないように注意してください。もし、目に入った場合は、速やかに目を水で洗った後、専門医に相談してください。
16. 希望とする歯の色調について歯科医師と相談してください。
17. ホワイトニング後も定期的に歯科医院を受診し歯の色調メンテナンス、口腔内クリーニングを行いましょう。

オパールエッセンスデュアル ホワイトニングキット



オフィスホワイトニング 施術後のケアについて

- 治療後24～48時間は歯を白くする効果が持続します。
- 喫煙は歯に茶色い斑点が残ることがありますのでご使用はお控えください。
- 1回のオフィスホワイトニング施術では、理想とする歯の色調に達しない場合があります。追加のホワイトニングについては歯科医院で相談しましょう。
- 治療後、ホワイトニング由来の知覚過敏が起こることもあります。1～2日で徐々におさまります。数日経っても知覚過敏が続く場合は、歯科医師に連絡してください。知覚過敏があった場合は、次回の予約の前に、知覚過敏治療についてお尋ねください。
- オフィスホワイトニングの薬剤が歯ぐきに触れると白い斑点が現れることがあります。通常、20～30分で症状は消失しますが、必要に応じて、炎症を抑える処置を歯科医院で行ってください。
- 歯と歯ぐきの健康を保つためには、毎日の継続した歯磨きとフロスが大切です。定期的に歯科医院を受診し、検診とクリーニングを受けましょう。

使用方法



1.
パッケージから製品を取り出します。
「U」...上顎用ホワイトニングトレイ
「L」...下顎用ホワイトニングトレイ



2.
上顎用トレイを歯面に装着します。



3.
軽く吸い込むようにして、トレイを歯面に密着させます。



4.
内側の白いトレイを歯に残したまま、外側の色付きトレイ（緑）を取り外します。下顎用トレイも同様に装着します。装着時間は歯科医師の指導に従ってください。



5.
ホワイトニング終了後、トレイを取り外して破棄します。歯を磨き完全にジェルを除去します。



使い方を動画でチェック!

▶ 製品の使用方法はこちらの動画で!

トレイ装着時間：
1日最大90分