



DR. ANDREA FRANZÒ

Le Dr Franzò a obtenu son diplôme avec mention très bien à l'université de Trieste, département de dentisterie (Italie) en 2010. Il a également obtenu un master en dentisterie restauratrice et esthétique à l'université de Bologne en 2016. Le Dr Franzò a été professeur adjoint dans le cours « Techniques avancées pour les restaurations conservatrices » à l'Université de Trieste, ainsi que professeur dans le programme de maîtrise professionnelle en dentisterie restauratrice et esthétique à l'Université de Bologne. Le Dr Franzò est un conférencier expert dans les congrès nationaux et internationaux sur la dentisterie esthétique et adhésive. Il est également un membre actif de l'Académie italienne de dentisterie conservatrice et restauratrice, ainsi que de la Société italienne de dentisterie conservatrice et de l'Académie italienne de dentisterie esthétique. Le Dr Franzò travaille actuellement dans son cabinet à Gorizia (Italie), où il se spécialise dans la dentisterie prothétique et cosmétique.



Avant

Restaurations défailtantes et présence de caries secondaires.



Après

Restauration finale après le protocole de polissage. Notez la caractérisation occlusale améliorée après l'application des pigments.



1.

Après une isolation correcte par pose de la digue en caoutchouc, l'ancien matériau de restauration est déposé.



2.

Situation clinique après l'élimination du tissu carieux.



3.

CompositeTranscend™ teinte Universal Body (UB) appliqué pour la reconstitution de la paroi proximale.



4.

CompositeTranscend™ Teinte UB placé par incréments de 2 mm et photopolymérisé. Situation avant la caractérisation occlusale.



Les restaurations directes en composite sont l'un des traitements les plus courants dans la pratique quotidienne. La clé d'une bonne intégration esthétique et fonctionnelle est de modeler l'anatomie occlusale pour obtenir les bonnes proportions entre les cuspidés, les puits et les sillons. De nos jours, la combinaison de teintes opaques pour la dentine et translucides pour l'émail peut conduire à des résultats contre-productifs et créer plus de problèmes que de bienfaits. Une teinte universelle unique simplifie réellement les procédures cliniques pour les restaurations directes dans les zones postérieures avec des résultats prédictibles.