

類別:器 65 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000
販売名:スキニシリンジ 0.5mL

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため]
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]

[原材料]ポリプロピレン、サーモプラスチックエラストマー



[原理]

シリンジに歯科材料を充填し、チップを取り付け、圧力をかけることによつて、口腔内の適切な部位に適切な量の注入が可能となる。

【使用目的又は効果】

本品は、根管貼薬剤など粘度の高い歯科材料を少量で充填、口腔内に注入するために使用する。

【使用方法等】

使用方法(例)

1. 本品の先端に適切なチップを回しながらしっかりと取り付ける。
2. 本品からプランジャーを外し、後方より歯科材料を必要量充填する。
3. プランジャーを挿入し、シリンジから空気が抜け、材料が注出されるまでプランジャーを押す。
4. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
5. 各歯科材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

*** 【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社
電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)