

BR | Descrição: Ultradent® Diamond Polish é uma pasta branca, com sabor de menta, disponível em duas granulações: 1µm e 0,5µm. Ambas contêm partículas de diamante em uma base aquosa.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 0,5µm



Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 1.0µm



Indicação de uso: É utilizado para o polimento de restaurações cerâmicas e restaurações de resina composta. Pode ser utilizada de forma intra-oral e extra-oral.

Instruções de uso:

Para o polimento de cerâmicas:

1. Esculpa e dê o acabamento em todas as superfícies da peça com as pontas, taças e discos Jiffy (Registrado separadamente) (Fig. 1).
2. Remova o fecho Luer Lock da seringa. Conecte firmemente uma ponta de aplicação Black Mini (registrada separadamente) na seringa.
3. Para obter um melhor controle, segure a seringa com o êmbolo apoiado na palma da mão (Fig. 2), ao invés da maneira convencional com o polegar sobre o êmbolo.
4. Aplique uma pequena porção da pasta Diamond Polish com um disco de feltro (Fig.3). Para o polimento final, aumente a velocidade da peça de mão e utilize um forte spray de água enquanto realiza o procedimento polidor.
5. Faça a lavagem final com um forte spray de água.



Fig. 1 - Utilize brocas carbide e/ou diamantadas finas, as pontas, discos e taças Jiffy e/ou tiras de acabamento para contorno e acabamento final da restauração.

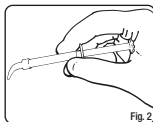


Fig. 2



Fig. 3 - Para prevenir a perda prematura do material de polimento, utilize baixas velocidades com o contra-ângulo de baixa rotação sem água.

Para o polimento de resinas compostas:

1. Esculpa e dê o acabamento de todas as superfícies com as pontas taças e discos Jiffy (registrado separadamente). Utilize tiras abrasivas conforme necessário.
2. Aplique a pasta Diamond Polish com uma escova macia ou disco de feltro.
3. Lave e seque as superfícies.

Precauções e advertências:

1. Apenas para uso profissional.
2. Revise as instruções, precauções e MSDS antes de iniciar o tratamento. Utilize apenas conforme as instruções do fabricante.
3. Mantenha os produtos afastados do calor e/ou da luz solar direta.
4. Evite a exposição da pele com resinas.
5. Isole materiais químicos fortes da área de tratamento.
6. Confirme que o paciente não apresente alergia aos materiais de tratamento.
7. Teste o escoamento do material antes da utilização intra-oral.
8. Nunca force o êmbolo de seringas.
9. Nos recomendamos o uso de barreiras protetoras higiênicas de seringa para prevenir a contaminação cruzada.
10. As pontas de aplicação são descartáveis. Reprocessamento proibido.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:

Mantenha o produto a temperatura ambiente (18 a 27°C).

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.
- Proibido reprocessar.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Ultradent Diamond Polish quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultradent Diamond Polish e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

**A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO,
PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.**



VALIDADE



NÚMERO DO CATÁLOGO



NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CUIDADO, CONSULTAR OS
DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (18°C A 27°C)



CUIDADO



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

ANVISA nº: 80279910056

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:

Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

MP00141.2 030820