

ULTRADENT **Ultradent™ Diamond Polish** Pasta de Polimento

Pasta para profilaxia e polimento dental (2101305)

BR | Descrição: Ultradent™ Diamond Polish é uma pasta branca, com sabor de menta, disponível em duas granulagens: 1µm e 0,5µm. Ambas contém partículas de diamante em uma base aquosa. É utilizada para o polimento de restaurações cerâmicas e restaurações de resina composta. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de usar.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 0,5µM



Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 1,0µM



Indicação de uso: Diamond Polish pode ser utilizada de forma intraoral ou extraoral para obter um alto brilho da porcelana.

Instruções de uso:

Preparação - Polimento de cerâmicas:

1. Esculpa e dê o acabamento em todas as superfícies da restauração antes do polimento.
2. Remova a tampa Luer Lock da seringa. Conecte firmemente uma ponta de aplicação na seringa.

Uso - Polimento de cerâmicas:

Aplique uma pequena porção da pasta Diamond Polish e faça o polimento com as pontas e taças Jiffy™ (registrado separadamente). Trabalhe utilizando baixas rotações para melhores resultados. Para o polimento final, aumente a velocidade da peça de mão e, se estiver em ambiente intraoral, use um jato de água intenso durante o polimento.

Limpeza: Use um jato de água firme para a lavagem final.

Preparação - Polimento de resinas compostas:

Esculpa e dê o acabamento em todas as superfícies da restauração antes do polimento.

Uso - Polimento de resinas compostas:

Aplique uma pequena porção da pasta Diamond Polish e faça o polimento com as pontas e taças Jiffy™ (registrado separadamente). Trabalhe utilizando baixas rotações para melhores resultados. Para o polimento final, aumente a velocidade da peça de mão e, se estiver em ambiente intraoral, use um jato de água intenso durante o polimento.

Limpeza: Lave e seque a(s) superfície(s).

Precauções e advertências:

1. Evite a exposição da pele com resinas.
2. Isole materiais químicos fortes da área de tratamento.
3. Recomendamos o uso de barreiras protetoras higiênicas de seringa para prevenir a contaminação cruzada.
4. As pontas de aplicação são descartáveis.
5. Mantenha os produtos afastados do calor e/ou da luz solar direta.
6. Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. Se for encontrada resistência, substitua a ponta e verifique novamente.
7. Apenas para uso profissional.

Contraindicações:

Não utilize em pacientes com alergias conhecidas a qualquer dos ingredientes listados na FDS.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:

Manter o produto a temperatura ambiente (18 a 27°C).

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.
- Proibido reprocessar.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Ultradent™ Diamond Polish quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultradent™ Diamond Polish e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (18°C A 27°C)

Ultradent™ Diamond Polish
ANISA nº: 80279910056

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Detentor do Registro, Fabricante e Distribuidor:
Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121, Itaici – Indaiatuba / SP - Brasil

CEP: 13340350

0800 773 5100

www.ultradent.com.br

ULTRADENT **Ultradent™ Diamond Polish**

Pasta para Pulir

Pasta de pulido y profilaxis dental (2101305)

ES! **Descripción:** Ultradent™ Diamond Polish es una pasta blanca, con sabor a menta, disponible en dos granos: 1µm y 0,5µm. Ambos contienen partículas de diamante en una base acuosa. Se utiliza para pulir restauraciones de cerámica y restauraciones de resina compuesta. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones e información de la SDS antes de su uso.

Listado de materiales de soporte que acompañan al producto: El respectivo Manual de Instrucciones de Uso acompaña al producto.

Jeringa que contiene 1,2 ml de Diamond Polish 0,5 µM



Jeringa que contiene 1,2 ml de Diamond Polish 1,0 µM



Indicación de uso: Diamond Polish se puede utilizar intraoral o extraoralmente para obtener un alto brillo en la porcelana.

Instrucciones de uso:

Preparación - Pulido cerámico:

1. Esculpe y termina todas las superficies de la restauración antes de pulir.
2. Retire la tapa Luer Lock de la jeringa. Conecte firmemente una punta de aplicación a la jeringa.

Uso - Pulido de cerámica:

Aplique una pequeña cantidad de pasta Diamond Polish y pula con puntas y copas Jiffy™ (se venden por separado). Trabaje a bajas velocidades para obtener mejores resultados. Para el pulido final, aumente la velocidad de la pieza de mano y, si se encuentra en un ambiente intraoral, utilice un chorro intenso de agua durante el pulido.

Limpieza: Utilice un chorro constante de agua para el lavado final.

Preparación - Pulido de resinas compuestas:

Esculpe y termina todas las superficies de la restauración antes de pulir.

Uso - Pulimento de resinas compuestas:

Aplique una pequeña porción de pasta Diamond Polish y pula con puntas y copas Jiffy™ (se venden por separado). Trabaje a bajas velocidades para obtener mejores resultados. Para el pulido final, aumente la velocidad de la pieza de mano y, si se encuentra en un ambiente intraoral, utilice un chorro intenso de agua durante el pulido.

Limpeza: Lave y seque la(s) superficie(s).

Precauciones y advertencias:

1. Evite la exposición de la piel a las resinas.
2. Aislar materiales químicos fuertes del área de tratamiento.
3. Recomendamos utilizar barreras protectoras higiénicas para jeringas para evitar la contaminación cruzada.
4. Las puntas de aplicación son desechables.
5. Mantener los productos alejados del calor y/o de la luz solar directa.
6. Verifique el flujo antes de la aplicación intraoral. Si encuentra resistencia, reemplace la punta y verifique nuevamente.
7. Sólo para uso profesional.

Contra indicaciones:

No lo use en pacientes con alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes enumerados en la SDS.

Condiciones de almacenamiento, transporte y/o manipulación:

Mantener el producto a temperatura ambiente (18 a 27°C).

Condiciones de eliminación:

- Si el embalaje está roto no utilizar el producto. Deseche y utilice otro con el embalaje intacto.
- Después de su uso, el producto debe desecharse en lugares adecuados para el desecho de materiales dentales.
- Está prohibido el reprocesamiento.

Requisitos esenciales para la seguridad y eficacia de los productos para la salud:

Ultradent™ Diamond Polish cuando se utiliza para el fin para el que fue diseñado y cuando lo manipula el dentista siguiendo las instrucciones de uso, no presenta riesgos para el paciente ni para el dentista.

NOTA: Para obtener hojas de datos de seguridad del producto e información adicional sobre el uso de Ultradent™ Diamond Polish, visite: www.ultradent.com.br.

SOLO PARA USO PROFESIONAL.



PROHIBIDO
REPROCESAR



SOLO PARA USO
PROFESIONAL



CONSULTA LAS
INSTRUCCIONES DE USO



TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
RECOMENDADA (18°C A 27°C)

Ultradent™ Diamond Polish

ANISA nº: 80279910056

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Titular del Registro, Fabricante y Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121, Itaici – Indaiatuba / SP - Brasil

CEP: 13340350

0800 773 5100

www.ultradent.com.br

MP00141.4 040424