

Opalustre™ pasta abrasiva ad azione chimico-meccanica

Opalustre™ è una pasta abrasiva al 6,6% di Acido Cloridrico che contiene microparticelle di Carbuco di Silicio che aiutano nel rimuovere rapidamente modesti antiestetismi da decalcificazione dello smalto di profondità inferiore a 0,2 mm. Opalustre™ è efficace nel trattamento della fluorosi lieve e delle discromie superficiali dello smalto¹.

- Rimozione permanente delle macchie superficiali dello smalto
- Trattamento permanente minimamente invasivo della fluorosi lieve
- L'Acido Cloridrico in bassa concentrazione (6,6%) favorisce l'eliminazione chimica delle macchie
- Microparticelle di Carbuco di Silicio producono una delicata abrasione meccanica





CASI CLINICI*

A Cura del Dr. Renato Herman Sunfield



A Cura del Dr. Rich Tuttle




Poche applicazioni della pasta Opalustre™ possono eliminare o ridurre in misura significativa decalcificazioni da lievi a moderate conseguenti a trattamento ortodontico. Utilizzando una coppetta OpalCups™ con setole, a basso numero di giri (circa 500 giri/min), applicare una pressione intermittente da media a forte per circa 60 secondi per applicazione.

Decalcificazione dello smalto corretta con una sola applicazione della pasta Opalustre™. Utilizzando una coppetta OpalCups™ con setole, a basso numero di giri (circa 500 giri/min), applicare una pressione intermittente da media a forte per circa 60 secondi per applicazione.

ISTRUZIONI - DIGA IN GOMMA

Courtesy of Dr. Rich Tuttle

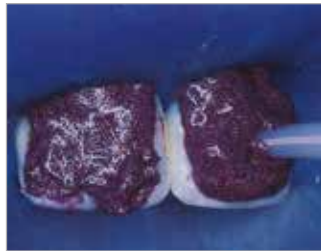

1. Prima

2. Dopo aver posizionato la diga, si applica la pasta Opalustre™ direttamente dalla siringa sullo smalto con discromie estrinseche

3. Premere e frizionare Opalustre™ sulla superficie del dente mediante OpalCups™ con setole integrate, esercitando una pressione da media a forte. Aspirare la pasta dai denti, quindi sciacquare, valutare e ripetere fin quando necessario. Finire il trattamento lucidando con la coppetta OpalCups™ senza setole

4. Risultato dopo la microabrasione dello smalto e un ciclo di sbiancamento domiciliare di 21 giorni con gel sbiancante Opalescence™

* Per maggiori informazioni consultare le istruzioni d'uso del prodotto.



5554 - Opalustre™ Kit
2 siringhe da 1,2 mm di Opalustre
5 OpalCups con setole e 5 senza setole
10 puntali White Mac Tip



555 - Opalustre™ Refill
4 siringhe da 1,2 mm di Opalustre



5800 - OpalCups™ con setole 20 pezzi



5799 - OpalCups™ senza setole 20 pezzi

1. Celik EU, Yazkan B, Yildiz G, Tunac AT. Clinical performance of a combined approach for the esthetic management of fluorosed teeth: Three-year results. *Nigerian Journal of Clinical Practice*. 2016.
2. www.realityesthetics.com.