



ULTRA-ETCH™




El arte de la
colocación precisa.




RESTORATIVE
SOLUTION

Probado, Fiable y AZUL

- **Aplicación y enjuague sencillos:** su característico color azul facilita la colocación y garantiza una eliminación completa.
- **Viscosidad ideal:** asegura una colocación precisa sin desplazarse, incluso en superficies verticales.¹
- **Acción capilar mejorada:** penetra en las fisuras más pequeñas de las superficies oclusales.
- **Tranquilidad garantizada:** su exclusiva química autolimitante reduce el riesgo de sobregabado, creando la superficie óptima para recibir la resina.²

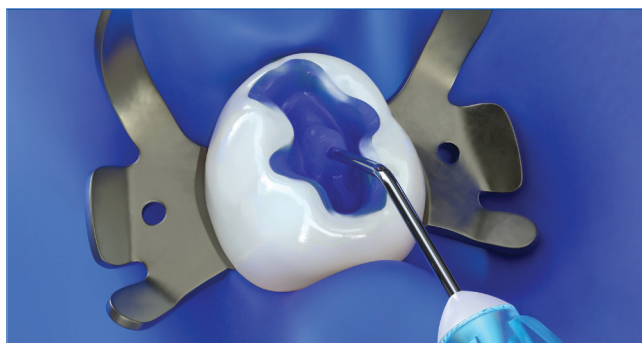

La experiencia clínica y las evaluaciones con FE-SEM demuestran que un tiempo de grabado de 15 segundos, tanto en dentina como en esmalte tallado, proporciona un condicionamiento óptimo de ambos tejidos.² Enjuagar con agua/aire. Retirar el exceso de agua, dejando la superficie visiblemente húmeda.

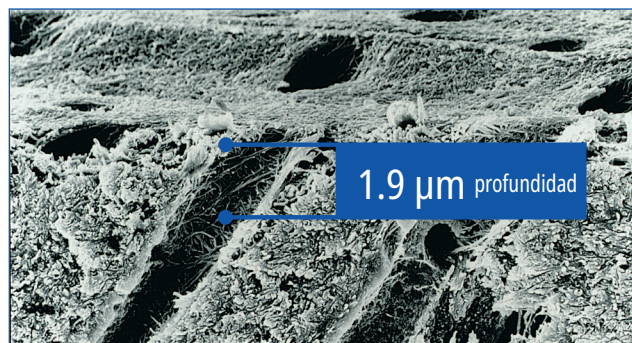

1.9 µm profundidad

Se ha demostrado que el ácido fosfórico Ultra-Etch™ es único por su carácter autolimitante en la profundidad del grabado, con una media de 1,9 µm en 15 segundos de aplicación.³ En comparación con otros ácidos grabadores fosfóricos modernos con concentraciones superiores al 30 %, la fórmula de ácido fosfórico al 35 % de Ultradent produjo la menor profundidad de grabado (1,9 µm), lo que demuestra su función autolimitante. El resto de fórmulas alcanzaron profundidades de al menos 3 µm, llegando hasta 5,6 µm.² Los ácidos con una profundidad de grabado mayor que la del grabador Ultra-Etch™ superan el nivel óptimo e incrementan el riesgo de una impregnación incompleta de la resina.²

163 - Ultra-Etch Kit 4pk
4 Jeringas de 1,2 ml (1,58 g)
20 Puntas Blue Micro Tips

383 - Ultra-Etch IndiSpense™ Syringe Kit
1 Jeringa IndiSpense de 30 ml (39,60 g)
20 Jeringas vacías de 1,2 ml
20 Puntas Blue Micro Tips

164 - Jeringa Ultra-Etch 4 uds.
168 - Jeringa Ultra-Etch 20 uds.
1407 - Jeringa Ultra-Etch 50 uds.
Jeringas de 1,2 ml (1,58 g)

167 - Ultra-Etch Econo Kit
20 Jeringas de 1,2ml (1,58 g)
40 Puntas Blue Micro Tips

685 - Jeringa Ultra-Etch IndiSpense 1 ud.
Jeringa de 30 ml (39,60 g)



Listed as a "Can't Live Without" product by a prominent independent research institute.⁴



2021



14x Winner



10x Winner

1. Datos de archivo. 2. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A field emission SEM study of dentin etched with different phosphoric acid compositions and/or concentrations. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven, Belgium; 1994. Datos de archivo. 3. Perdigão J, Lopes M. The effect of etching time on dentin demineralization. Quintessence Int. 2001;32(1):19-26. 4. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July, 1997. 5. www.realityesthetics.com.