

類別: 器 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称: 歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名: エンドイーズチップ

【禁忌・禁止】

【使用方法】

- 本品の改造や加工等を行わないこと。(改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため)
- 再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

【製造業者】

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、ニードル径によって以下の 5 種類がある。

- ① エンドイーズチップ 18G (緑色)
- ② エンドイーズチップ 19G (黄色)
- ③ エンドイーズチップ 20G (桃色)
- ④ エンドイーズチップ 22G (水色)
- ⑤ エンドイーズチップ 31G (橙色)



【原理】

シリンジからの圧力で材料がチップ内へ流入し、ニードルを通して適切な量が根管内の部位に注入される。

【原材料】

ポリプロピレン、ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を根管内に注入するために用いる。根管の洗浄並びに薬液の吸引などに用いることもできる。

【使用方法等】

【使用方法(例)】

【歯科材料を注入する場合の使用方法(例)】

1. シリンジのキャップをはずす。
2. シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

【洗浄、吸引の場合の使用方法(例)】

- *
 1. バキュームアダプターの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
 2. 口腔内に使用する前にエアール又は水の流れを確認する。
 3. 各アダプターの取扱説明書に従って洗浄又は吸引を行う。

*** 【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合、エアール又は水の流れを確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

(1) 重大な不具合

以下の不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。

- 破損、折損
- 動作不良