

類別: 器 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000
販売名: ソフトイーズチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となる。]
- 2) 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状]

先端のファイバーブラシとの一体型であり、色は半透明である。



[原理]

シリンジに取り付け、先端のファイバーブラシに材料を染み込ませながら、歯面に均一に適量を塗布する。

[原材料]

ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

【使用方法等】

使用方法(例)

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) 本品を回しながら、シリンジの先端に緩みがないように取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性を確認する。
- (4) 材料を先端のファイバーブラシに染み込ませながら、歯面に均一に適量を塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用する前に表面にキズ、バリ、その他使用上有害な欠陥がないかを確認すること。
- (2) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (3) 口腔内に使用する前に、チップをつけた状態で材料の流出性を確認すること。
- (4) 材料がスムーズにチップから流出しない場合はチップを交換し、そのチップは使用しないこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良

3. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・シリンジの機能不良、破損
 - ・シリンジからの材料漏れ

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温で保管

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)