

類別:機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:ナビチップ 29G サイドポート

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]


ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]

本品は、ニードルの長さによって以下の4種類がある。

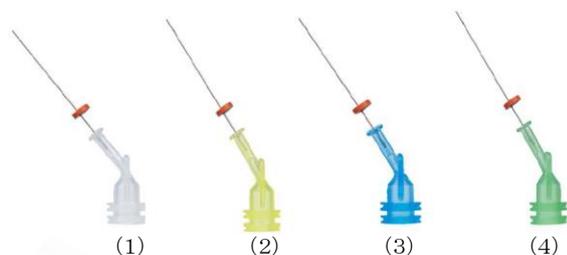

先端拡大図

	カラーコード	ニードル長
(1)	白	17 mm
(2)	黄	21 mm
(3)	青	25 mm
(4)	緑	27 mm

[原材料]

ポリプロピレン、ステンレス鋼、シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) シリンジに充填される歯科材料の取扱説明書に従い材料を注入する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流れ具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。
- (4) 材料を注入するとき、チップ又は材料が根尖を突き抜けないように、根尖から2mm以上アンダーの位置より注入し、チップが根管壁に接触しないゆるい状態を保つこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・ 破損、折損
 - ・ 動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管