

類別:機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000
販売名:インスパイラルブラシチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため]
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]



[原材料] ポリプロピレン、ポリエステル

[原理]

本品は、シリンジからの圧力で材料がチップ内へ流入し、長さ調節可能なブラシにより、適切な部位に適切な量の塗布の調節が可能となる。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内に塗布するために用いる。比較的高粘度で高密度の材料に適している。

【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) 本品のブラシの長さを調節し、シリンジの先端に回しながらしっかりと取り付け。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を塗布する。

* **【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合、エア―又は水の流れを確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合

以下の不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。

- ・破損、折損
- ・動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

常温保管

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)