


*Protección deliciosa,
Dispensado Inteligente*

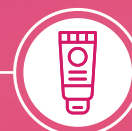

*Formato en
tubo a granel*



*Económico y
eficiente*



*Dos
deliciosos
sabores*



*Textura
suave*

gleoTM
fluoride varnish



Frutos Mixtos



Chicle



Antes de Gleo

Después de Gleo

Confianza en Cada Aplicación

Diseñado para entornos odontológicos de alto volumen, el barniz de flúor Gleo ofrece fluoruro de sodio al 5% en una fórmula no granulosa que se aplica suavemente y se mantiene en su lugar, proporcionando protección duradera para sus pacientes. El formato en tubo de 10 ml reduce el desperdicio y mejora la rentabilidad de la clínica, maximizando la eficiencia. Con ingredientes aptos para personas con alergias y sabores atractivos, Gleo facilita más que nunca ofrecer la protección con flúor que sus pacientes necesitan.



1 Cepille cuidadosamente los dientes, pule con una copa de goma o límpielos con gasa.



2 Agite bien el tubo antes de cada uso para mezclar los componentes que puedan haberse asentado.



3 Dispense una pequeña cantidad sobre una superficie limpia para verificar el color y la consistencia del producto. Si es necesario, vuelva a agitar el tubo y dispense más producto.



4 Aplique una capa fina y uniforme de barniz Gleo con movimientos de pincelado, cubriendo la mayor cantidad posible de superficies secas.**



5831 - Tubo individual de Gleo - Frutos Mixtos
1 Tubo de 10 ml



5830 - Tubo individual de Gleo - Chicle
1 Tubo de 10 ml