

類別:機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:ブラックマイクロ FX チップ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]

本品は、ニードルの先端に毛羽がある。

ニードル:22G



[原材料]

ナイロン、ポリプロピレン、エポキシ、ステンレス鋼

[原理]

歯科材料を充填したシリンジ先端部に装着することで、ニードル内腔を通して口腔内等に注入する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) シリンジに充填される歯科材料の取扱説明書に従い材料を注入する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流れ具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - ・ 破損、折損
 - ・ 動作不良

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温多湿、及び直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)

A1357AR01 073124