

ULTRADENT PRODUCTS, INC. OpalDam™ / OpalDam™ Green

Barreira Gingival Fotopolimerizável (2101402)

BR | Descrição do produto: OpalDam™ e OpalDam™ Green são resinas fotopolimerizáveis exclusivas, com reflexividade de luz e passivamente adesivas (vedantes). Sua base de metacrilatos foi desenvolvida com resistência adequada para formar uma barreira, porém, de fácil remoção das ameias e concavidades. A cor verde contrastante do OpalDam™ Green mostra a sua localização na gengiva e nos dentes para uma cobertura mais eficaz. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações na FDS antes de usar.

Forma(s) de Apresentação:

Seringa contendo 1,2 mL



Seringa contendo 3g



Ponta para aplicação: Ponta Black Mini™ Tip (dependendo da apresentação)

Indicações de Uso/Finalidade de Uso: OpalDam™ / OpalDam™ Green são resinas fotopolimerizáveis exclusivas, com reflexividade de luz e passivamente adesivas (vedantes). Sua base de metacrilatos foi desenvolvida com resistência adequada para formar uma barreira, porém, de fácil remoção das ameias e concavidades. A cor verde contrastante do OpalDam™ Green mostra a sua localização na gengiva e nos dentes para uma cobertura mais eficaz.

Contraindicações:

Não usar em pacientes com sensibilidade conhecida a metacrilatos ou outras resinas. Para doentes ou usuários com alergias, consulte o documento sobre alergênicos do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada reação alérgica, lave a área exposta com água abundante e peça ao paciente que consulte seu médico.

Precauções e advertências:

1. As resinas podem ser sensibilizantes. Se ocorrer dermatite, erupção cutânea ou qualquer outra reação alérgica, lave a área com muita água e encaminhe o paciente ao médico.
2. Tome cuidado ao usar a barreira de resina OpalDam™ para isolamento em pacientes com mucosite grave ou doença autoimune subepidérmica que se manifesta na cavidade oral. Em vez disso, use um dique de borracha no lugar da barreira de resina.

3. Se ficarem bolhas na margem gengival da barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green, reaplique nessa área.
4. Reprocessamento proibido. O produto pode ser usado até sua capacidade total, desde que cada ponta de aplicação e barreira protetora sejam usadas apenas uma vez para evitar contaminação cruzada.
5. As pontas são de uso único.
6. Ao polimerizar resinas em tecidos moles, use o movimento de escaneamento para evitar a irritação causada pelo calor da fotopolimerização.

Instruções Passo a Passo:

Preparação:

1. Remova a tampa Luer Lock e coloque a ponta recomendada de modo seguro na seringa de OpalDam™ / OpalDam™ Green.
2. Verifique o fluxo, antes do uso. Se houver resistência, substitua a ponta e verifique novamente.
3. Enxague completamente e seque os dentes e a gengiva onde a barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green será aplicada.

Utilização:

1. Aplique a barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green com aproximadamente 5–10 mm de altura e avance cerca de 2–3 mm sobre o esmalte. Estenda a resina para além do último dente a ser clareado e nos espaços interproximais para proteger as papilas interdentárias e o tecido gengival lingual. Os botões de resina que se estendem pelas ameias gengivais conferem retenção à barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green.
 2. Ao proteger um arco completo, fotopolimerize a barreira de resina no modo Standard usando um movimento de varredura por 20 segundos e mantendo a lente aproximadamente 1 cm da barreira e do tecido. Com um instrumento dentário, verifique cuidadosamente a resina quanto a uma polimerização completa. Se não estiver usando na arcada completa, faça uma varredura da barreira por aproximadamente 3 a 5 segundos por dente.
- Limpeza:**
1. Após o tratamento, remova a barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green da superfície deslizando suavemente com um instrumento dentário entre a barreira e o tecido. Todos os pedaços grandes serão removidos de uma só vez.
 2. Remova a barreira de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green dos espaços interproximais usando um explorador e/ou fio dental. Enxágue bem a boca.

Armazenamento, Transporte e/ou Manipulação:

Armazenar e transportar à temperatura de 2°C-27°C.

Descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Informações Diversas:

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: OpalDam™ / OpalDam™ Green, quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de OpalDam™ e OpalDam™ Green e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
SAC: 0800 773 5100 / www.ultradent.com.br



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (2°C A 27°C)

OpalDam™

ANVISA nº: 80279910015

Black Mini Tips

ANVISA Nº: 80279910033

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Detentor do registro, Fabricante e Distribuidor:
Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaíatuba – SP, Brasil
CEP: 13340350
SAC: 0800 773 5100
www.ultradent.com.br


ULTRADENT PRODUCTS, INC. OpalDam™ / OpalDam™ Green

Barrera gingival fotopolimerizable (2101402)

ES! **Descripción del producto:** OpalDam™ y OpalDam™ Green son resinas fotopolimerizables exclusivas, reflectoras de luz y pasivamente adhesivas (sellantes). Su base de metacrilatos fue desarrollada con una resistencia adecuada para formar una barrera, sin embargo, es de fácil remoción de espacios abiertos y zonas retentivas. El color verde contrastante de OpalDam™ Green muestra su ubicación en las encías y en los dientes para una cobertura más eficaz. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones e información de la SDS antes de usar.

Forma(s) de presentación:

Jeringa conteniendo 1,2 mL

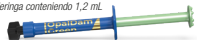

Jeringa conteniendo 3g



Punta de aplicación: Punta Black Mini™ (dependiendo de la presentación)

Indicaciones de uso/Finalidad de uso: OpalDam™ y OpalDam™ Green son resinas fotopolimerizables exclusivas, reflectoras de luz y pasivamente adhesivas (sellantes). Su base de metacrilatos fue desarrollada con una resistencia adecuada para formar una barrera, sin embargo, es de fácil remoción de espacios abiertos y zonas retentivas. El color verde contrastante de OpalDam™ Green muestra su ubicación en las encías y en los dientes para una cobertura más eficaz.

Contraindicaciones:

No usar en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Para pacientes o usuarios con alergias, consulte la información sobre alérgenos del producto, disponible en www.ultradent.com. Si observa una reacción alérgica, lave la zona expuesta con abundante agua y solicite al paciente que consulte a su médico.

Precauciones y Advertencias:

1. Las resinas pueden ser sensibilizantes. Si se presenta dermatitis, erupción cutánea o cualquier otra reacción alérgica, enjuague la zona con abundante agua y remita al paciente a un médico.
2. Tenga precaución al usar la barrera de resina OpalDam™ para el aislamiento en pacientes con mucositis grave o enfermedad autoinmune subepidérmica que se manifiesta en la cavidad oral. En su lugar, utilice un dique de goma en lugar de la barrera de resina.

3. Si quedan burbujas en el margen gingival de la barrera de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green, vuelva a aplicarla en esa zona.
4. No se permite su reprocesamiento. El producto puede utilizarse en toda su capacidad, siempre que cada punta de aplicación y barrera protectora se utilicen solo una vez para evitar la contaminación cruzada.
5. Las puntas son de un solo uso.
6. Al polimerizar resinas sobre tejido blando, utilice un movimiento de barrido para evitar la irritación causada por el calor de la fotopolimerización.

Instrucciones Paso a Paso:

Preparación:

1. Retire el tapón Luer Lock y fije firmemente la punta recomendada a la jeringa OpalDam™ / OpalDam™ Green.
2. Compruebe el flujo antes de usar. Si nota resistencia, vuelva a colocar la punta y vuelva a comprobarlo.
3. Enjuague y seque bien los dientes y las encías donde se aplicará la barrera de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green.

Utilización:

1. Aplique una barra de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green de aproximadamente 5-10 mm de altura y extiéndala unos 2-3 mm sobre el esmalte. Extienda la resina más allá del último diente a blanquear y hacia los espacios interproximales para proteger las papilas interdenciales y el tejido gingival lingual. Los botones de resina que se extienden a través de los espacios gingivales agregan retención a la barrera de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green.
2. Para proteger una arcada completa, fotopolimerice una barrera de resina en modo estándar con un movimiento de barrido durante 20 segundos, manteniendo la lente a aproximadamente 1 cm de la barrera y el tejido. Con un instrumento dental, compruebe cuidadosamente que la resina esté completamente polimerizada. Si no utiliza la barrera en toda la arcada, pásela de 3 a 5 segundos por cada diente.

Limpieza:

1. Después del tratamiento, retire la barrera de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green de la superficie deslizando suavemente un instrumento dental entre la barrera y el tejido. Se retirarán todos los fragmentos o los fragmentos grandes de una vez.
2. Retire la barrera de resina OpalDam™ / OpalDam™ Green de los espacios interproximales con un explorador o hilo dental. Enjuáguese bien la boca.

Almacenamiento, transporte y/o manipulación:

Almacenar y transportar a una temperatura de 2 °C a 27 °C.

Eliminación:

- Si el envase está dañado, no utilice el producto. Deséchelo y utilice otro producto con el envase intacto.
- Después de su uso, el producto debe desecharse en un punto de eliminación adecuado para materiales dentales.

Información diversa:

Requisitos esenciales para la seguridad y eficacia de los productos sanitarios:

OpalDam™/OpalDam™ Green, cuando se utiliza para el fin previsto y es manipulado por un dentista siguiendo las instrucciones de uso, no presenta ningún riesgo para el paciente ni para el dentista.

NOTA: Para hojas de datos de seguridad e información adicional sobre el uso de OpalDam™ y OpalDam™ Green y otros productos relacionados, visite: www.ultradent.com.br

SOLO PARA USO PROFESIONAL.

PUNTAS DE APLICACIÓN DE UN SOLO USO.

Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
Servicio de atención al cliente: 0800 773 5100 / www.ultradent.com.br



PROHIBIDO
REPRODUCIR



SOLO PARA USO
PROFESIONAL



CONSULTA LAS
INSTRUCCIONES DE USO



TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
RECOMENDADA (2°C A 27°C)

OpalDam™

ANVISA nº: 80279910015

Black Mini Tips

ANVISA Nº: 80279910033

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572



Titular del Registro, Fabricante y Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121

Itaici – Indaialta – SP, Brasil

CEP: 13340350

SAC: 0800 773 5100

www.ultradent.com.br

51545.11 180725

2/2