

BR | Descrição: O OpalDam® é uma exclusiva barreira resinosa reflexiva fotopolimerizável. Devido às suas propriedades de reflexão luminosa, o OpalDam é ideal para a proteção gengival durante o clareamento de um dente ou de arco inteiro. A mica presente na formulação permite a propriedade de reflexão luminosa. O OpalDam possui uma base de metacrilato e foi desenvolvido com capacidade adesiva suficiente para agir como barreira, porém com fácil remoção de ameias e concavidades. Seu exclusivo sistema de aplicação por seringa garante controle, facilidade de uso e mínimo desperdício.

Especificações e características técnicas do produto: OpalDam é um exclusivo adesivo passivo (selador) resinoso, reflexivo e fotopolimerizável. Sua base de metacrilato foi desenvolvida para ter resistência suficiente para agir como barreira, porém, de fácil remoção de ameias e concavidades.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de Uso: A resina OpalDam é uma barreira gengival fotopolimerizável utilizada para proteger os tecidos moles adjacentes aos dentes durante o clareamento em consultório.

Instruções de uso:

Procedimento de isolamento com OpalDam:

1. Remova a tampa Luer Lock e conecte firmemente uma ponta aplicadora descartável à seringa de OpalDam.
2. Posicione os retratores de bochecha plásticos auto suportados. Lave e seque completamente os dentes, prestando atenção especial ao terço gengival.

NOTA: Quando for isolar o arco mandibular, previna o fluxo salivar entra as ameias de dentes anteriores usando um sugador e roletes de algodão na região sub-lingual. Aplique o OpalDam nas ameias, cíngulos e gengiva adjacente. Fotopolimerize como indicado abaixo na seção "4".

3. Aplique a resina OpalDam para construir uma faixa de 4 a 6 mm de altura com 1,5 a 2 mm de espessura sobre a gengiva (**Fig. 1**). Avance cerca de 0,5 mm sobre o esmalte. Se houver excesso de resina sobre o esmalte, fotopolimerize a região por 5 segundos e utilize um instrumento manual para remover o excesso. Estenda a resina para além do último dente a ser clareado. Quando houver diastemas, aplique a resina pela lingual, preenchendo o espaço completamente. Isso irá proteger as papilas interdentes e o tecido gengival lingual. Botões de resina estendendo-se pelas ameias conferem retenção à barreira de OpalDam.

NOTA: Primeiramente, as áreas críticas (margens gengivais e ameias) são cobertas usando uma ponta de menor diâmetro. Uma ponta de maior diâmetro pode ser usada para cobrir as áreas maiores da mucosa bucal mais rapidamente.

4. Após a aplicação da barreira resinosa, fotopolimerize utilizando VALO® no modo Standart por 20 segundos em cada arcada, realizando movimento contínuo. Note as exclusivas propriedades de reflexão de luz de OpalDam (**Fig. 2**). Limpe os dentes com pasta profilática para remover excessos de filme resinoso. Cuidado para não descolar a barreira polimerizada de OpalDam.

5. OpalDam funciona bem para clareamento de arco total. Posicione um bloco de mordida para língua na região de molares e instrua o paciente a mantê-lo em posição com uma pressão de mordida suave, porém firme. Posicione roletes de algodão na região vestibular.

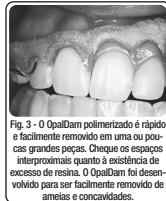
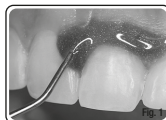


Fig. 3 - O OpalDam polimerizado é rápido e facilmente removido em uma ou poucas grandes peças. Cheque os espaços interproximais quanto à existência de excesso de resina. O OpalDam foi desenvolvido para ser facilmente removido de ameias e concavidades.

Procedimento de Limpeza:

1. Após a sucção do gel clareador, lave os dentes com um jato de ar / água e aspire. Remova a barreira de OpalDam da superfície com um explorador ou outro instrumento. Geralmente pode ser removido em um ou em grandes pedaços (**Fig. 3**).
2. Remova o OpalDam dos espaços interproximais com um explorador e/ou fio dental (lave a região com um jato de ar / água).

Precauções e advertências:

1. Verifique a fluidez do material em uma superfície inerte (por exemplo, um bloco de mistura) para garantir a homogeneidade do fluxo antes de utilizá-lo intraoralmente. Se sentir resistência, NÃO continue. Conecte uma nova ponta e teste novamente antes e utilizar no paciente.
2. O OpalDam não deve ser utilizado com outros agentes clareadores que utilizem moldeira; pois OpalDam atrapalha o correto assentamento da moldeira reduzindo o efeito clareador e a capacidade do OpalDam de proteger as gengivas.
3. Utilize apenas um fotopolimerizador de qualidade para polimerizar a resina OpalDam.
4. Não use OpalDam em pacientes com histórico de sensibilidade a resinas. Se ocorrer dermatites, erupções ou outra reação alérgica, lave a área com água em abundância e encaminhe o paciente a um médico.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:

Armazenar e transportar à temperatura de 2°C-27°C.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: OpalDam e OpalDam Green, quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de OpalDam e OpalDam Green e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.



VALIDADE

REF

NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO
REPROCESSAR

R_x

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CUIDADO, CONSULTAR OS
DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (2°C A 27°C)



CUIDADO



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

ANVISA nº: 80279910015

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:

Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br