

## 1. 사용목적

턱이나 치아의 주형을 만들 때 인상 재료의 경화가 촉진되도록 인상 전후 인상 재료의 처치에 사용하는 것

## 2. 사용방법

### 가. Single Cord Technique

- 1) Sulcus에 Viscostat 및 Astrigedent를 넣어, 문지르면서 응혈되기 시작하면 장축방향으로 air-water를 spray한다. (stain 발생 예방)
- 2) 지혈 후, Ultrapak Knitted Cord를 Viscostat 및 Astrigedent에 적신 후 충분히 짰 다음, sulcus에 삽입하고, 여분의 잔사와 Viscostat 및 Astrigedent를 제거하기 위해 air-water를 spray한다.
- 3) 약 2분 후 Ultrapak Knitted Cord를 제거한 다음, 인상 채득한다.

### 나. Double Cord Technique

- 1) Sulcus에 Viscostat 및 Astrigedent를 넣어, 문지르면서 응혈되기 시작하면 장축방향으로 air-water를 spray한다. (stain 발생 예방)
- 2) 1차 Ultrapak Knitted Cord는 Viscostat 및 Astrigedent를 묻히지 않고 삽입한다.
- 3) 2차 Ultrapak Knitted Cord는(1차 Ultrapak Knitted Cord보다 2단계 굵은 Ultrapak Knitted Cord 사용)는 Viscostat 및 Astrigedent에 적신 후 완전히 짰 다음, 1차 Ultrapak Knitted Cord 위에 삽입하고, air-water를 spray한다. (stain 발생 예방)
- 4) 약 2분 후 2차 Ultrapak Knitted Cord만을 제거한 다음, 인상 채득한다.

## 3. 사용 시 주의사항

- 1) 전문 의료인에 의해 사용되어야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금한다.
- 2) 어린이 손이 닿지 않는 곳에서 보관한다.
- 3) 열, 직사광선을 피하여 실온보관 한다.
- 4) 치료를 시작하기 전에 지시사항, 주의사항 및 MSDS를 읽고 지시에 따라 사용한다.
- 5) 본 제품은 삽입 시 잘 눌러주고 원하는 굵기보다 더 굵은 코드를 선택하여 사용한다.

### 본 제품은 의료기기임

품목명: 인상 전 처치제

모델명: 131, 132, 133, 134, 136, 137

수입품목인증번호: 수인16-4521호

수입자의 상호 및 주소: (주)메디팁 / 서울특별시 강남구 개포로 619, 10층 (개포동, 강남우체국빌딩)

제조사: ULTRADENT PRODUCTS, INC(미국)

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

작성연월: 2025년 2월