

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE PER LO SBIANCAMENTO MEDICALE



1 Prima di iniziare la procedura di attivazione indossare e fare indossare al paziente gli occhiali protettivi. Assicurarsi che le due siringhe siano ben avvitate. Per la procedura di miscelazione, consultare le istruzioni o il retro del flyer.



2 Riportare tutto il gel miscelato nella siringa ROSSA. Separare le due siringhe e collegare il puntale Black Mini™ o altra punta consigliata sulla siringa rossa. Controllare il flusso su una garza o tampone di cotone prima di applicare il gel a livello intraorale. Prestare attenzione alla consistenza e assicurarsi che il colore sia omogeneo. Se si incontra resistenza, sostituire la punta e ricontrrollare il flusso.



3 Posizionare il blocco occlusale Ultradent IsoBlock™ e un divaricatore per guance e labbra o l'apribocca Umbrella™. Risciacquare e asciugare la superficie dei denti da sbiancare e la gengiva.



4 Applicare saldamente il puntale Black Mini™ sulla siringa della diga chimica OpalDam™ Green e controllare il flusso del materiale. Applicare la diga OpalDam™ Green lungo il margine gengivale, sovrappoendola sullo smalto di circa 2-3 mm. Cominciare e finire il contorno un dente oltre l'elemento più distale da trattare. Applicare la diga negli spazi interprossimali.



5 Fotopolimerizzare la resina OpalDam™ Green per 20 secondi per arcata. Quando si applica la barriera su di un singolo dente, eseguire un movimento a scansione per 5 secondi. Controllare la fotopolimerizzazione della resina con uno strumento, facendo attenzione a non rompere il sigillo.



6 Applicare uno strato di gel sbiancante da 0,5 mm a 1 mm posizionandolo sulle superfici labiali. Lasciare agire il gel sbiancante per 20 minuti per applicazione.



7 Aspirare il gel sbiancante utilizzando la punta per aspirazione SST™ (punta di aspirazione chirurgica) o qualsiasi punta di aspirazione chirurgica. Per evitare schizzi di gel, non usare acqua durante l'aspirazione. Quando il gel è stato rimosso completamente, risciacquare leggermente e asciugare con aria. Prestare attenzione a non spostare la diga liquida o in gomma.



8 Se i risultati desiderati non sono stati raggiunti, ripetere l'applicazione del gel sbiancante per altre 2 volte per seduta. Non superare le 3 applicazioni per visita. Una volta completata l'applicazione finale e rimosso tutto il gel sbiancante visibile, sciacquare accuratamente i denti con uno spray aria/acqua e aspirare.




9 Far scorrere delicatamente la punta di uno strumento dentale sotto la barriera di resina OpalDam™ Green e sollevarla. Controllare e rimuovere qualsiasi residuo interprossimale.



10 Valutare la gradazione di colore raggiunta. Se si desidera e, se il paziente non soffre di sensibilità dentale, è possibile ripetere il trattamento.



Istruzioni di miscelazione e attivazione del gel sbiancante

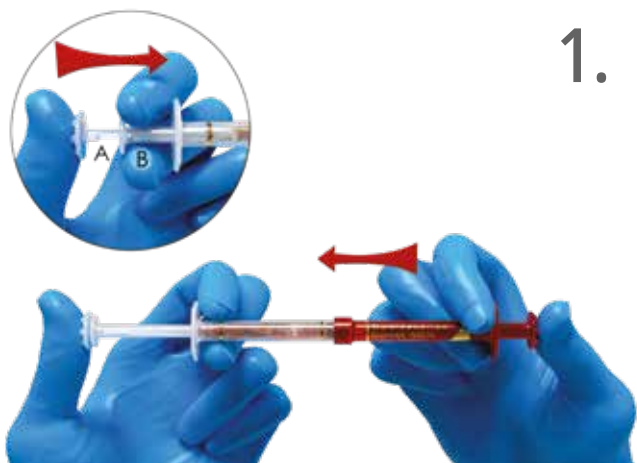


1.

Controllare che le siringhe siano collegate correttamente. Spingere lo stantuffo piccolo trasparente (A) nella siringa piccola centrale trasparente (B) per rompere la membrana interna e combinare agente sbiancante e attivatore. Spingere lo stantuffo della siringa rossa nella siringa più grande trasparente.



2.

Spingere il contenuto della siringa trasparente nella siringa rossa. Per miscelare completamente l'attivatore con il gel sbiancante, continuare a premere gli stantuffi con i polli nelle due direzioni e miscelare rapidamente per almeno 50 volte (25 volte per ogni direzione).

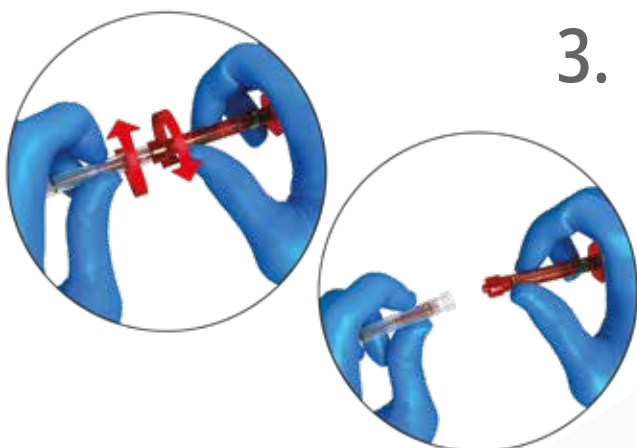

3.

Iniettare tutto il gel miscelato nella siringa rossa e separare le due siringhe.



4.

Inserire il puntale Black Mini™ sulla siringa rossa. Verificare il flusso del materiale su una garza o su un blocchetto da miscelazione prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, applicare un nuovo puntale e ricontrollare il flusso prima dell'applicazione.