

類別:機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:マイクロキャピラリーチップ

**【禁忌・禁止】**

[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク  
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]

本品には、先端部の長さによって以下の2種類がある。



マイクロキャピラリーチップ° 5 mm(緑)

マイクロキャピラリーチップ° 10 mm(青)

[原材料]

ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯周治療用材料又は歯内治療用材料を口腔内に注入するために用いる。または吸引に用いることもできる。

**【使用方法等】**

[使用方法(例)]

1) 注入の場合

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

2) 吸引の場合

- (1) 空のシリンジ等やバキュームアダプターの先端に、本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (2) 口腔内に使用する前にエア어의流れを確認する。
- (3) シリンジやバキュームアダプターの取扱説明書に従い吸引を行う。

\* **【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に材料の流出具合又はエア어의流れを確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
  - ・ 破損、折損
  - ・ 動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

常温保管

\* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
電話番号 0120-060-751