

❏ Descrição: Opalescence™ Endo é um gel de Peróxido de Hidrogênio a 35% especialmente formulado para a técnica de clareamento interno.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de uso: O clareador Opalescence™ Endo é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado para clareamento de dentes tratados endodonticamente e descoloridos.

Instruções de uso:

O fator mais crítico no clareamento de dentes desvitalizados é não colocar material de clareamento abaixo da crista óssea alveolar e selar o material de obturação para proteger o selante endodôntico.

1. Examine a radiografia para estabelecer o selante endodôntico apical adequado e a altura da crista óssea alveolar.

2. Estabeleça as expectativas do paciente. Explique quaisquer limitações estéticas antes de prosseguir.

3. Remova todo o material de preenchimento da abertura de acesso até o nível determinado a partir da radiografia. Todo o material de restauração, material de preenchimento temporário e/ou endodôntico deve ser removido para permitir que o agente de clareamento entre em contato com a estrutura interna do dente, para obter ótimos resultados. (Fig. 1)

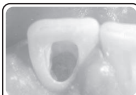


Fig. 1 – Abra o acesso lingual/palatino até a câmara pulpar. Remova todo o material de preenchimento e a guta-percha 2 a 3mm apical da junção cimento-esmalte.

4. Misture ionômero de vidro convencional ou resinoso, seguindo as orientações do fabricante.

NOTA: Aplique uma cama de 1 a 2mm para assegurar o selamento.

5. Encaixe uma ponta Black Mini na seringa e aplique Opalescence Endo na câmara pulpar, evitando os tecidos moles. Coloque uma pequena bola de algodão de 1 a 1,5mm para acomodar a restauração provisória. Não coloque Opalescence Endo em tecidos orais. Se o contato ocorrer, enxágue imediatamente com água abundante. (Fig. 2)

6. Coloque um material de restauração provisória que não contenha eugenol para selar a abertura de acesso. Verifique a oclusão em movimento protusivos e laterais. O contato oclusal prematuro poderá fraturar a restauração provisória, resultando em fuga e perda do material de clareamento. (Fig. 3)

7. Repita o procedimento a cada período de 3 a 5 dias, até obter a alteração de cor pretendida.

NOTA: Aguarde de 8 a 10 dias antes de proceder a restauração do dente. Isso irá permitir que o tom do dente estabilize.

8. Remova o material de restauração provisória e o material de clareamento até o nível do material selante de ionômero de vidro. Enxágue e limpe a abertura do acesso. Restaure com procedimentos dentários adesivos.

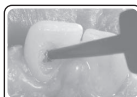


Fig. 2 – Aplique Opalescence Endo na câmara pulpar evitando os tecidos moles. Coloque uma pequena bola de algodão no gel. Deixe espaço suficiente para restauração provisória.



Fig. 3 – Aplique material temporário para selar a abertura do acesso. Repita o procedimento de clareamento a cada período de 3 a 5 dias, até obter a alteração de cor pretendida.

Precauções e advertências:

1. Um sobreclareamento é recomendado, já que poderá ocorrer uma pequena regressão de cor.
2. Entenda as expectativas de cada paciente antes de iniciar o tratamento.
3. O material não se destina a ser injetado.
4. Quando for armazenado pelo dentista, o material deverá ser refrigerado, se não em uso, para que se mantenha a vida útil.
5. Descarte as seringas vazias de forma adequada.
6. Mantenha fora do alcance de crianças.
7. Se o paciente tiver alergia conhecida ou sensibilidade química a peróxidos, calbopol, glicerina, etc. não utilize Opalescence Endo.

8. Mantenha Opalescence Endo afastado de tecidos moles.

9. Informe aos pacientes que é necessário ter cuidado e que não se deve engolir o gel. O produto contém peróxido; engolir grandes quantidades pode ser perigoso.

Contraindicações:

1. Pacientes com pulpite
2. Pacientes com sensibilidade ao peróxido de hidrogênio.
3. Como este é um produto oxidativo e que só é indicado para contato com a superfície dentária e não tecidos moles, o produto é contraindicado em pacientes com pulpite (alteração inflamatória do tecido conjuntivo pulpar).

Efeitos adversos: Como qualquer outro produto clareador à base de peróxidos, sempre há a possibilidade do paciente sentir sensibilidade. Caso o paciente tiver alguma alergia conhecida ou sensibilidade química a qualquer componente do produto, este não deverá ser utilizado.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:

- Conservar a temperatura de refrigeração, entre 2° e 8°C, quando não estiver em uso.
- Pode ser transportado também a temperatura ambiente.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descarte e utilize outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

Opalescence Endo quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança do produto e informações adicionais sobre a utilização de Opalescence Endo, visite www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.



VALIDADE



NÚMERO DO CATÁLOGO



NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



MANTER DISTÂNCIA DO
CALOR/LUZ SOLAR



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
RECOMENDADA. MANTER REFRIGERADO



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

ANVISA nº: 80279910019

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:

Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

51568.7 091221