

BR | Descrição: O sistema Omni-Matrix™ de peça única vem equipado com um mecanismo parafusável interno conectado a um cabo cônico que ajusta a circunferência da tira de matriz para que se adapte ao dente. As várias espessuras das tiras de matriz tornam sua colocação entre dentes justapostos uma tarefa simples. Sua cabeça articulada e patenteada é articulável e trava em posição, adaptando-se confortavelmente em dentes posteriores em qualquer quadrante da boca com um simples ajuste. Após o preenchimento e escultura, pode-se conseguir facilmente a remoção da tira de matriz com uma pequena torção do cabo contra o envoltório plástico, deixando o material restaurador perfeitamente adaptado a cavidade.

O sistema Omni Matrix™ apresenta as seguintes características:

- Baixo peso, para um maior conforto do paciente.
- Codificação por cor, para fácil identificação do tamanho da banda.
- Descartável, para prevenir contaminação.
- Tiras de matriz disponíveis em tamanhos variados.


Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.



Indicação de uso: O Sistema Omni-Matrix™ é um dispositivo médico desenvolvido para confinar os materiais restauradores dentro do preparo cavitário.

Instruções passo a passo:

Omni Matrix™ deve ser utilizado de acordo com a técnica adotada pelo profissional qualificado e devidamente treinado.

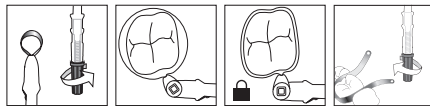

1. Abra a matriz. 2. Encaixe no dente. 3. Trave a matriz. 4. Remova a haste.

Precauções e advertências:

- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra.
- Produto de uso único. Deve ser descartado após o uso.
- Ao manipular o produto utilizar luvas descartáveis e tomar cuidados assépticos.
- Este produto contém níquel e não deve ser usado em pacientes com alergia a este material.
- Proibido reprocessar.

Condições de armazenamento, transporte e manipulação: Temperatura ambiente, em local protegido, longe de fontes de calor, luz solar direta e umidade.

Condições para descarte:

Descartar de acordo com a legislação local e governamental. Após sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Omni-Matrix™ quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.



Omni-Matrix™
ANVISA nº: 80279910037

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Detentor do registro, Fabricante e Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP - Brasil
CEP: 13340350
0800 773 5100
www.ultradent.com.br

ES! **Descripción:** El sistema Omni Matrix™ de una sola pieza está equipado con un mecanismo interno de rosca conectado a un mango cónico que ajusta la circunferencia de la tira de matriz para adaptarse al diente. Los diferentes espesores de las tiras de matriz hacen que colocarlas entre dientes adyacentes sea una tarea sencilla. Su cabezal articulado patentado es articulado y se bloquea en su posición, adaptándose cómodamente en dientes posteriores en cualquier cuadrante de la boca con un simple ajuste. Después de rellenar y esculpir, la extracción de la tira de matriz se puede lograr fácilmente girando suavemente el mango contra la envoltura de plástico, dejando el material restaurador llenando la cavidad.

El sistema Omni Matrix™ tiene las siguientes características:

- Bajo peso, para mayor comodidad del paciente.
- Codificación de colores para una fácil identificación del tamaño de la banda.
- Desechables, para evitar la contaminación.
- Tiras Matrix disponibles en diferentes tamaños.


Listado de materiales de soporte que acompañan al producto: El respectivo Manual de Instrucciones de Uso acompaña al producto.



Indicación de uso: El sistema Omni Matrix™ es un dispositivo médico desarrollado para confinar materiales de restauración dentro de la preparación de la cavidad.

Instrucciones de uso:

Omni Matrix™ debe utilizarse de acuerdo con la técnica adoptada por un profesional calificado y debidamente capacitado.

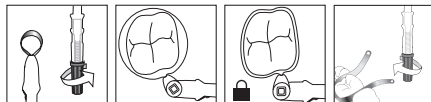

1. Abra la matriz. 2. Encajar en el diente. 3. Bloquee la matriz. 4. Retire el vástago.

Precauciones y advertencias:

- Utilice el producto únicamente si el embalaje está intacto.
- Producto de un solo uso. Debe desecharse después de su uso.
- Al manipular el producto, utilice guantes desechables y tenga cuidado de asepsia.
- Este producto contiene níquel y no debe utilizarse en pacientes alérgicos a este material.
- Prohibido reprocessar.

Condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación: Temperatura ambiente, en lugar protegido, alejado de fuentes de calor, luz solar directa y humedad.

Condiciones de eliminación:

Eliminar de acuerdo con la legislación local y gubernamental. Después de su uso, el producto debe desecharse en lugares designados para la eliminación de materiales dentales.

Requisitos esenciales para la seguridad y eficacia de los productos para la salud:

Omni Matrix™, cuando se utiliza para el propósito para el que fue diseñado y cuando lo manipula el dentista siguiendo las instrucciones de uso, no presenta ningún riesgo para el paciente ni para el dentista.

SOLO PARA USO PROFESIONAL.



PROHIBIDO REPROCESSAR



CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DE USO



SOLO PARA USO PROFESIONAL

Omni-Matrix™
ANVISA nº: 80279910037

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Titular del Registro, Fabricante y Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP - Brasil
CEP: 13340350
0800 773 5100
www.ultradent.com.br