



## エナメラストを塗布された患者様へ

製品の塗布後は歯に薄くフッ素のコーティングが残ります。

治療終了後には以下の点にご注意ください。

- 塗布後4～6時間は歯磨きやフロスを使用しないでください。
- 塗布後4～6時間は熱いもの硬いもの、粘性のある食事(飲料含む)は避けてください。
- 塗布後4～6時間はアルコールは控えてください。(アルコールを含む飲料やマウスウォッシュ等)
- 塗布後4日間は他のフッ素治療(エナメラスト含む)を受けしないでください。

口腔内のメンテナンスとしてエナメラストは3～6か月に1回塗布することをおすすめしています。

定期的な歯科医院での検診を受け、歯のメンテナンスを行いましょう。

---

歯科医院名

1009630AR01 021821

