

Opalescence™



Tooth Whitening Systems




**¡TODAS LAS SONRISAS,
ILUMINADAS!**

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

OPALESCENCE™ PF

10%, 15%, 20%, 35% Y 45%


PERÓXIDO DE CARBAMIDA CON NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO

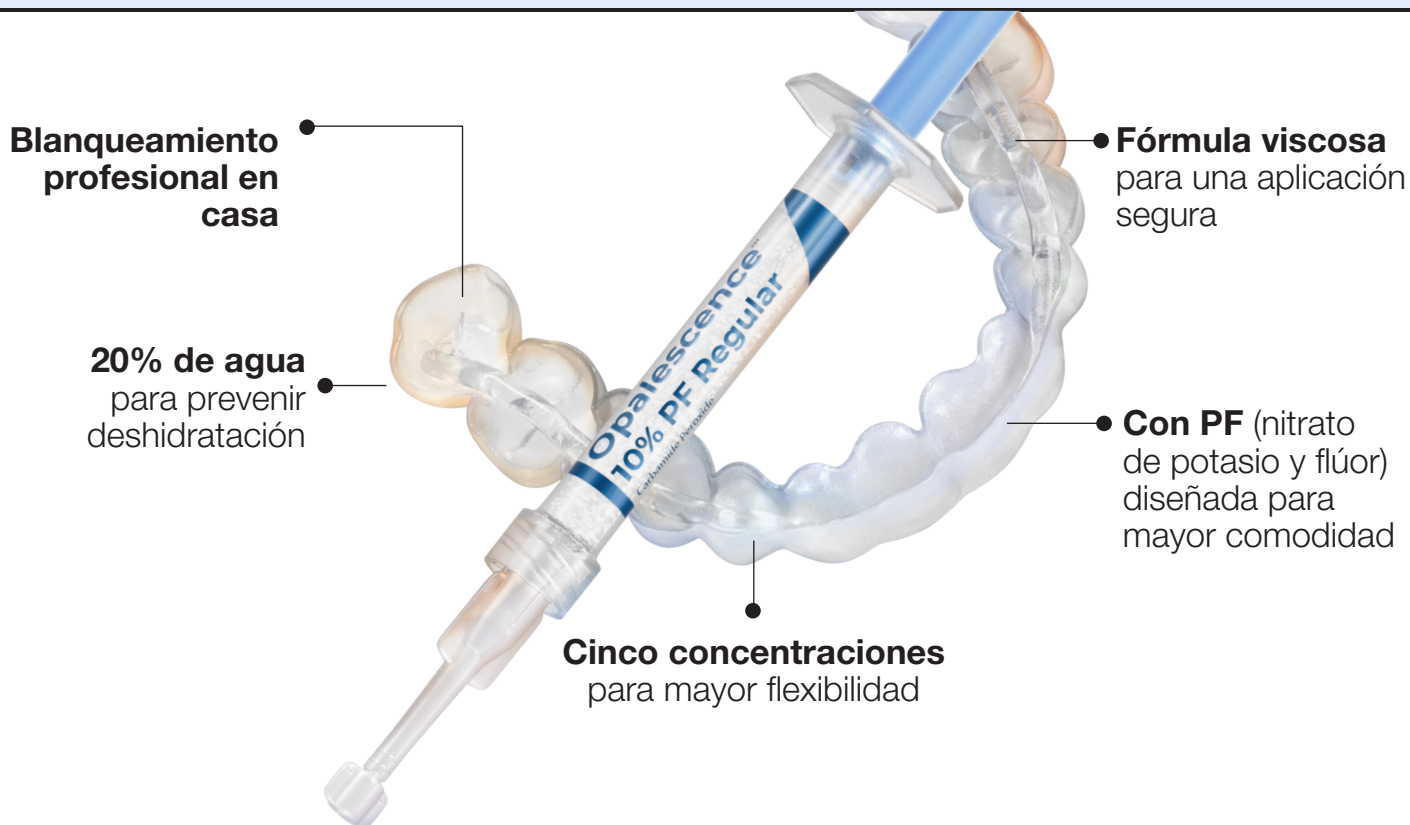

INSTRUCCIONES



CASO CLÍNICO

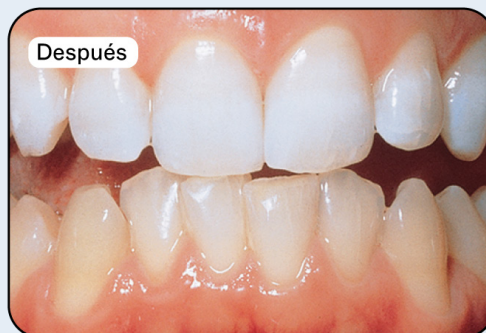

Resultado clínico con Opalescence™ PF después de 5 noches de uso.
Cortesía del Dr. Nixon.

OPALESCENCE™ GO

10% y 15%

BLANQUEAMIENTO DENTAL AMBULATORIO CON CUBETA UNIVERSAL PREDOSIFICADA

Cubeta UltraFit

ajuste cómodo y adaptable

Cobertura de molar a molar

Gel optimizado

para una limpieza rápida

Con PF (nitrato de potasio y flúor) diseñada para mayor comodidad

Cubetas precargadas,
listas para usar

INSTRUCCIONES



1. Saque el producto del envase.
"U" - Cubeta blanqueadora superior
"L" - Cubeta blanqueadora inferior



2. Coloque la cubeta superior sobre los dientes.



3. Muerda con firmeza, luego succione la cubeta durante 2 segundos.



4. Retire la cubeta exterior de color, dejando la bandeja interior blanca sobre los dientes. Repita el proceso con la cubeta inferior.



5. Tras el tiempo de uso indicado, retire las cubetas de blanqueamiento y cepílese los dientes.

TIEMPO DE USO

 10% 30- 60 min

 15% 15- 20 min

OPALESCENCE™ BOOST

BLANQUEAMIENTO DENTAL EN CONSULTORIO

• **No requiere luz** para su activación

• **Se activa químicamente**

• **Gel espeso** que evita escurrimientos


• **Aplicación** precisa y fácil remoción

• **Resultados visibles** en aproximadamente una hora




INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

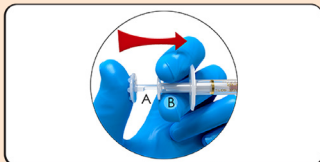

Asegure las jeringas y presione el émbolo transparente para activar.

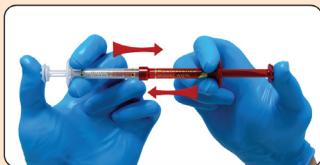

Active el gel mezclando las jeringas de un lado a otro 50 veces (25 por lado).



Colocar punta dispensadora y asegúrese de que el gel fluya correctamente.



Colocar retractor Umbrella™, aislar el campo operatorio.

APLICACIÓN



1 Colocar barrera gingival.



2 Fotopolimerizar la barrera gingival.



3 Aplicar una capa uniforme de 0.5 a 1 mm de Opalescence™ Boost y dejar actuar durante 20 minutos.



4 Remover el gel con un eyector de saliva. No enjuagar con agua. **Repetir una vez más el proceso.**

FINALIZACIÓN



5 Enjuagar suavemente con agua.



6 Retirar la barrera gingival.



7 Evaluar el tono final y los resultados del blanqueamiento.

Importante: Espere 7 a 10 días después del blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.

OPALESCENCE™ ENDO

BLANQUEAMIENTO ENDODÓNTICO

35% peróxido de hidrógeno

Diseñado para dientes no vitales


Fácil de colocar dentro de la cámara pulpar

Ideal para técnica walking bleach

Tratamiento de 1 a 5 días




INSTRUCCIONES

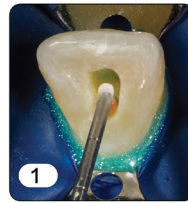

1 Retire de 2 a 3 mm de gutapercha por debajo de la encía sana y selle con una capa de 2 mm de ionómero de vidrio.




2 Aplique Opalescence™ Endo en la cámara pulpar.

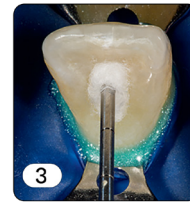


3 Coloque una torunda de algodón.



4 Cubra con UltraTemp™ y selle temporalmente.

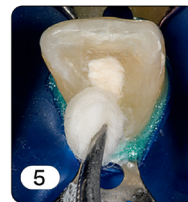

5 Retire el exceso antes del endurecimiento.

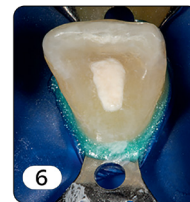

6 Repita cada 1-5 días hasta alcanzar el resultado deseado.

OPALUSTRE™

PASTA DE ABRASIÓN QUÍMICA Y MECÁNICA


Ayuda a eliminar manchas blancas y marrones

Tratamiento mínimamente invasivo para fluorosis

Abrasión suave con micropartículas de carburo de silicio

Resultados visibles en una cita


Tratamiento de 1 a 5 días

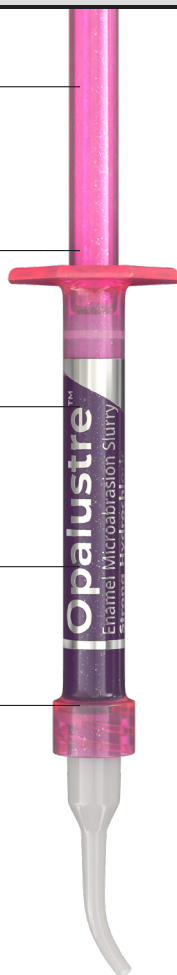

INSTRUCCIONES



1 Antes

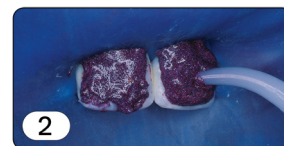


2 Aplique Opalustre sobre el esmalte descolorido.



3 Pula con OpalCups. Aspire, enjuague y repita si es necesario.



4 Resultado final tras la microabrasión y el tratamiento con Opalescence.

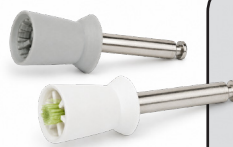

Las OpalCups son copas de pulido que se utilizan con Opalustre para el micropulido de la superficie del esmalte. Las OpalCups de cerdas son más agresivas para la reducción superficial, mientras que las OpalCups de acabado se emplean para el pulido final.

ULTRAEZ™


GEL DESENSIBILIZANTE CON NITRATO DE POTASIO Y FLÚOR

● **Alivio rápido** de la sensibilidad dental

● **Cubeta UltraFit™** para un ajuste cómodo

● **Con nitrato de potasio y flúor**

● **Ideal antes y después** del blanqueamiento

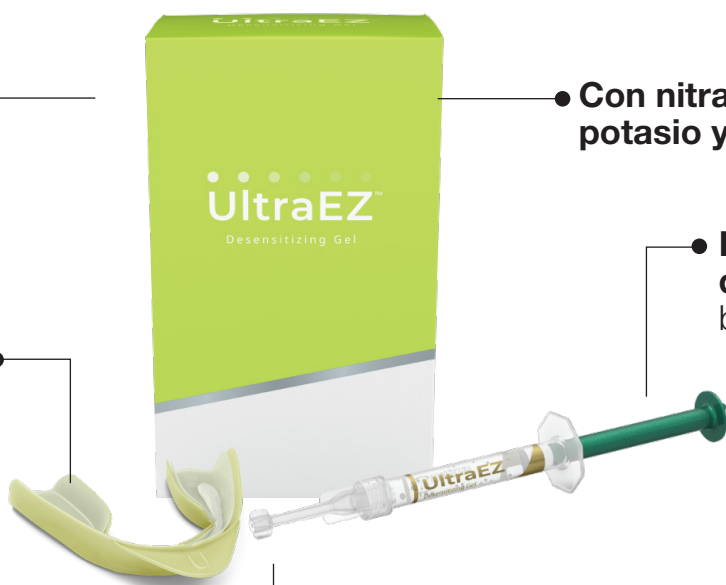

● **Disponible** en jeringas y cubetas precargadas

OPALESCENCE™ Whitening Toothpaste

PASTA DENTAL BLANQUEADORA OPALESCENCE

● **Ayuda a mantener el tono** post-blanqueamiento

● **Elimina manchas** superficiales

● **Bajo índice de abrasión** para un uso seguro sin daño al esmalte.

● **Alta retención de flúor** para mayor protección

● **Sabor refrescante a menta.** Uso diario.



Blanquea su sonrisa **2 tonos** en 2 semanas

PRODUCTOS ACCESORIOS


OpalDam™ Green

Barrera de resina fotopolimerizable

Sellado impermeable •
para mayor protección

Fácil de remover •

Aplicación directa •
y sencilla

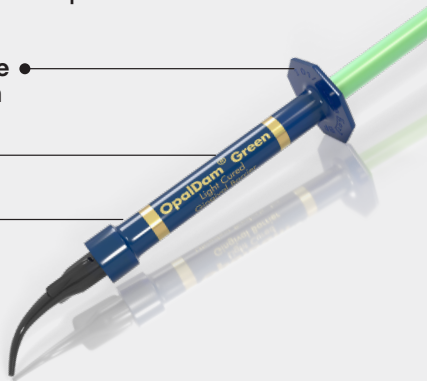

Ultradent™ LC Block-Out Resin

Resina block-out fotopolimerizable

Color azul para •
mayor visibilidad

Baja viscosidad •
para una aplicación
precisa

Resina versátil •
para múltiples usos



Umbrella™

Retractor de mejillas y labios

Retracción •
cómoda y estable


Ideal para •
múltiples
procedimientos
clínicos

Soporte para •
lengua, labios y
mejillas



¿Qué producto de blanqueamiento dental recomendar?

La familia de productos Opalescence™ ofrece una solución completa para diferentes estilos de vida y niveles de pigmentación dental.

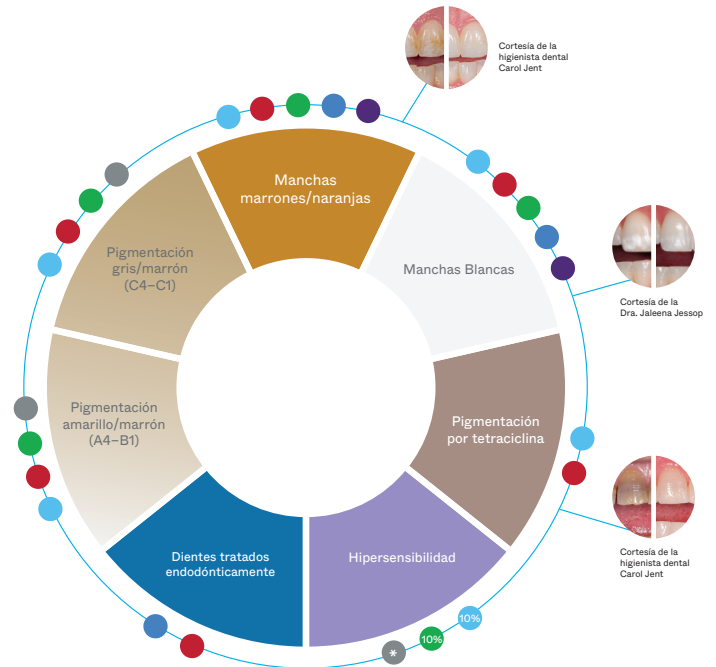

● Opalescence™ PF Blanqueamiento Dental para uso en casa

● Opalescence™ Boost Blanqueamiento dental en consultorio

● Opalescence Go™ Blanqueamiento dental listo para usar

● Opalescence™ Endo Gel de blanqueamiento para dientes no vitales

● Opalescence™ Whitening Toothpaste Pasta dental blanqueadora

● Opalustre™ Pasta para microabrasión química y mecánica



GUÍA DE REFERENCIA



Opalescence™ PF



Cubeta personalizada
(Requiere Impresión)

Opalescence™ PF 10%



Tiempo de uso:
8-10 horas al día



Sabores:
Menta, Melón, Regular

Agente Blanqueador:
10% peróxido de carbamida

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para pacientes con problemas de sensibilidad; se recomienda utilizarlo de día o de noche

Opalescence™ PF 15% y 20%



Tiempo de uso:
15%; 4-6; 20%; 2-4 horas al día



Sabores:
Menta, Melón, Regular

Agente Blanqueador:
Peróxido de carbamida al 15% y al 20%.

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para un blanqueamiento más rápido; se recomienda utilizarlo durante el día

Opalescence™ PF 35%



Tiempo de uso:
30-60 minutos al día



Sabores:
Menta, Melón, Regular

Agente blanqueador:
Peróxido de carbamida al 35%.

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para un tiempo de uso más corto y retoques

Opalescence™ Quick PF 45%



Tiempo de uso:
15-30 minutos



Flavors:
Mint

Agente blanqueador:
Peróxido de carbamida al 45%

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para tiempos de uso más cortos



UltraFit™ Cubeta precargada

Opalescence Go™ 10%



Tiempo de uso:
30-60 minutos al día



Sabores:
Menta y Melón

Agente de blanqueamiento:
10% peróxido de hidrógeno

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para un blanqueamiento rápido listo para usar; una alternativa a los productos de venta libre

Opalescence Go™ 15%



Tiempo de uso:
15-20 minutos al día



Sabores:
Menta

Agente de blanqueamiento:
15% peróxido de hidrógeno

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Para un blanqueamiento rápido listo para usar; una alternativa a los productos de venta libre



Aplicado en el consultorio

Opalescence™ Endo



Tiempo de uso:
1-5 días por aplicación

Agente blanqueador:
35% peróxido de hidrógeno

Uso:
Administrado por el dentista para el blanqueamiento interno de dientes tratados endodónticamente



Aplicado en el consultorio

Opalustre™ Microabrasión



Aplicación:
1 o más aplicaciones administradas por el odontólogo según sea necesario

Agente de remoción:
Ácido clorhídrico con partículas de carburo de silicona

Uso:
Tratamiento en consulta administrado por el odontólogo; elimina permanentemente las imperfecciones superficiales del esmalte



Aplicado en el consultorio

Opalescence™ Boost™

Opalescence™ Boost™



Aplicación:
De dos a tres aplicaciones de 20 minutos por visita administradas profesionalmente (no excedas más tres por visita)

Agente Blanqueador:
40% peróxido de hidrógeno

Contiene:
Nitrato de potasio y flúor

Uso:
Tratamiento rápido en la consulta, administrado por el odontólogo



UltraFit™ Cubeta precargada



Cubeta personalizada
(Requiere Impresión)



Tiempo de uso:
15-60 minutos al día



Sabores:
Regular

Agente desensibilizante:
3% nitrato de potasio, .25% NaF neutro

Uso:
Tratamiento para la sensibilidad



Escanee aquí

Regístrese al boletín de Ultradent y reciba contenido educativo, novedades, lanzamientos y promociones exclusivas.

f @UltradentLa

www.ultradent.lat

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.