


Aglhas gengivais Descartáveis (2101030)

BR | Descrição: As agulhas gengivais descartáveis NanoJect são estéreis (por óxido de etileno) e de uso único. São siliconadas, seu bisel triplo é cortado a laser (sem rebarbas) e são feitas de aço inoxidável altamente resistente. Possui marcador de bisel.

25mm x 0,3mm (30G) Curta



38mm x 0,4mm (27G) Longa

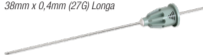




Indicação de Uso: Este produto é indicado para aplicação de anestésicos injetáveis.

Instruções de uso:

1. Gire as extremidades da cápsula até que o lacre se rompa. Não utilizar se o lacre estiver violado. Remova a capa menor (Fig. 1).
2. Remova a capa menor e rosqueie a agulha na seringa (Fig. 2).
3. Retire a proteção (Fig. 3).

Precauções e Advertências:

1. Este produto é de utilização única. Não deve ser reutilizado;
2. Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo;
3. Apenas para uso profissional;
4. O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.
5. Após o uso, o produto deve ser descartado em local próprio conforme legislação local, imediatamente após o uso, em recipientes apropriados e devidamente identificados.

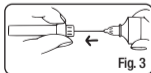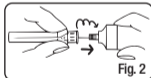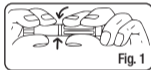

Armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto: Mantenha protegido de água, alta temperatura, alta umidade e luz solar direta. O produto deve ser armazenado em local seco e fresco.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: A agulha descartável NanoJect, quando utilizada para o fim a que foi projetada, e quando manuseada pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter informações adicionais sobre a utilização de NanoJect e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.**AS AGULHAS SÃO DE USO ÚNICO.**

VALIDADE

LOT

NÚMERO DO LOTE

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONALPROIBIDO
REPROCESSAR**STERILE EO**ESTERILIZADO COM
ÓXIDO DE ETILENO**ANVISA nº:** 80279910093**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572**Fabricado e embalado por:**

Misawa Medical Industry Co.Ltd. (Japão).

Distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121

Itaici – Indaiatuba – SP

CEP: 13340350

0800 773 5100 | www.ultradent.com.br

MP00251.1 261120