


Yerleştirme Rehberi

BAŞLANGIÇ



1.

Gerekli oklüzogingival yüksekliğe göre uygun bir matris bandı seçin. Presel kullanarak, matris bandı tırnağını kavrayın ve gerekiyorsa bükün, ardından restore edilecek dişe bakan konkav yüzeye interproksimal olarak yerleştirin.

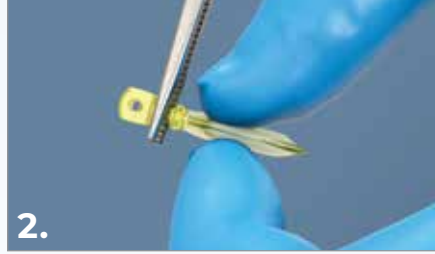

2.

Matris bandını preparasyonun gingival kısmına en iyi şekilde adapte eden kamayı seçin. Presel ile kamayı kavrayın.



3.

Kama yerleştirme sırasında matris bandına hafif parmak basıncı uygulayarak yerinden çıkmasını önleyebilirsiniz.



4.

Gerekirse, diş eti yüzey kenarına daha fazla uyum sağlamak için ek bir kama kullanılabilir.



5.

Yüzük forsepsini kullanarak Halo yüzüğünü dikkatlice yerleştirin.



6.

Yüzük, dişin her iki tarafında kama üzerinde duran çatal uçları ile mümkün olduğunca aşağıya yerleştirilmelidir.



7.

Matris bandının yüzey kenar marjlarına iyi adapte olduğundan ve matris bandının komşu diş ile sıkı kontak halinde olduğundan emin olmak için matris bandı, kama ve yüzük yerleşimini kontrol edin.

BITİŞ

