

HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM


Guide de positionnement

DEBUT



1.

Sélectionner la matrice appropriée basée sur la hauteur occlusion-gingivale requise. Utiliser la précelle pour saisir la languette de la matrice et la courber si nécessaire, puis placer la matrice dans l'espace interproximal en plaçant la partie concave face à la dent à restaurer.

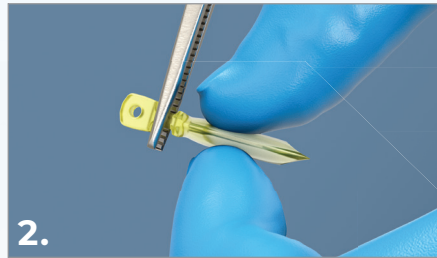

2.

Sélectionner le coin qui adapte le mieux la matrice à la partie gingivale de la préparation. Saisir le coin avec une précelle standard.




3.

Une faible pression digitale doit être appliquée sur la matrice pour l'empêcher d'être délogée lors de la mise en place du coin.



4.

Si nécessaire, un coin supplémentaire peut être utilisé pour permettre une meilleure adaptation au niveau de la surface gingivale de la préparation.

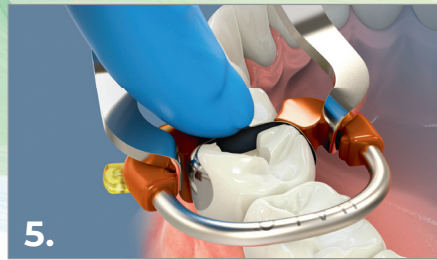

5.

Placer précautionneusement l'anneau Halo en utilisant la pince à anneaux.



6.

L'anneau doit être placé aussi bas que possible et en plaçant les extrémités de l'anneau à cheval sur le coin de part et d'autre de la dent.



7.

Vérifier la matrice, le coin et la position de l'anneau pour s'assurer que la matrice est bien adaptée aux limites de la préparation et que la matrice est en contact intime avec la dent adjacente.

FIN





4831 HALO KIT - Original

2 x anneaux universels
25 x Matrices originales
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm
25 x Coins de chaque taille *Petit*, *Medium* et *Large*

1 x Boîte Carousel HALO
1 x Précelle
1 x Pince à anneaux

4832 HALO INTRO KIT - Original

2 x anneaux universels
25 x Matrices originales
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm
25 x Coins de chaque taille *Petit*, *Medium* et *Large*
1 x Distributeur HALO

4833 HALO INTRO KIT - Matrices rigides anti adhésives

2 x anneaux universels
20 x Matrices originales
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm
25 x Coins de chaque taille *Petit*, *Medium* et *Large*
1 x Distributeur HALO

4835 HALO MINI KIT - Original

2 x anneaux universels
5 x Matrices originales
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm
5 x Coins de chaque taille *Petit*, *Medium* et *Large*
1 x Distributeur HALO

4834 HALO INTRO KIT - Matrices rigides

2 x anneaux universels
25 x Matrices originales
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm
25 x Coins de chaque taille *Petit*, *Medium* et *Large*
1 x Distributeur HALO

Matrices Originales Halo



Taille	50 unités	100 unités
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

Matrices Rigides Halo



Taille	50 unités	100 unités
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

Matrices Rigides anti adhésives Halo



Taille	50 unités	100 unités
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

Coins interdentaires HALO



Taille	100 unités
<i>Petit</i>	5042
<i>Medium</i>	5043
<i>Large</i>	5044

Anneaux HALO



Taille	1 unité	2 unités
Universel	5008	5009

5048 - HALO Tweezers 1 unité



5047 - HALO Forceps 1 unité

