



START

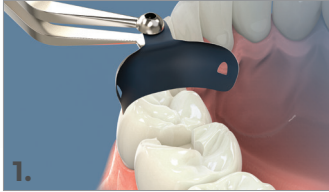


1.

Kies een matrixband die past bij de benodigde occlusogingivale hoogte. Pak het lipje van de matrixband vast met de pincet, buig deze naar wens en breng de matrixband approximaal aan, met de holle kant in de richting van het te restaureren gebitselament.

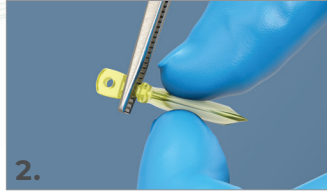


2.

Kies de wig waarmee de matrixband het best tegen het gingivale gedeelte van de preparatie komt te liggen. Pak de wig vast met een wattenpincet.

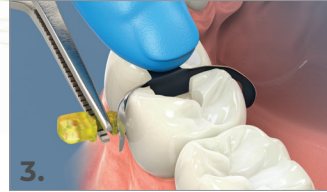


3.

Duw eventueel licht met een vinger tegen de matrixband, om te voorkomen dat hij tijdens het aanbrengen van de wig losraakt.

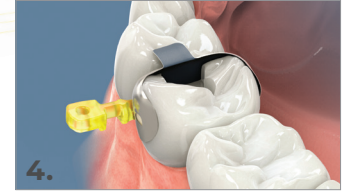

4.

Indien nodig kan er een extra wig worden gebruikt voor betere aansluiting op het gingivale oppervlak van de preparatie.

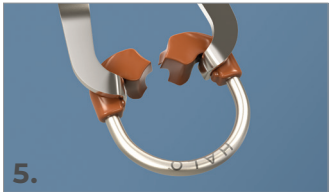


5.

Breng de Halo-ring voorzichtig aan met de ringtang.



6.

Breng de ring zo laag mogelijk aan. De klemmen van de ring moeten elk aan een kant van het gebitselament over de wig worden geplaatst.

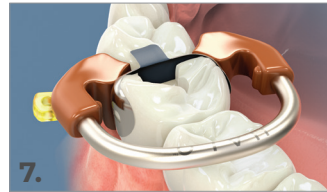

7.

Controleer of de matrixband, de wig en de ring goed geplaatst zijn: de matrixband moet goed tegen de randen van de preparatie zitten. Ook moet de band nauw contact maken met het buurelement.

AFWERKING

