



START

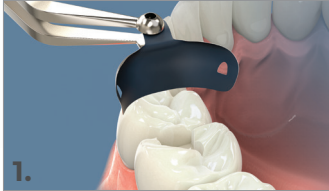


1.

Ein passendes Matrizenband entsprechend der benötigten okkluso-gingivalen Höhe wählen. Mit der Pinzette die Lasche des Matrizenbands greifen und soweit erforderlich biegen. Danach approximal platzieren. Die konkave Oberfläche zeigt dabei in Richtung des zu restaurierenden Zahns.

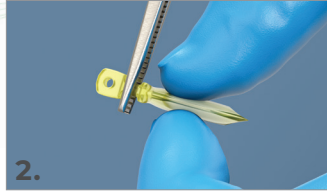


2.

Einen Keil auswählen, mit dem sich das Matrizenband möglichst optimal an den Gingivabereich der Präparation anpassen lässt. Keil mit einer gebogenen Pinzette greifen.

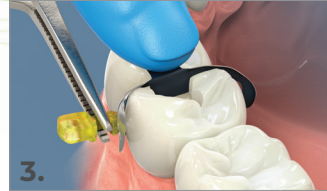


3.

Eventuell ist ein leichter Druck mit dem Finger auf das Matrizenband erforderlich, um es während der Platzierung des Keils in Position zu halten.

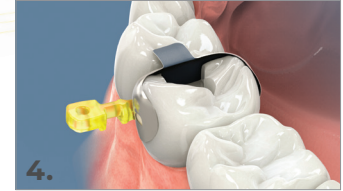

4.

Bei Bedarf kann ein weiterer Keil verwendet werden, um eine bessere Anpassung an den gingivalen Rand der Kavität zu erreichen.

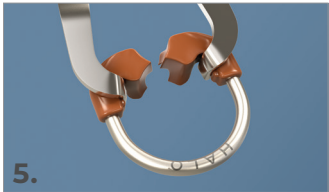


5.

Den Halo Ring vorsichtig mit der Ringzange platzieren.



6.

Der Ring sollte so tief wie möglich platziert werden. Die Füße der Ringenden sollten den Keil an jeder Zahnseite überspannen.

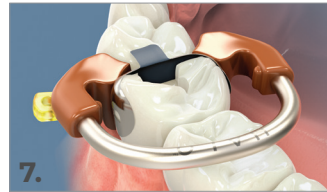

7.

Matrizenband, Keil und Ringposition überprüfen, um sicherzustellen, dass das Matrizenband gut an die Ränder der Kavität angepasst ist und eng am Nachbarzahn anliegt.

FERTIGSTELLUNG

