


COMENZAR



1.

Seleccione una banda matriz adecuada según la altura oclusogingival requerida. Usando pinzas, sujete la pestaña de la banda matriz y dóblela según sea necesario, luego colóquela interproximalmente con la superficie cóncava hacia el diente que se va a restaurar.

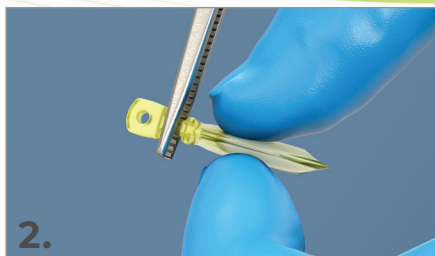


2.

Seleccione la cuña que mejor adapte la banda matriz a la porción gingival de la preparación. Sostenga la cuña con pinzas para algodón.




3.

Es posible que sea necesario aplicar una ligera presión con los dedos a la banda de la matriz para evitar que se desprenda durante la colocación de la cuña.

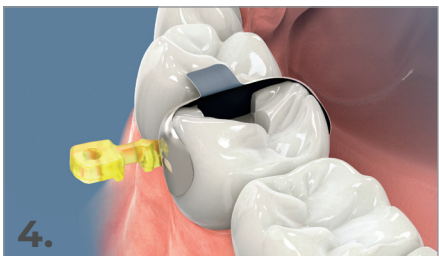

4.

Si es necesario, se puede utilizar una cuña adicional para proporcionar una mayor adaptación a la superficie gingival.

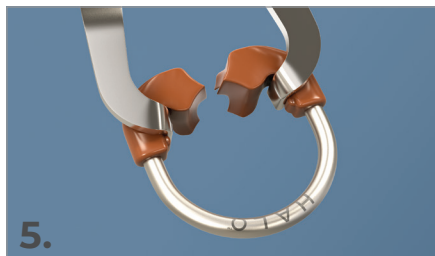

5.

Coloque cuidadosamente el anillo de Halo utilizando el fórceps de Halo.



6.

El anillo debe colocarse lo más bajo posible con los extremos de los dientes del anillo sobre la cuña a cada lado del diente.



7.

Verifique la colocación correcta de la matriz, la cuña y el anillo y asegúrese de que la banda matriz esté bien adaptada al margen cavo superficial y que la misma esté en contacto íntimo con el diente adyacente.

FINLAIZAR

