

一般医療機器

類別: 器 65 歯科用充填器

一般的名称: 歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名: **イリゲーターチップ**


【禁忌・禁止】

【使用方法】


- ・本品の改造や加工等を行わないこと。(改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため)
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

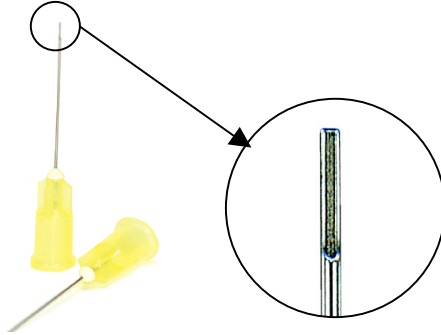

(ニードルキャップが取り付けられた状態)

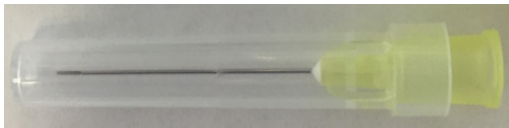

	構成名称	原材料
1	ハブ及びニードル	ポリプロピレン ステンレススチール
2	ニードルキャップ	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

使用方法(例)

1. シリンジのキャップをはずす。
2. チップに付属しているニードルキャップをはずす。
3. シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
4. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
5. 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。
- (4) 根尖を越えて材料を注入しないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合
 - ・破損、折損
 - ・動作不良

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

【製造業者】

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)