

BR | Descrição: Opalescence Boost é um gel clareador potente, à base de peróxido de hidrogênio. O processo de mistura exclusivo, de seringa para seringa, garante o produto novo em cada aplicação. Uma das seringas contém um componente quimicamente ativado de fluoreto de sódio e nitrato de potássio, que tem demonstrado reduzir a susceptibilidade do aparecimento de cáries, diminuir a sensibilidade e aumentar a microdureza do esmalte. A outra seringa contém peróxido de hidrogênio concentrado. Após ativação o gel deve apresentar coloração vermelha homogênea. Depois de misturado, o Opalescence Boost está pronto para o uso. OpalDam é uma resina única refletora de luz, de adesão passiva (selamento), fotopolimerizável. A sua base de metacrilatos foi concebida com força suficiente para manter uma barreira, porém, de fácil remoção de diastemas e concavidades.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:

Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Indicação de uso: O clareador Opalescence Boost é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado para clareamento de um ou mais dentes, partes de um dente e/ou para técnicas de clareamento acelerado em consultório. O Opalescence Boost é igualmente utilizado em dentes desvitalizados, incluindo clareamento intracoronário no consultório. É um método alternativo, conservador; para o tratamento de descolorações e manchas escuras no interior do dente (em comparação com coroas, facetas, etc), causadas por doenças, lesões ou tratamentos médicos, tal como fatores congênitos, sistêmicos, metabólicos, farmacológicos, traumáticos ou iatrogênicos, tais como fluorose dentária, icterícia, manchas por tetraciclina e minociclina no adulto, porfiria, traumatismo e eritroblastose fetal. OpalDam é utilizado para proteger o tecido mole adjacente ao dente durante o clareamento no consultório, microabrasão, etc.


Instruções de uso:

Procedimentos preliminares:

1. Limpe e pula os dentes.
2. Determine e registre o tom de base de referência. Utilize fotografias quando indicado para a documentação da base de referência.
3. Deixe o Opalescence Boost atingir a temperatura ambiente antes da mistura.
4. **AVISO: O paciente, o dentista e o assistente devem usar óculos de proteção, o dentista e assistente devem utilizar também luvas e jaleco durante a mistura e a aplicação deste produto.**

Isolamento – OpalDam (isolamento recomendado):

1. Coloque Ultradent Isoblock. (Fig. 1)
2. Retire a tampa do OpalDam e acople firmemente uma ponta aplicadora.
3. Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral.
4. Coloque os afastadores de lábio/bochechas.
5. Enxágue e seque bem os dentes, especialmente o terço gengival.
6. Esprema uma gota contínua de OpalDam ao longo da margem gengival, sobrepondo aproximadamente 0,5 mm sobre o esmalte. Comece e termine a gota no dente de trás do dente mais distal a ser clareado.
7. Continue a construir a barreira apicalmente até ter uma altura de 4 a 6 mm e uma espessura de 1,5 a 2,0mm. (Fig. 2)
8. Esprema a resina sobre o tecido lingual através de qualquer diastema aberto selando completamente e cobrindo a papila exposta.
9. Utilizando o espelho dentário, encontre o eixo longo dos dentes e reaplique a resina em todas as aberturas mínimas.

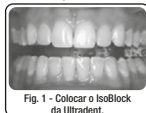




10. Fotopolimerize durante 20 segundos por arco utilizando um movimento de varrimento. Verifique cuidadosamente a polimerização da resina com um instrumento. (Fig.3)

Isolamento – Dique de borracha

1. Aplique o dique de borracha colocando grampos unidos bilateralmente num dente distalmente ao dente a ser clareado.
2. Antes de aplicar o dique de borracha à estrutura, aplique uma gota de selante de dique de borracha ou barreira de resina fotopolimerizada na margem gengival sob o dique.
3. Aplique o dique na estrutura e inverta o dique de borracha no bordo gengival. Verifique o selamento ótimo.

Misturar o Opalescence Boost:

1. Certifique-se de que as seringas vermelha e transparente estão unidas firmemente antes de continuar.
2. Pressione com força a haste pequena e transparente (A) para dentro do êmbolo transparente (B). Veja o passo completo na figura 1A. Depois pressione o êmbolo transparente (A/B) completamente na direção da seringa vermelha (C). (Fig. 4)
3. Pressione o êmbolo vermelho (C), levando todo o conteúdo para a seringa transparente (B). (Fig. 5)
4. Para ativar, pressione rapidamente as seringas para trás e para a frente com os polegares, pelo menos 50 vezes (25 vezes em cada direção/ lado). Carregue o químico misturado inteiro para dentro da seringa vermelha. (Fig.6)

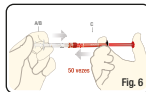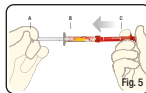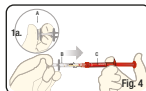


4. Remova e elimine a seringa transparente. (Fig.7)

5. Adapte a ponta aplicadora na seringa vermelha. Verifique o fluxo de material numa gaze de algodão ou bloco para mistura, afim de garantir a sua uniformidade antes da aplicação intra oral. **NÃO CONTINUE** se houver resistência. Fixe uma nova ponta e teste de novo antes de aplicar.

NOTA: O Opalescence Boost misturado (ativado) apresentará cor vermelha homogênea e pode ser utilizado até dez (10) dias após ativação, se tampado e refrigerado.

Aplicar o Opalescence Boost:

1. Verifique o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral sobre uma gaze ou disco de mistura. Em caso de resistência, substitua a ponta e verifique novamente.
2. Aplique uma camada de gel com 0,5 a 1,0 mm de espessura na superfície labial do dente e ligeiramente sobre as superfícies incisal/oclusal.
3. Deixe o gel permanecer nos dentes durante 20 minutos, verifique periodicamente e reaplique nas áreas que diminuíram de espessura ou que necessitam de reenchimento.
4. Aspire o gel dos dentes utilizando o adaptador de sucção Luer Vacuum e uma ponta de aspiração cirúrgica. Não utilize água durante a aspiração do gel para evitar salpicos de gel. Proceda com precaução para não deslocar a barreira de isolamento ou o selante do dique de borracha. (Fig.8)
5. Avalie a mudança da tonalidade após cada aplicação e monitore o paciente quanto ao aparecimento de sensibilidade e irritação. Se ocorrer sensibilidade do dente ou irritação

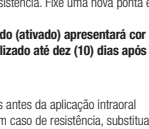

dos tecidos moles continuada, descontinue a utilização.


6. Repita os passos 2-5 duas vezes ou até atingir os resultados pretendidos. Não exceda 3 aplicações por consulta.
7. Se for pretendido um clareamento adicional e não for observada nenhuma sensibilidade dentária significativa, agende o paciente para repetir o tratamento dentro de 3 a 5 dias.

Limpeza:

1. Aspire o gel dos dentes utilizando a Luer Vacuum e uma ponta cirúrgica e depois enxágue abundantemente os dentes com spray de ar/água e a aspiração de elevado volume. (Fig.9)
2. Utilizando um instrumento dentário deslize cuidadosamente a ponta para baixo do OpalDam e levante. Verifique e retire quaisquer resíduos interproximais.
3. Se utilizar um dique de borracha, siga o Passo 1 de Limpeza, retire os grampos, o dique e a estrutura.
4. Retire o selante do dique de borracha com uma espátula, escova suave, fio dental, aspiração e spray de ar/água estável.

NOTAS:

- É possível clarear um único dente, vários dentes ou uma parte de um dente utilizando estas mesmas instruções e aplicando o clareador apenas nas áreas específicas a tratar.
- No caso de sensibilidade pós-operatória, utilize produtos à base de nitrato de potássio, tal como UltraEZ, imediatamente após o tratamento durante 20 minutos a 1 hora por dia até a sensibilidade desaparecer.
- Para um clareamento estético adicional, aguarde 24 - 48 horas após o tratamento com Boost antes de iniciar um sistema de clareamento de uso doméstico, tal como o gel de clareador dentário Opalescence GO.
- Não é recomendável proceder ao ataque ácido do esmalte antes de procedimentos de clareamento pois o mesmo não potencializa o processo de clareamento.

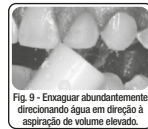

Dentes com tratamento endodôntico:

1. Verifique a radiografia quanto à altura da crista alveolar.
2. Retire completamente todo o cimento da câmara pulpar.
3. Coloque um cimento de ionômero de vidro ou ionômero de vidro resino-modificado com 1 a 2 mm no assoalho pulpar ou coronariamente à altura da crista alveolar. O cimento deve ser suficientemente espesso para selar completamente os orifícios e o material de obturação.
4. Siga as instruções "Isolamento" ao lado isolando os lados labial e lingual do dente.
5. Siga as instruções "Misturar" ao lado.
6. Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral.
7. Esprema para a abertura de acesso e a superfície labial.
8. Deixe o gel permanecer 10 minutos no dente.
9. Aspire o gel da abertura de acesso e do dente utilizando a adaptador Luer Vacuum e uma ponta de aspiração cirúrgica. Não utilize água durante a aspiração do gel para evitar salpicos de gel. Proceda com precaução para não deslocar a barreira de isolamento ou o selante do dique de borracha.
10. Quando já não houver gel visível, enxágue ligeiramente e seque com ar. Proceda com precaução para não deslocar a barreira de isolamento ou o selante do dique de borracha.
11. Avalie a alteração de tonalidade e repita os passos 7 a 10.
12. Se não obter os resultados pretendidos após 3 aplicações, descontinue o tratamento.
13. Siga as instruções "Limpeza" para remover as barreiras gengivais.
14. Sele o acesso com um material restaurador temporário não contendo eugenol.
15. Aguarde 2 semanas antes da adesão final ou da colocação da restauração estética.

NOTAS:

- Se pretender um branqueamento adicional, recomenda-se o clareamento ambulatorio Opalescence Endo.
- A regressão do branqueamento deve ser esperada. Compense clareando o dente ligeiramente em excesso.

Precauções e advertências:

1. Dentistas e pacientes devem usar óculos com proteção lateral durante a mistura e aplicação de Opalescence Boost.
2. Ler atentamente e compreender as fichas de segurança e todas as instruções antes da utilização.
3. Deixar as seringas atingirem a temperatura ambiente antes da mistura.
4. Verificar o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Se a resistência continuar, NÃO utilizar essa seringa e contatar o Serviço de Apoio ao Cliente Ultradent para substituição.
5. Manter fora do alcance das crianças.
6. Usar luvas de proteção, jaleco e óculos de proteção durante o manuseio deste produto.
7. Antes da utilização deste produto deverá ser confirmada a saúde gengival e oral.
8. Antes de descartar as seringas, aspirar água para dentro da seringa para diluir e remover todos os resíduos de gel clareador. Descartar o líquido para dentro de um dreno ou vaso sanitário seguido de 2-3 litros de água. NÃO descartar as seringas em recipientes de lixo contendo materiais inflamáveis (produtos de papel, borracha, etc.), dado poder resultar em combustão instantânea. Enxaguar as gazes utilizadas com água.
9. Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a peróxidos, glicóis, acrilatos ou outras resinas. Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea, consultar um médico.
10. Terminar todos os tratamentos restauradores antes do tratamento.
11. Se ocorrem bolhas ao longo da margem do OpalDam, enxaguar o gel e verificar a presença de escapes. Secar ligeiramente a área e reaplicar o OpalDam. Se o problema persistir, remover a barreira e reaplicar.
12. Cobrir todas as áreas sensíveis da dentina exposta.
13. As áreas de hipocalcificação, apesar de não serem visíveis clinicamente, poderão existir e irão clarear mais rapidamente que o esmalte circundante. À medida que o paciente continua a clarear, as áreas começarão a harmonizar-se.

14. O material não se destina a ser injetado.
15. Refrigerar o produto quando não se encontra em utilização.
16. Manter o produto fora do calor e/ou da luz solar diretos.
17. O gel misturado (ativado) pode ser armazenado e utilizado dentro de 10 dias após ativação, se tampado e refrigerado. Entre utilizações unir novamente as seringas e desinfetar limpando a seringa com um desinfetante de nível intermediário.
18. Eliminar as pontas e a seringa de forma adequada.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:

Temperatura de armazenamento recomendada: 2-27°C.
Manter o produto fora do calor e/ou da luz solar direta.

Condições para descarte: Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

Opalescence Boost quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter a fichas de segurança do produto e informações adicionais sobre a utilização de Opalescence Boost e OpalDam, visite www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO.



VALIDADE



NÚMERO DO LOTE



NÚMERO DO CATÁLOGO



VER INSTRUÇÕES PARA USO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
RECOMENDADA.



VENDA SOB
PRESCRIÇÃO



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



RISCO À SAÚDE



CORROSIVO



OXIDANTE



PROIBIDO REPROCESSAR



USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO

ANVISA nº: 80279910060

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

MP00138.4 150620