

**BR | Descrição:** O gel dessensibilizante UltraEZ™ é um gel adesivo viscoso único, de liberação controlada, 3% de nitrato de potássio e ion de fluoreto 0,11% por peso. O gel UltraEZ™ foi desenvolvido para ser usado numa moldeira personalizada descartável. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar.

**Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:** Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

**Indicação de uso:** O gel dessensibilizante UltraEZ™ fornece uma camada semelhante a um filme para dentes sensíveis, selando os túbulos dentinários da dentina exposta e outras áreas onde a sensibilidade é uma preocupação. O produto é utilizado por profissionais dentistas no consultório ou entregue ao paciente para o tratamento caseiro da sensibilidade dentinária.

#### Instruções de uso:

##### Seringa de aplicação de 1,2 ml.

##### Utilização - Moldeira personalizada / Alinhador

1. Confeccione a moldeira de acordo com as arcadas do paciente. Se o paciente já tiver uma moldeira de clareamento personalizada, o gel UltraEZ™ pode ser carregado e usado nessa moldeira.
2. O gel UltraEZ™ é aplicado com seringas de dose unitária de 1,2 ml. Um arco completo deve usar aproximadamente 1/3 a 1/2 do conteúdo de uma seringa. Se estiver utilizando uma moldeira ou alinhador personalizado, para tratar a sensibilidade localizada, coloque o gel na(s) área(s) afetada(s) e uma pequena quantidade do gel na região do molar para segurar a moldeira no lugar.
3. A duração e o número de vezes que a moldeira é utilizada depende das condições do paciente e da recomendação do dentista. Os tempos de tratamento podem variar de 15 minutos a 1 hora ou o que o dentista considerar apropriado.

#### Limpeza - Moldeira personalizada / Alinhador

Imediatamente após a remoção da moldeira o paciente deve escovar e lavar os dentes com água para remover todo o gel restante. NÃO engolir a solução durante a lavagem. Lave a moldeira ou alinhador personalizado e guarde em uma caixa própria para armazenamento de moldeiras. Em cada aplicação deve ser utilizado um novo gel.

#### Precauções e advertências:

- Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e contate o dentista responsável.
- Manter sempre afastado do calor e/ou luz solar.
- O material em excesso na inserção e os resíduos após a remoção devem ser retirados com uma escova e enxaguados: NÃO engolir.

#### Contraindicações:

- Não se destina à utilização em mulheres grávidas ou que estejam amamentando.
- Não se destina a pacientes que possam engolir ou aspirar a moldeira.
- Não se destina ao uso em pacientes com menos de 6 anos sem consultar o seu dentista.
- Para pacientes com problemas de alergia, consulte o documento alergênico do produto disponível em [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br). Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

**Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:** UltraEZ™ quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

**Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:** Mantenha sempre longe do calor e/ou luz solar. Temperatura de armazenamento recomendada: 2° a 27°C.

#### Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

**NOTA:** Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de UltraEZ™ e de outros produtos relacionados, visite [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br).

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.**



PROIBIDO  
REPROCESSAR



SOMENTE PARA  
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES  
PARA UTILIZAÇÃO



MANTER FORA DO  
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO  
ACONSELHADA (2°C A 27°C)

#### UltraEZ™

ANVISA nº: 80279910007

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Detentor do registro,  
Fabricante e Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
CNPJ: 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaiatuba – SP, Brasil  
CEP: 13340350  
0800 773 5100  
[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)

**ES| Descripción:** El gel desensibilizante UltraEZ™ es un gel adhesivo viscoso único de liberación controlada, con 3 % de nitrato de potasio y 0,11 % de iones de fluoruro en peso. El gel UltraEZ™ está diseñado para usarse en una cubeta desechable personalizada. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones e información en la SDS antes de su uso.

**Lista de materiales de apoyo que acompañan al producto:** El producto incluye su respectivo Manual de Instrucciones de uso.

**Indicación de uso:** UltraEZ™ Desensibilizante Gel proporciona una capa similar a una película para dientes sensibles, sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y otras áreas donde la sensibilidad es un problema. El producto es utilizado por dentistas profesionales en el consultorio o entregado al paciente para el tratamiento en el hogar de la sensibilidad dentinaria.

#### Instrucciones de uso:

##### Jeringa de aplicación de 1,2 ml.

##### Uso: cubeta personalizada/alineador

1. Hacer la cubeta de acuerdo a las arcadas del paciente. Si el paciente ya tiene una cubeta de blanqueamiento personalizada, el gel UltraEZ™ se puede cargar y usar en esa cubeta.
2. El gel UltraEZ™ se aplica con jeringas monodosis de 1,2 ml. Un arco completo debe usar aproximadamente 1/3 a 1/2 del contenido de una jeringa. Si usa una cubeta personalizada o un alineador, para tratar la sensibilidad localizada, coloque el gel en las áreas afectadas y una pequeña cantidad de gel en la región molar para mantener la cubeta en su lugar.
3. La duración y el número de usos de la cubeta depende del estado del paciente y de la recomendación del odontólogo. Los tiempos de tratamiento pueden variar de 15 minutos a 1 hora o lo que el dentista considere apropiado.

#### Limpieza - Cubeta personalizada / Alineador

Inmediatamente después de retirar la cubeta, el paciente debe cepillarse y enjuagarse los dientes con agua para eliminar cualquier resto de gel. NO trague la solución mientras enjuaga. Lave la cubeta o el alineador personalizado y guárdelo en una caja de almacenamiento de cubetas. Se debe utilizar un nuevo gel para cada aplicación.

#### Precauciones y advertencias:

- Si ocurre algún problema, suspenda el tratamiento y contacte al dentista responsable.
- Mantener siempre alejado del calor y/o la luz solar.
- Se debe eliminar el exceso de material en la inserción y los residuos después de la extracción con un cepillo y enjuagado: NO ingerir.

#### Contra indicaciones:

- No está diseñado para usarse en mujeres embarazadas o lactantes.
- No está diseñado para pacientes que podrían tragar o aspirar la cubeta.
- No está diseñado para usarse en pacientes menores de 6 años sin consultar a su dentista.
- Para pacientes con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br) Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y solicite al paciente que consulte a su doctor.

#### Requisitos Esenciales para la Seguridad y Eficacia de los Productos de Salud:

UltraEZ™ cuando se usa para el propósito para el cual fue diseñado y cuando es manipulado por el dentista siguiendo las instrucciones de uso, no representa ningún riesgo para el paciente o el dentista.

**Condiciones de almacenamiento, transporte y/o manipulación:** Mantener siempre alejado del calor y/o la luz solar. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2° a 27°C.

#### Condiciones para la eliminación:

- Si se viola el embalaje, no utilice el producto. Deseche y use otro que tenga el empaque intacto.
- Después de su uso, el producto debe ser desechado en lugares adecuados para la eliminación de materiales dentales.

**NOTA:** Para Hojas de Datos de Seguridad e información adicional sobre el uso de UltraEZ™ y otros productos relacionados, visite [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br).

**SOLO PARA USO PROFESIONAL.**



PROHIBIDO  
REPROCESAR



SOLO PARA USO  
PROFESIONAL



CONSULTA LAS INSTRUCCIONES  
DE USO



MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS



TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO  
RECOMENDADA (2° A 27°C)

#### UltraEZ™

ANVISA nº: 80279910007

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



#### Titular del Registro, Fabricante y Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
CNPJ: 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaiatuba – SP, Brasil  
CEP: 13340350  
0800 773 5100  
[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)