

**BR | Descrição:** O gel dessensibilizante UltraEZ™ é um gel adesivo viscoso único, de liberação controlada, 3% de nitrato de potássio e íon de fluoreto 0,11% por peso. O gel UltraEZ™ foi desenvolvido para ser usado numa moldeira personalizada descartável. Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar.

**Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:** Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

**Indicação de uso:** O gel dessensibilizante UltraEZ™ fornece uma camada semelhante a um filme para dentes sensíveis, selando os túbulos dentinários da dentina exposta e outras áreas onde a sensibilidade é uma preocupação. O produto é utilizado por profissionais dentistas no consultório ou entregue ao paciente para o tratamento caseiro da sensibilidade dentinária.

#### Instruções de uso:

##### Seringa de aplicação de 1,2 ml.

##### Utilização - Moldeira personalizada / Alinhador

**1.** Confeccione a moldeira de acordo com as arcadas do paciente. Se o paciente já tiver uma moldeira de clareamento personalizada, o gel UltraEZ™ pode ser carregado e usado nessa moldeira.

**2.** O gel UltraEZ™ é aplicado com seringas de dose unitária de 1,2 ml. Um arco completo deve usar aproximadamente 1/3 a 1/2 do conteúdo de uma seringa. Se estiver utilizando uma moldeira ou alinhador personalizado, para tratar a sensibilidade localizada, coloque o gel na(s) área(s) afetada(s) e uma pequena quantidade do gel na região do molar para segurar a moldeira no lugar.

**3.** A duração e o número de vezes que a moldeira é utilizada depende das condições do paciente e da recomendação do dentista. Os tempos de tratamento podem variar de 15 minutos a 1 hora ou o que o dentista considerar apropriado.

#### Limpeza - Moldeira personalizada / Alinhador

Imediatamente após a remoção da moldeira o paciente deve escovar e lavar os dentes com água para remover todo o gel restante. NÃO engolir a solução durante a lavagem. Lave a moldeira ou alinhador personalizado e guarde em uma caixa própria para armazenamento de moldeiras. Em cada aplicação deve ser utilizado um novo gel.

#### Precauções e advertências:

- Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e contate o dentista responsável.
- Manter sempre afastado do calor e/ou luz solar.
- O material em excesso na inserção e os resíduos após a remoção devem ser retirados. Não engolir.

#### Contraindicações:

- Não se destina à utilização em mulheres grávidas ou que estejam amamentando.
- Não se destina a pacientes que possam engolir ou aspirar a moldeira.
- Não se destina ao uso em pacientes com menos de 6 anos sem consultar o seu dentista.
- Para pacientes com problemas de alergia, consulte o documento alergênico do produto disponível em [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu dentista.

#### Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: UltraEZ™

quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

**Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:** Mantenha sempre longe do calor e/ou luz solar. Temperatura de armazenamento recomendada: 2° a 27°C.

#### Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

**NOTA:** Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de UltraEZ™ e de outros produtos relacionados, visite [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br).

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.**



VALIDADE

**REF**

NÚMERO DO CATÁLOGO

**LOT**

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO  
REPROCESSAR

**R<sub>x</sub>**

SOMENTE PARA  
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES  
PARA UTILIZAÇÃO



MANTER FORA DO  
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO  
ACONSELHADA (2°C A 27°C)

**ANVISA nº:** 80279910007

**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa

**CRQ/ SP nº:** 04261572



**Fabricado por:**

Ultradent Products Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
CNPJ: 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaiatuba – SP  
CEP: 13340350  
0800 773 5100

**Detentor do registro e**

**Distribuidor:**

Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaiatuba – SP  
CEP: 13340350  
**[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)**

51572.9 200323

2/2