

ULTRADENT Consepis™ Scrub

Antisséptico para preparo de cavidades (2101393)

BR | Descrição: Consepis Scrub é uma pasta antisséptica a base de gluconato de clorexidina a 2,0% (em relação ao componente líquido) levemente aromatizada.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e pode acompanhar também o produto pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2mL



Seringa IndiSpense contendo 30mL



Indicação de Uso: Consepis Scrub é utilizado para a remoção do cimento temporário antes da cimentação definitiva e/ou para a limpeza dos desbris do preparo simultaneamente à sua desinfecção, em apenas uma operação.

Instruções de uso:

Para seringa de 1,2mL:

1. Remova o fecho Luer Lock da seringa.
2. Adapte firmemente uma ponta de aplicação descartável na seringa de Consepis Scrub. Utilize uma ponta de aplicação White Mac™ Tip para aplicação na coroa. Utilize NaviTip® 29ga para entrega no canal.
3. Para obter um melhor controle, segure a seringa com o êmbolo apoiado na palma da mão, ao invés da maneira convencional com o polegar sobre o êmbolo (Fig. 1).

Para seringa IndiSpense 30mL:

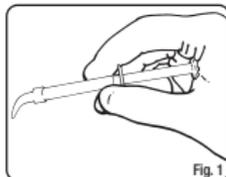


Fig. 1

1. Uma seringa de dose unitária pré-etiquetada deve ser conectada à seringa grande IndiSpense por meio do fecho Luer Lock, certificando-se de que estejam firmemente adaptadas (Fig. 2).

2. Pressione o êmbolo da seringa IndiSpense com a palma da mão (Fig. 2), enquanto a dose unitária é estabilizada pela palma da outra mão não-dominante. Gentilmente puxe o êmbolo da seringa de dose unitária para facilitar o carregamento. Não devolva o conteúdo da seringa de dose unitária de volta à seringa IndiSpense. Para prevenir contaminação cruzada, uma seringa usada não deve ser readaptada à seringa IndiSpense.

3. Coloque a tampa na seringa de dose unitária caso ela não seja utilizada imediatamente.

4. Antes do uso, adapte firmemente a ponta de aplicação recomendada na seringa de dose unitária.



Fig. 2 - Pressione o êmbolo da seringa IndiSpense e carregue a seringa de dose unitária até o nível desejado.

Procedimento:

1. Antes da cimentação definitiva, limpe totalmente o preparo com Consepis Scrub. Recomendamos a aplicação do produto com uma escova para a limpeza de sulcos profundos nas superfícies dentais (Fig.3).
2. Aplique Consepis Scrub diretamente sobre uma taça de polimento ou adapte uma ponta de aplicação White Mac Tip na seringa do produto e aplique Consepis Scrub diretamente sobre o preparo (Veja as figuras Figs. 4 e 5).

Nota: Caso o paciente não esteja anestesiado, mantenha a seringa de Consepis Scrub sob água morna por 10 segundos para que a temperatura do material fique próxima à temperatura corporal.

3. Cimente a coroa, inlay, etc. após o enxágue do preparo e a remoção do excesso de água. Tome cuidado para evitar contaminação por saliva antes da cimentação.

NOTA: Para preparos de amálgama ou resina composta, entre outros, trate as superfícies da mesma maneira que para a cimentação de coroas provisórias. Se necessário aplique uma base forradora de dentina (recomenda-se o uso de Ultra-Blend plus).



Fig. 3 - Aplique com uma escova de polimento em baixa velocidade para remover o cimento temporário residual.



Fig. 4 - Aplique o Consepsis Scrub diretamente sobre o dente com uma ponta White Mac Tip ou sobre uma taça de borracha com ou sem a ponta.



Fig. 5 - Desinfecte e limpe em apenas uma operação. Remova todo o cimento temporário, impurezas, etc, antes da cimentação final.

Precauções e advertências:

1. As pontas de aplicação são descartáveis; não as reutilize.
2. NÃO permita que o produto seja ingerido. Recolha o material extravasado utilizando as técnicas de sucção apropriadas.
3. NÃO utilize este produto em pacientes com histórico conhecido de sensibilidade à clorexidina.
4. Utilize barreiras de proteção higiênicas para prevenir a contaminação cruzada.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Consepsis Scrub quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Consepsis Scrub e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.



VALIDIDADE

REF

NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO REPROCESSAR



SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ACONSELHADA (18°C A 27°C)



CUIDADO



CORROSIVO



INFLAMÁVEL



RISCOS AO MEIO AMBIENTE

ANVISA nº: 80279910055

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNP.J: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaítuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

MP00133.3 241121