

BR | Descrição: O selante de compósito PermaSeal™ é uma resina fotopolimerizável à base de metacrilato não carregada, projetada para ser polimerizada em um filme muito fino e com uma das mais finas camadas de inibição por oxigênio conhecidas. Use para selar restaurações novas ou pré-existentes com compósitos ou provisórias à base de meta-acrilatos.

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de utilizar.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e pode acompanhar também o produto pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de uso: O selante PermaSeal™ penetra e sela fissuras e porosidades superficiais em restaurações de resina composta. Durante os processos de acabamento e o polimento do compósito, defeitos microscópicos na superfície podem surgir, resultando em perda precoce do compósito, interpretada clinicamente como desgaste. O selante PermaSeal™, aplicado durante a confecção da restauração e depois anualmente, pode melhorar a integridade marginal das restaurações de resina, preenchendo fissuras microscópicas na superfície desses compósitos.

Instruções de Uso:

Preparação:

1. Retire a tampa Luer Lock da seringa.
2. Adapte a ponta de aplicação recomendada à seringa.
3. Verifique o fluxo, a cor e a consistência do material antes de fazer a aplicação intraoral. Se houver resistência, substitua a ponta e tente novamente.
4. Isole o dente ou os dentes que serão selados.

Utilização - Novas restaurações:

1. Faça o contorno da restauração de compósito, com acabamento e polimento até a textura superficial desejada. Ajuste a oclusão conforme necessário.
2. Limpe a restauração e certifique-se de ter removido as marcações de contatos oclusais realizadas pelo papel articular. Faça o condicionamento ácido em todas as superfícies do compósito a serem seladas e nas superfícies adjacentes dos dentes durante 5 segundos com ácido fosfórico a 35% e, em seguida, enxague e seque completamente.
3. Aplique uma fina camada de selante PermaSeal™ na superfície do compósito e do esmalte adjacente.
4. Afine cuidadosamente com ar. Polimerize o selante PermaSeal™ durante 10 segundos.
5. Avalie a oclusão e ajuste se necessário.

Utilização - Restaurações realizadas previamente:

1. Limpe as superfícies e margens a serem seladas completamente com a pasta Con-sepsis™ Scrub, um micro-condicionador ou asperize a superfície da restauração com uma broca, disco de lixa ou borracha diamantada e enxague completamente.
2. Condicione o esmalte imediatamente adjacente à restauração e todas as superfícies de compósito acessíveis com ácido fosfórico a 35% durante 15 segundos. Caso a etapa um não seja realizada, faça o condicionamento ácido do esmalte durante 30 segundos.
3. Conclua as etapas 3 a 5 de Novas restaurações para selamento.

Advertências e Precauções:

1. As resinas podem ser sensibilizantes.
2. Tome cuidado para não aderir restaurações adjacentes.
3. Lembre-se de estabelecer o isolamento adequado antes de usar o selante PermaSeal™. Um campo limpo e seco é fundamental para uma ótima adesão da resina.
4. Use ar sem óleo e sem umidade para a secagem após o condicionamento.
5. As pontas são descartáveis.
6. Utilize apenas as pontas recomendadas.
7. Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermediário entre utilizações e utilize uma barreira protetora descartável. Se não for utilizada uma barreira protetora descartável, a seringa deve ser tratada como sendo de utilização única.

Contraindicações:

- Não utilizar em pacientes com uma sensibilidade conhecida a acrilatos ou outras resinas. Se ocorrer uma reação alérgica, dermatite ou erupção cutânea, peça ao paciente que consulte o seu médico.
- Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alergênico do produto disponível em www.ultradent.com.br. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Condições para transporte:

Transportar os produtos de forma a evitar quedas ou empilhamento. O produto pode ser transportado à temperatura ambiente, não há necessidade de transporte refrigerado.

Condições de armazenamento e/ou manipulação:

Conservar a temperatura de refrigeração, entre 2 e 8°C, quando não estiver em uso.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

PermaSeal™ quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter a fichas de segurança do produto e informações adicionais sobre a utilização de PermaSeal™, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (2°C A 8°C)



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

PermaSeal™

ANVISA nº: 80279910011

Pontas aplicadoras descartáveis

ANVISA nº: 80279910034

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Detentor do registro, Fabricante e Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 06.295.846/0001-82

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121

Itaici – Indaiatuba – SP - Brasil

CEP: 13340350

08007735100

www.ultradent.com.br

MP00356.3 281123