

BR | Descrição: Ultradent Silane é uma solução adesiva monocomponente para a aplicação em porcelana a seguir ao condicionamento ácido com Ultradent Porcelain Etch.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Seringa contendo 1,2 mL.



Indicação de uso: Ultradent Silane destina-se à adesão após o condicionamento ácido durante o preparo para a resina adesiva. Se forem seguidas precauções adequadas, a porcelana pode ser condicionada intra-oralmente de forma segura, como a seguir:

Instruções de uso:

1. Prepare a superfície da porcelana que será reparada com uma broca diamantada de alta rotação. Se já existir um reparo, remova toda a resina composta velha até obter uma superfície de porcelana nova.
2. Isole/proteja os tecidos e as restaurações adjacentes com um Dique de Borracha e um selador de Dique de Borracha.
3. Aplique uma camada homogênea de um condicionador ácido apropriado para porcelanas na porcelana preparada, e deixe agir por 90 segundos (Ver figuras 1, 2 e 3 mostrando antes e depois).
4. O assistente deverá segurar a ponta de aspiração adjacente à superfície enquanto o dentista dispensa o condicionador ácido. Isto garante a remoção de quaisquer vapores irritantes enquanto o ácido reage com a porcelana (90 segundos).
5. Remova o ácido neutralizado colocando a ponta de aspiração junto da superfície e, em seguida, enxaguando com spray de água. Enxágue abundantemente e seque.



Fig.1 – Dispense cuidadosamente uma camada homogênea de condicionador ácido na porcelana preparada.

A porcelana deverá ter um aspecto fosco. Se isto não for obtido, o condicionamento deve ser repetido.

6. Aplique o Ultradent Silane com uma ponta Mini Brush Tip (ANVISA nº: 80279910003). Deixe evaporar por 60 segundos. Se não estiver completamente seco depois de 60 segundos, seque com ar (sem óleo).

7. Aplique a Resina composta de acordo com as instruções do produto.

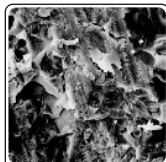


Fig. 2 – MEV do plano diamantado da porcelana.

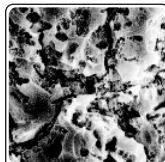


Fig. 3 – Note o aumento da área de superfície e reentrâncias proporcionados pelo condicionamento ácido por 90 segundos.

Precauções e advertências:

1. Apenas para uso profissional.
2. Rever as instruções, precauções e as fichas de segurança do produto antes de iniciar o tratamento.
3. Utilizar apenas conforme indicado.
4. Manter afastado de calor/luz solar.
5. Evitar a exposição da pele às resinas.
6. Isolar a área de tratamento de químicos fortes.
7. Confirmar que o paciente não possua alergias conhecidas aos materiais de tratamento.
8. Testar o fluxo dos materiais da seringa e da ponta antes da utilização intra-oral.
9. Nunca forçar os êmbolos da seringa.

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.

- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Ultradent Silane quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Ultradent Silane e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

As seringas Ultradent tem a data de validade estampada ao lado da seringa e esta é representada por uma letra e três números. A letra é o número do lote usado para a produção do produto e os números são as datas de vencimento. Os primeiros dois números são o mês e o terceiro número é o último número do ano.



VALIDADE

REF

NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO
REPROCESSAR

R_x

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CUIDADO, CONSULTAR OS
DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (2°C A 27°C)



CUIDADO



INFLAMÁVEL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO

ANVISA nº: 80279910062

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:

Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:

Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

MP00160.2 160620