

BR I Descrição: O UltraCal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio radiopaca, com pH 12,5 acondicionado em seringa.

Especificações e características técnicas do produto: O UltraCal XS é uma pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, acondicionado em seringa. É utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal, região apical e como curativo de demora endodôntico entre consultas. O hidróxido de cálcio é reconhecido como um agente antibacteriano devido ao seu alto pH.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de uso: O UltraCal XS é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. O UltraCal XS é utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal e região apical.

Instrução de uso:

1. Após concluída a instrumentação do canal, remover a tampa da seringa de UltraCal XS e conectar uma ponta NaviTip (Fig. 1).
2. Aplique o UltraCal XS próximo ao ápice, lentamente removendo a ponta em direção coronária (Fig. 2).
3. Como o material é básico, utilize com cuidado, e lave com água em abundância caso o material seja inadvertidamente despejado em alguma área indesejada.
4. Aplique com uma ponta NaviTip, permanecendo ao menos 2mm aquém do ápice, certificando-se de deixar a ponta livre no canal.



Fig. 2 - Após concluída a instrumentação inicial, o canal é preenchido com a pasta UltraCal XS.

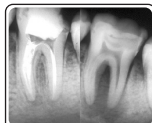


Fig. 3 - Canal antes da obturação à esquerda, 5 meses após a aplicação do UltraCal XS à direita. UltraCal ainda no canal.

Precauções e advertências:

1. Leia e entenda todas as instruções.
2. Se o paciente tiver alguma alergia conhecida ou sensibilidade química a qualquer componente do produto, este NÃO deverá ser utilizado.
3. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.
4. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.
5. O conteúdo da seringa pode ser utilizado até o término do produto, porém as pontas aplicadoras não devem ser reutilizadas.
6. Não aplique com pontas plásticas, que podem ocluir o canal (por exemplo, as pontas Capillary).
7. As seringas pré-carregadas são multidoses. Limpe e desinfete entre as aplicações conforme apropriado.
8. Recomendamos expressamente o uso dos protetores de seringa para remover uma barreira protetora contra contaminação.
9. Não ingerir o produto.
10. Tome cuidado para o produto não entrar em contato com roupas e tecidos, já que a mancha resultante pode ser de difícil remoção.

Armazenamento, conservação e manipulação do produto:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local protegido da poeira.
- Armazenar a temperatura ambiente.
- Não expor a temperatura extrema.
- Não permitir contato com líquidos.

- Armazenar fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.
- Transportar os produtos de forma a evitar quedas ou empilhamento. Observar as condições de temperatura e umidade.

Condições para descarte:

- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com a embalagem íntegra.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

UltraCal XS quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de UltraCal XS e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

**A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO,
PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.**



VALIDADE

REF

NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO
REPROCESSAR

R_x

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CUIDADO, CONSULTAR OS
DOCUMENTOS ACOMPANHANTES



MANTER FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS

10°C 32°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (10°C A 32°C)



CORROSIVO

ANVISA nº: 80279910046

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572



Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

51480.8 110321

2/2