

**BR** **Descrição:** O UltraCal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio radiopaca, com pH 12,5 acondicionado em seringa.

**Especificações e características técnicas do produto:** O UltraCal XS é uma pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, acondicionado em seringa. É utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal, região apical e como curativo de demora endodôntico entre consultas. O hidróxido de cálcio é reconhecido como um agente antibacteriano devido ao seu alto pH.

**Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:** Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

*Seringa contendo 1,2 mL*



**Indicação de uso:** O UltraCal XS é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. O UltraCal XS é utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal e região apical.

#### Instrução de uso:

1. Após concluída a instrumentação do canal, remover a tampa da seringa de UltraCal XS e conectar uma ponta NaviTip (Fig. 1).
2. Aplique o UltraCal XS próximo ao ápice, lentamente removendo a ponta em direção coronária (Fig. 2).
3. Como o material é básico, utilize com cuidado, e lave com água em abundância caso o material seja inadvertidamente despejado em alguma área indesejada.
4. Aplique com uma ponta NaviTip, permanecendo ao menos 2mm aquém do ápice, certificando-se de deixar a ponta livre no canal.



Fig. 1



Fig. 2 - Após concluída a instrumentação inicial, o canal é preenchido com a pasta UltraCal XS.



Fig. 3 - Canal antes da obturação à esquerda, 5 meses após a aplicação do UltraCal XS à direita. UltraCal ainda no canal.

#### Precauções e advertências:

1. Leia e entenda todas as instruções.
2. Se o paciente tiver alguma alergia conhecida ou sensibilidade química a qualquer componente do produto, este NÃO deverá ser utilizado.
3. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.
4. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.
5. O conteúdo da seringa pode ser utilizado até o término do produto, porém as pontas aplicadoras não devem ser reutilizadas.
6. Não aplique com pontas plásticas, que podem ocluir o canal (por exemplo, as pontas Capillary).
7. As seringas pré-carregadas são multidoso. Limpe e desinfete entre as aplicações conforme apropriado.
8. Recomendamos expressamente o uso dos protetores de seringa para remover uma barreira protetora contra contaminação.
9. Não ingerir o produto.
10. Tome cuidado para o produto não entrar em contato com roupas e tecidos, já que a mancha resultante pode ser de difícil remoção.

#### Armazenamento, conservação e manipulação do produto:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local protegido da poeira.
- Armazenar a temperatura ambiente.
- Não expor a temperatura extrema.
- Não permitir contato com líquidos.

- Armazenar fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.
- Transportar os produtos de forma a evitar quedas ou empilhamento. Observar as condições de temperatura e umidade.

#### Condições para descarte:

- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com a embalagem íntegra.

#### Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:

UltraCal XS quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

**NOTA:** Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de UltraCal XS e de outros produtos relacionados, visite: [www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br).

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.**

**PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.**



VALIDADE

**REF**

NÚMERO DO CATÁLOGO

**LOT**

NÚMERO DO LOTE



PROIBIDO  
REPROCESSAR



SOMENTE PARA  
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES  
PARA UTILIZAÇÃO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO  
ACONSELHADA (10°C A 32°C)

**ANVISA nº:** 80279910046

**Responsável técnico:** Claudia Cavani Kurozawa

**CRQ/ SP nº:** 04261572



**Fabricado por:**

Ultradent Products Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
CNPJ: 06.295.846/0001-82  
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121  
Itaici – Indaiatuba – SP  
CEP: 13340350  
0800 773 5100

**Importado e distribuído por:**

Ultradent do Brasil Produtos  
Odontológicos Ltda.  
[www.ultradent.com.br](http://www.ultradent.com.br)

51480.9 191121