

BR | Descrição: Opalustre™ é uma pasta semifluida de abrasão química e mecânica, que contém partículas de ácido clorídrico a 6,6% e micropartículas de carboneto de silício que podem ser enxaguadas com água.

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de usar.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do produto, as taças de polimento OpalCups™ e as pontas aplicadoras White Mac™.

Seringa contendo 1,2 mL



Indicação de uso: Opalustre™ é usado para a remoção de imperfeições superficiais (<0,2 mm de profundidade), incluindo descoloração leve por fluorose.

Intruções passo a passo:

Preparação:

- 1) Recomenda-se tirar fotos iniciais para referência.
- 2) Usando um dique de borracha e grampos, ou seguindo as instruções para a aplicação do OpalDam™/OpalDam™ Green, isole o dente ou os dentes a serem tratados juntamente com um dente adjacente de cada lado.
- 3) Retire a tampa Luer lock da seringa Opalustre™ e aplique a ponta White Mac™.
- 4) Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. No caso de sentir resistência, substitua a ponta e verifique novamente.

Utilização:

- 1) Aplique uma camada de Opalustre™ sobre a área a ser tratada.
- 2) Utilize OpalCups a uma velocidade lenta (aproximadamente 500 rpm), aplique uma

pressão média a forte intermitente durante 60 segundos por aplicação.

3) Remova a pasta com sucção, em seguida, enxágue, avalie se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Limpeza:

- 1) Após o enxague final, retire o dique de borracha ou o OpalDam™/ OpalDam Green™. Enxague abundantemente.
- 2) Use o acabamento OpalCups™ para polimento da superfície. Um tratamento com flúor também é recomendado.
- 3) Tire fotos finais para referência.

NOTA: Para a sensibilidade pós-intervenção recomenda-se a utilização de produtos a base de verniz de nitrato de potássio ou flúor durante 30 minutos a 8 horas por dia. As áreas de hipomineralização profunda e algumas manchas poderão não responder ao tratamento e poderão exigir restaurações estéticas adesivas. Recomendamos a utilização de produtos clareadores antes dos tratamentos com Opalustre™, pois este procedimento pode ser muitas vezes evitado. Se forem utilizados produtos de clareadores, aguardar 7-10 dias antes de colocar quaisquer restaurações estéticas/aderentes.

Advertências e precauções:

- Na utilização deste produto o isolamento meticuloso é extremamente importante devido ao ácido clorídrico.
- Evite o contato com tecidos moles. Se o produto entrar em contato com qualquer tecido mole, lavar imediatamente a área com água abundante.
- O paciente, o dentista e o assistente devem usar óculos de proteção.
- Utilizar apenas as pontas recomendadas.
- Manter longe de fontes de calor e da luz solar direta.
- Se o dique de borracha não for usado, siga as instruções para a aplicação do OpalDam™.
- Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta e peça ao paciente para consultar o seu médico.

Contraindicações:

- Não use em fluorose severa.
- Não use em esmalte fino.

• Para pacientes ou usuários com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com.br. Se for observada reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação: Mantenha sempre longe do calor e/ou luz solar. Armazene o produto a temperatura ambiente (18 a 29°C).

Condições para descarte:

- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Opalustre™ quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Opalustre™ e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.



PROIBIDO
REPROCESSAR



SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL



CONSULTAR AS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO



TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
ACONSELHADA (18°C A 29°C)



USAR ÓCULOS
DE PROTEÇÃO

Opalustre™
ANVISA nº: 80279910008

Pontas aplicadoras descartáveis:
ANVISA nº: 80279910033

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572



**Detentor do registro, Fabricante e
Distribuidor**

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP - Brasil
CEP: 13340350

08007735100
www.ultradent.com.br

ES | Descripción: Opalustre™ es una pasta semifluida de abrasión química y mecánica, que contiene partículas de ácido clorhídrico al 6,6% y micropartículas de carbono de silicio que pueden ser enjuagada con agua.

Para todos los productos descritos, lea atentamente y entienda todas las instrucciones e información en Ficha de datos de seguridad antes de su uso.

Listado de materiales de soporte que acompañan al producto: Con el producto se incluye el respectivo Manual de Instrucciones de Uso y, dependiendo de la presentación del producto, las copas pulidoras OpalCups™ y las puntas aplicadoras White Mac™.

Jeringa conteniendo 1,2 mL



Indicación de uso: Opalustre™ se utiliza para la eliminación de imperfecciones superficiales (<0.2 mm de profundidad), incluida decoloración leve por fluorosis.

Instrucciones paso a paso:

Preparación:

- 1) Se recomienda tomar fotografías iniciales como referencia.
- 2) Usando un dique de goma y abrazaderas, o siguiendo las instrucciones para aplicar OpalDam™/OpalDam™ Green, aisle el diente o dientes a tratar junto con un diente adyacente a cada lado.
- 3) Retire la tapa Luer lock de la jeringa Opalustre™ y aplique la punta White Mac™.
- 4) Verificar el flujo antes de la aplicación intraoral. Si siente resistencia, reemplace la punta y verifique nuevamente.

Usar:

- 1) Aplicar una capa de Opalustre™ en la zona a tratar.
- 2) Utilice OpalCups™ a baja velocidad (aproximadamente 500 rpm), aplique una

presión de media a fuerte de forma intermitente durante 60 segundos por aplicación.

3) Retire la pasta con succión, luego enjuague, evalúe si se han eliminado menos de 0,2 mm y repita según sea necesario.

Limpieza:

- 1) Después del enjuague final, retire el dique de goma o OpalDam™/ OpalDam™ Green. Enjuague bien.
- 2) Utilice el acabado OpalCups™ para pulir la superficie. También se recomienda un tratamiento con flúor.
- 3) Tome fotografías finales como referencia.

NOTA: Para la sensibilidad postintervención se recomienda utilizar productos a base de nitrato de potasio o barniz de flúor durante 30 minutos a 8 horas al día. Es posible que las áreas de hipomineralización profunda y algunas manchas no respondan al tratamiento y requieren restauraciones estéticas adhesivas. Recomendamos utilizar productos blanqueadores antes de los tratamientos con Opalustre™, ya que este procedimiento muchas veces se puede evitar. Si se utilizan productos de agentes blanqueadores, espere de 7 a 10 días antes de colocar cualquier restauración estética/adherente.

Advertencias y precauciones:

- Al utilizar este producto, es extremadamente importante un aislamiento meticuloso debido al ácido clorhídrico.
- Evite el contacto con tejidos blandos. Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, lavar inmediatamente la zona con abundante agua.
- El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras.
- Utilice únicamente los consejos recomendados.
- Mantener alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- Si no se utiliza el dique de goma, siga las instrucciones para aplicar OpalDam™.
- Si observa una reacción alérgica, lave bien la zona expuesta y solicite al paciente que consulte a su médico.

Contra indicaciones:

- No utilizar en fluorosis grave.
- No utilice esmalte de uñas fino.

• Para pacientes o usuarios con alergias, consultar el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com.br. Si se observa una reacción alérgica, lave bien el área expuesta con agua. y pedir al paciente que consulte a su médico.

Condiciones de almacenamiento, transporte y/o manipulación: Mantener siempre alejado del calor y/o la luz solar. Conservar el producto a temperatura ambiente (18 a 29°C).

Condiciones para la eliminación:

- Si se viola el embalaje, no utilice el producto. Deseche y use otro que tenga el empaque intacto.
- Después de su uso, el producto debe ser desechado en lugares adecuados para la eliminación de materiales dentales.

Requisitos Esenciales para la Seguridad y Eficacia de los Productos Sanitarios:

Opalustre™, cuando se utiliza para el fin para el que fue diseñado, y cuando es manipulado por el odontólogo siguiendo las instrucciones de uso, no presenta riesgos para el paciente ni para el odontólogo.

NOTA: Para hojas de datos de seguridad e información adicional sobre el uso de Opalustre™ y otros productos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOLO PARA USO PROFESIONAL.

PUNTAS DE APLICACIÓN DE UN SOLO USO.



PROHIBIDO
REPROCESAR



SOLO PARA USO
PROFESIONAL



CONSULTA LAS INSTRUCCIONES
DE USO



TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
RECOMENDADA (18°C A 29°C)



USAR GAFAS DE
PROTECCIÓN

Opalustre™
ANVISA nº: 80279910008

Puntas de aplicador desechables:
ANVISA nº: 80279910033

Responsable técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

**Titular del Registro, Fabricante y
Distribuidor**

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP - Brasil
CEP: 13340350

08007735100
www.ultradent.com.br